



Für kürzere Transfers.

Liko™ GleitTuch Fix und Liko™ GleitMatte Fix sind manuelle Hilfsmittel, die Transfers erleichtern, indem Sie die Reibung zwischen dem Pflegebedürftigen und der Liegefläche verringern. Sie eignen sich sowohl für normalgewichtige als auch für sehr schwere Pflegebedürftige. Die Gleittücher dieser Produktreihe werden aus einem qualitativ hochwertigen, reibungsarmen Material gefertigt, das selbst nach einer längeren Anwendungszeit immer noch sehr leicht gleitet.

Liko™ GleitTuch Fix wird hauptsächlich zur Vereinfachung des Anlegens eines Hebegurts in einer sitzenden oder liegenden Position verwendet. Liko™ GleitMatte Fix wird z.B. verwendet, um einen Pflegebedürftigen weiter oben im Bett zu positionieren oder diesen umzulagern, sowie für Transfers zwischen zwei Betten.

Unter den einzigartigen Merkmalen des GleitTuch Fix finden sich z.B. Taschen, die eine Positionierung in einem engen Rollstuhl erleichtern, sowie Schlaufen an der längeren Ausführung des Liko™ GleitTuch Fix, mittels derer das Tuch am Kopfende des Bettes fixiert werden kann. Beide dieser Merkmale sind einmalig nur bei dieser Produktreihe zu finden und sind eingetragene Gebrauchsmuster von Liko. .

Wichtige Merkmale

- **Das Material** ist qualitativ sehr hochwertig und ist selbst nach vielen Waschvorgängen immer noch sehr reibungsarm.
- **Die langen Ausführungen** des GleitTuch Fix sind an der oberen Kante mit Schlaufen versehen, um dessen Fixierung am Bett zu erleichtern. So verringert sich die Anzahl der Helfer, die das Gleittuch halten.
- **Das kurze GleitTuch Fix** ist mit kleinen Taschen versehen, die das Anlegen eines Hebegurts, z.B. in einem schmalen Rollstuhl, erleichtern.
- **Wir haben einzigartige Arbeitsverfahren entwickelt**, die das Anlegen von Gleittüchern erleichtern und zugleich bequem für den Pflegebedürftigen sind. Bei Anwendung unseres Verfahrens muss der Pflegebedürftige zur Platzierung des Gleittuchs im Bett nicht gedreht werden.
- **Liko GleitMatte Fix** ist in drei unterschiedlichen Modellen für unterschiedliche Anwendungsbereiche erhältlich.

Liko™ GleitTuch Fix

Liko™ GleitTuch Fix ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zum Anlegen eines Hebegurts, insbesondere bei sehr schweren oder schmerzempfindlichen Pflegebedürftigen oder bei Pflegebedürftigen mit Kontrakturen.

Liko™ GleitTuch Fix ist in zwei Ausführungen erhältlich, kurz und lang, wobei das lange Modell rundherum mit Griffen versehen ist. Liko GleitTücher werden in 2er-Sets geliefert und paarweise verwendet.



Liko™ GleitMatte Fix

Liko™ GleitMatte Fix ist ein Hilfsmittel, das hauptsächlich dazu verwendet wird, einen Pflegebedürftigen weiter oben im Bett zu positionieren oder diesen im Bett umzulagern, sowie für Transfers zwischen zwei Betten.

Liko™ GleitMatte Fix ist in drei unterschiedlichen Modellen erhältlich, von denen jedes einen anderen Anwendungsbereich abdeckt: Kurz, lang und breit.



Lesen Sie bezüglich weiterer Informationen hinsichtlich der Anwendungsbereiche sowie des Einsatzes in der Praxis die Gebrauchsanweisungen der entsprechenden Produkte. Des Weiteren können Sie sich hinsichtlich einer Beratung sowie Informationen mit einer Liko-Vertretung in Ihrer Nähe in Verbindung setzen. Unsere Adressen finden Sie unter www.liko.com. Denken Sie immer daran, ergonomisch korrekt zu arbeiten. Wenn die Tätigkeit für den Helfer zu schwer erscheint, empfehlen wir die Verwendung anderer Hebe- und Transferhilfsmittel aus unserem umfangreichen Sortiment an Lifter- und Hebezubehör.

Liko™ GleitTuch Fix

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	Abmessungen (cm)
Liko™ GleitTuch Fix kurz, ohne Griffe	3715015	M	70x70
Liko™ GleitTuch Fix kurz, ohne Griffe	3715017	XL	120x85
Liko™ GleitTuch Fix lang, mit Griffen	3716015	M	90x185
Liko™ GleitTuch Fix lang, mit Griffen	3716017	XL	140x215

Auch in Großpackungen (10 Stck./Packung) erhältlich.

Liko™ GleitMatte Fix

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	Abmessungen (cm)
Liko™ GleitMatte Fix kurz, ohne Griffe	3710015	M	70x90
Liko™ GleitMatte Fix lang, ohne Griffe	3711015	M	90x185
Liko™ GleitMatte Fix breit, mit Griffen	3712015	M	140x140

Auch in Großpackungen (10 Stck./Packung) erhältlich.

GleitTuch Fix und GleitMatte Fix wurde von einer akkreditierten Prüfanstalt getestet und erfüllt alle an MDD-Produkte der Klasse I gestellten Anforderungen sowie die harmonisierte Norm EN ISO 10535.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Das Qualitätsmanagementsystem von Liko ist gemäß ISO 9001 und ISO 13485, dem speziell für Hersteller medizintechnischer Produkte geltenden Äquivalent, zertifiziert. Das Umweltmanagementsystem von Liko ist gemäß ISO 14001 zertifiziert.



Hill-Rom and Design und Hill-Rom word mark sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Hill-Rom Services Inc. Liko and Design und Liko word mark sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Liko R&D AB. Liko GleitTuch Fix und Liko GleitMatte Fix sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Liko R&D AB.

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen
Tel. 0800 600 500
Fax 0800 600 900

www.strack.ch
info@strack.ch

strack
Patienten-
und Pflegebedarf