

ERLEBEN SIE DEN **OXY** EFFEKT**Incidin® OxyFoam & OxyWipe****NEU!**


Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H_2O_2 ™

Die innovativen Produkte Incidin® OxyFoam & Incidin OxyWipe bieten den einzigartigen Vorteil einer patentierten Wasserstoffperoxid-Formulierung mit breitem Wirkspektrum.

Sie wirken gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlassen aufgrund ihrer schnellen Verdunstungsrate keine aktiven Rückstände. Die Wirksamkeit von OxyWipe wurde anhand der vom Tuch abgegebenen Tränklösung getestet.

Incidin® OxyFoam & OxyWipe bieten:

- ▲ Hi-speed H_2O_2 ™
- ▲ Praxisnah nach neuer EN 16615 getestet
- ▲ Keine Gefahrensymbole (gem. CLP) – keine Persönliche Schutzausrüstung¹ erforderlich
- ▲ Exzellente Materialverträglichkeit

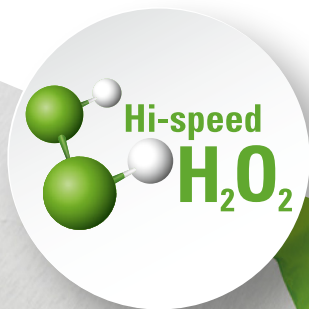

Incidin® OxyFoam & OxyWipe

Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H₂O₂™

15
SEK²Bakterizid
(EN 13727/16615)15
SEK²Viruzid gegen
behüllte Viren15
MIN²

Noroviruzid

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
EFFEKTIV	Breites Wirkspektrum und kurze Einwirkzeiten
SICHER	Keine Gefahrensymbole (gem. CLP) – Keine PSA ¹ erforderlich
ANWENDERFREUNDLICH	Exzellente Materialverträglichkeit – Reinigen & Desinfizieren in einem Schritt

WIRKSAMKEIT	Einwirkzeit OXYFOAM	Einwirkzeit OXYWIPE
Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 (einschl. EN 16615), hohe Belastung		
Bakterizid, levurozid	5 Min.	15 Min.
Fungizid	15 Min.	15 Min.
Tuberkulozid, mykobakterizid	15 Min.	60 Min.
Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie 2008 (hohe Belastung)		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004	15 Sek.	30 Sek.
Rotavirus	30 Sek.	30 Sek.
Adenovirus	1 Min.	15 Min.
Papovavirus / Polyomavirus / SV40	30 Sek.	30 Sek.
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)		
EN 13727 (bakterizid)	15 Sek.	1 Min.
EN 13624 (levurozid)	1 Min.	15 Min.
EN 13624 (fungizid)	5 Min.	15 Min.
EN 14348 (tuberkulozid, mykobakterizid)	5 Min.	30 Min.
EN 14476 (Adenovirus)	30 Sek.	1 Min.
EN 14476 (Norovirus)	15 Min.	60 Min.
EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)		
EN 16615 (bakterizid)	15 Sek.	5 Min.
EN 16615 (levurozid)	15 Sek.	1 Min.
EN 16615 (fungizid)	5 Min.	5 Min.
EN 16615 (tuberkulozid, mykobakterizid)	15 Min.	60 Min.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR INCIDIN® OXYFOAM



- 1 Aus einem Abstand von ca. 30 cm auf die Oberfläche sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen



- 1 Auf ein sauberes Tuch sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen

Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen
Tel. 0800 600 500
Fax 0800 600 900

www.strack.ch
info@strack.ch

strack
Patienten-
und Pflegebedarf

CE 0297

ANWENDUNGSBEREICH

Incidin® OxyFoam:
Schaumspray zur
Reinigung und Desinfektion
medizinischer Oberflächen
(einschl. z. B. Sonden) und
medizinischem Inventar.



Incidin® OxyWipe:
Reinigungs- und Desin-
fektionstücher für medizinische
Oberflächen (einschl. z. B.
Sonden) und Inventar.



Ⓛ BIOZID N-61595
Ⓛ BIOZID N-61592

GEBRAUCHSANWEISUNG

Incidin® OxyFoam: Anwendungsfertige Lösung. Unverdünnt auf Flächen und Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung aufsprühen und auf ausreichende Benetzung achten. Dann mit einem sauberen Tuch nachwischen oder Produkt unverdünnt auf ein Einmaltuch geben und Oberflächen damit abwischen und abtrocknen lassen.

Incidin® OxyWipe: Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Flächen komplett benetzen und trocknen lassen. Flowpack wieder verschließen. Nicht geeignet zur Schlussdesinfektion von invasiven Medizinprodukten. Nicht verwenden auf oxidativ-empfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing.

INHALTSSTOFFE

100 g enthalten:

Incidin® OxyFoam: 1,5 g Wasserstoffperoxid

Incidin® OxyWipe: 1,0 g Wasserstoffperoxid

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft – mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungs- einheit	Artikel- nummer
Incidin® OxyFoam	6 x 750 ml	30 821 60 PZN 1115 60 47
Incidin® OxyWipe	6 x 100 Tücher	30 823 60 PZN 1115 60 53

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Haltbarkeit nach dem Öffnen:

Incidin® OxyFoam:
Bis zum aufgedrucktem Verfalldatum

Incidin® OxyWipe: 1 Monat

Referenzen

1. Beim Umgang mit Incidin® OxyFoam oder OxyWipe muss keine PSA getragen werden, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.
2. Incidin® OxyFoam (EN 13727/EN 16615/EN 14476)

BIOZIDE UND MEDIZINPRODUKTE
SICHER VERWENDEN. VOR GEBRAUCH
STETS KENNZEICHNUNG UND
PRODUKTINFORMATION LESEN.