

# vario safe

Der Rutschschutz  
für Dusche & Bad


strack Patienten-  
und Pflegebedarf



## Der optimale Rutschschutz für Dusche und Bad!

Mit **variosafe**, dem Rutschschutz für Dusche und Bad, wird das Duschen nicht mehr zur Gefahr für Stürze oder Ausrutscher. Durch Kombination von Wasser und Seifenrückständen verwandeln sich die Dusch- und Badewannenböden schnell in eine sehr rutschige Angelegenheit. Kinder und besonders ältere Menschen – aufgrund ihrer eingeschränkten Beweglichkeit – sind einer erhöhten Sturzgefahr ausgesetzt.

Die schnell montierten **variosafe Selbstklebe-Pads** schützen nicht nur vor folgenschweren Ausrutschern, sondern sehen auch noch schön und elegant aus. Sie passen in jedes Badezimmer und bilden – im Gegensatz zu herkömmlichen Duschmatten oder Badewanneneinlagen – keine Nährböden für Schimmelpilze! Die Pflege und Reinigung der geklebten Flächen erfolgt mit handelsüblichen Reinigern.

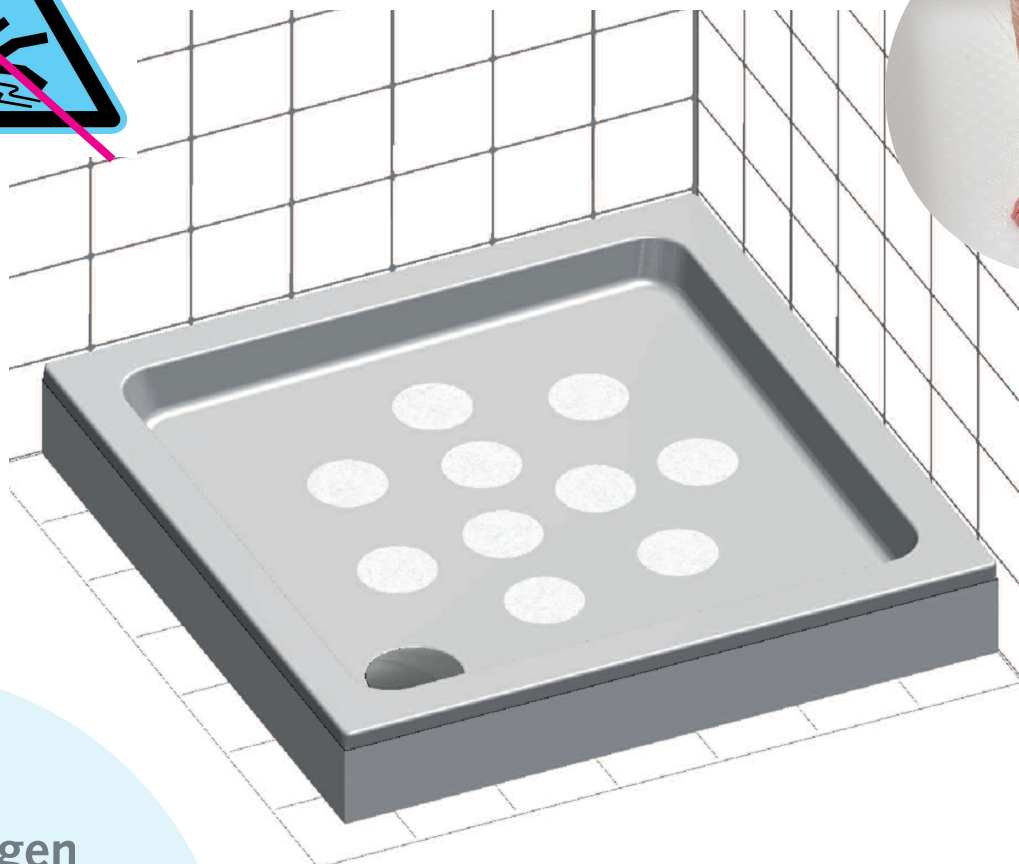

Reinigen  
Aufkleben  
Andrücken  
Fertig!

delfi care

# vario safe

Der Rutschschutz für Dusche & Bad



## Montageanleitung



1. Bei alten Wannen die Fläche zuerst mit einem handelsüblichen Kalkreiniger vorbehandeln. Danach den Untergrund reinigen und entfetten (z.B. mit Alkoholreiniger).

*Die Pads bitte nicht auf nassen, rauhen Fliesen, Fugen oder veredelten Oberflächen (Nanobeschichtung, Lotuseffekt) kleben.*



2. Auf den getrockneten Untergrund die **delficare** Positionierungshilfe für eine gleichmäßige Aufteilung der **variosafe** Selbstklebe-Pads legen.



3. Rückseitige Schutzfolie der **variosafe** Selbstklebe-Pads vom Rand her abziehen. Die Klebefläche dabei nicht mit den Fingern berühren!



4. Pads Stück für Stück aufkleben und fest andrücken, denn der Pressdruck ist entscheidend – nicht die Presszeit! Die Pads gleich richtig positionieren. Wiederholtes Abziehen und Korrigieren mindert die Klebekraft.

Unsere Pads haben schon nach kürzester Zeit eine extrem starke Klebekraft!

5. Die Positionierungshilfe entfernen und die Pads 12 Stunden trocknen lassen. Danach kann der Nasszellenbereich wieder benutzt werden.



### DEMONTAGE

1. Für die **Demontage** werden die geklebten Pads mit einem Föhn vorsichtig mit Abstand erwärmt und langsam mit Feingefühl abgezogen. Wenn Sie dies nicht machen, können Beschädigungen am Untergrund die Folge sein.

## Ihre Vorteile

- klebt auf Acryl-, Emaile- und Keramikwannen
- einfache, schnelle Montage
- pflegeleicht
- hochwertiges Material
- wieder entfernbar
- transparent

### LIEFERUMFANG:

10 Pads, ø 9 cm, selbstklebend  
1 Positionierungshilfe  
1 Montageanleitung  
Artikelnr.: 51010