

# MiniLift200

SystemRoMedic™

**MAX**  
zul. Belastung  
**200 kg**

Einfach verstellbarer Hubarm

Leicht manövrierbar

Ergonomisch geformte Griffe und Seitenstützen bieten dem Pflegebedürftigen unterschiedliche Greifmöglichkeiten.

Kurzanleitung  
direkt am Lifter

**Einzigartige  
Umsetzung des  
physiologischen  
Bewegungsmusters  
beim Aufrichten**

Akkupack mit hoher  
Kapazität und langer  
Betriebsdauer

Kompaktes Format

Eingebautes Ladegerät

Weiche, verstellbare  
Unterschenkelrolle

Feststellbremse  
an den hinteren  
Laufrollen

Fußplatte mit niedriger Einstiegshöhe  
und Antirutschoberfläche

Leichtgängige, wartungsfreie Laufrollen

Elektrische Breitenverstellung  
des Fahrgestells



## Einzigartiges Hilfsmittel für aktives Aufrichten – mit elektrischer Breitenverstellung des Fahrgestells

MiniLift200 ist ein mobiler Aufstehlifter, der in Kombination mit einer explizit für die MiniLift-Modelle konzipierten Aufstehweste den Pflegebedürftigen mit eingeschränkten Bewegungsfunktionen beim Aufrichten aus dem Sitzen in den Stand unterstützt. Seine clevere Konstruktion macht MiniLift200 zu einem absolut einzigartigen Aufstehlifter mit sagenhaftem Komfort. Dieser Lifter ist klein, handlich und wendig, lässt sich denkbar leicht manövrieren und über verschiedene Einstellungen an den Pflegebedürftigen anpassen. All dies ermöglicht den Einsatz von MiniLift200 in den meisten Räumlichkeiten und in vielen Transfersituationen.



# MiniLift200

## Sagenhafter Komfort beim aktiven Aufrichten entsprechend physiologischer Bewegungsmuster

MiniLift200 unterstützt den Pflegebedürftigen beim Aufrichten vom Sitzen in den Stand – möglichst schonend und mit höchstmöglichem Komfort.

Die ergonomisch geformten Griffe oben und an der Seite bieten dem Pflegebedürftigen unterschiedliche Greifmöglichkeiten. Die Einstiegshöhe der stabilen, rutschfesten Fußplatte ist niedrig. Die Unterschenkelrolle und der Hubarm sind zur optimalen Anpassung an den jeweiligen Pflegebedürftigen verstellbar. Mit dem richtigen Hebezubehör kombiniert, werden Füße, Unterschenkel und Rücken des Pflegebedürftigen beim aktiven Aufrichten sicher und angenehm gestützt. Der Aufstehhilftr hebt den Pflegebedürftigen nach oben und vorne entsprechend physiologischer Bewegungsmuster. Gleichzeitig werden Beinmuskulatur und Gleichgewichtssinn trainiert. Die Konstruktion aus Stahl macht MiniLift200 sehr robust und stabil. Dieser Aufstehhilftr ist für eine maximale Belastung von 200 kg zugelassen und eignet sich somit auch für großgewachsene und schwere Pflegebedürftige.

Aktives Aufrichten entsprechend physiologischer Bewegungsmuster



## PRODUKTSPEZIFIKATION

MiniLift200\_\_ Mobiler Aufstehhilftr mit elektrischer \_\_\_\_\_ Art.-Nr. 401100334  
Breitenverstellung des Fahrgestells

## TECHNISCHE DATEN

Max. zulässige Belastung \_\_\_\_\_ 200 kg  
Körpergröße des Pflegebedürftigen, min. – max. \_\_\_\_\_ 140 cm – 200 cm  
Material \_\_\_\_\_ Stahl, pulverbeschichtet  
Höhe \_\_\_\_\_ 1000 mm  
Länge \_\_\_\_\_ 980 mm  
Fahrgestellbreite (außen) \_\_\_\_\_ 590 – 1030 mm  
Fahrgestellbreite (innen) \_\_\_\_\_ 450 – 875 mm  
Gewicht \_\_\_\_\_ 49 kg  
Breitenverstellung des Fahrgestells \_\_\_\_\_ Elektrisch  
Fußplatte, Einstiegshöhe \_\_\_\_\_ 95 mm  
Laufrollen, Durchmesser \_\_\_\_\_ 100 mm  
Hubgeschwindigkeit, ohne Last \_\_\_\_\_ 35 mm/s  
Notabsenkung \_\_\_\_\_ Manuell und elektrisch



MiniLift200 erfüllt sämtliche einschlägige Anforderungen der EU-Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG der Klasse I und des Medizinproduktegesetzes (MPG).



Ergonomische und benutzerfreundliche Handbedienung mit 4 Tasten



Neue Steuereinheit mit Diagnostik, z. B. Anzeige von der Anzahl durchgeführter Hebevorgänge und Überlast

Elektrischer Not-Aus-Taster leicht zugänglich an der Steuereinheit

## ZUBEHÖR

	Art.-Nr.	Produktname	Beschreibung
 45500003-009	45500003	ThoraxSling	Polyester, X-Small
	45500004	ThoraxSling	Polyester, Small
	45500006	ThoraxSling	Polyester, Medium
	45500007	ThoraxSling	Polyester, Large
	45500008	ThoraxSling	Polyester, X-Large
 45550004-009	45500009	ThoraxSling	Polyester, XX-Large
	45550004	ThoraxSling	wischdesinfizierbar, Small
	45550006	ThoraxSling	wischdesinfizierbar, Medium
	45550007	ThoraxSling	wischdesinfizierbar, Large
	45550008	ThoraxSling	wischdesinfizierbar, X-Large
 45600004-008	45550009	ThoraxSling	wischdesinfizierbar, XX-Large
	45600004	ThoraxSling	Einwegvliesstoff, NonWoven, Small, 5 Stück
	45600006	ThoraxSling	Einwegvliesstoff, NonWoven, Medium, 5 Stück
	45600007	ThoraxSling	Einwegvliesstoff, NonWoven, Large, 5 Stück
	45600008	ThoraxSling	Einwegvliesstoff, NonWoven, X-Large, 5 Stück
 45690004-008	45690004	ThoraxSling	Mit Gesäßstütze, Polyester, Small
	45690006	ThoraxSling	Mit Gesäßstütze, Polyester, Medium
	45690007	ThoraxSling	Mit Gesäßstütze, Polyester, Large
	45690008	ThoraxSling	Mit Gesäßstütze, Polyester, X-Large
	45690004	ThoraxSling	Mit Gesäßstütze, Einwegvliesstoff, NonWoven, Small, 5 Stück
 45690004-008	45690006	ThoraxSling	Mit Gesäßstütze, Einwegvliesstoff, NonWoven, Medium, 5 Stück
	45690007	ThoraxSling	Mit Gesäßstütze, Einwegvliesstoff, NonWoven, Large, 5 Stück
	45690008	ThoraxSling	Mit Gesäßstütze, Einwegvliesstoff, NonWoven, X-Large, 5 Stück
	70200033	CalfStrap	Wadenband für MiniLift200 ab Seriennummer 200001277
	70200012	SlingBarWrap MiniLift	Weiches, wischdesinfizierbares Hebebügelpolster für MiniLift200
70200089	Hand control HB33-6	Handbedienung mit 6 Tasten. Mit Anzeigen für Servicefähigkeit, Akkustatus und Überlast	
70200029	External charger Linak	Externes Ladegerät für alle Modelle und Ausführungen von MiniLift	

### ThoraxSling

SystemRoMedic™

ThoraxSling ist eine äußerst bequeme Aufstehweste für den Einsatz mit den Aufstehhilftrern MiniLift im SystemRoMedic™ von Handicare. Einfaches Anlegen entlastet die Pflegekraft. Die Weste vermittelt dem Pflegebedürftigen ein besonders hohes Sicherheitsgefühl beim Aufstehen und Stehtraining. ThoraxSling erleichtert auch den Toilettengang. ThoraxSling gibt es in zwei Modellen: Das eine Modell (ThoraxSling) stützt hinten am Rücken, das andere (ThoraxSling, mit Gesäßstütze) stützt zusätzlich das Gesäß. In verschiedenen Materialien und Größen erhältlich.

### Weitere Modelle und Ausführungen des mobilen Aufstehhilftrers MiniLift

MiniLift ist in mehreren Modellen und Ausführungen erhältlich: mit unterschiedlicher Tragfähigkeit, mit manueller oder elektrischer Breitenverstellung des Fahrgestells sowie mit standardmäßig hohem oder tiefergelegtem Fahrgestell für den Einsatz bei niedrigen Betten.

Art.-Nr.	Produktname	Beschreibung
60300010	MiniLift160EM	Mobiler Aufstehhilftr mit manueller Breitenverstellung des Fahrgestells, max. zul. Belastung 160 kg
60300011	MiniLift160EM	Mobiler Aufstehhilftr mit manueller Breitenverstellung des Fahrgestells, tiefergelegt, max. zul. Belastung 160 kg
60300012	MiniLift160EE	Mobiler Aufstehhilftr mit elektrischer Breitenverstellung des Fahrgestells, max. zul. Belastung 160 kg
60300013	MiniLift160EE	Mobiler Aufstehhilftr mit elektrischer Breitenverstellung des Fahrgestells, tiefergelegt, max. zul. Belastung 160 kg
400641434	MiniLift125	Mobiler Aufstehhilftr mit elektrischer Breitenverstellung des Fahrgestells, max. zul. Belastung 125 kg

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website [www.handicare.de](http://www.handicare.de)



handicare

Weteringweg 5 – 9  
2641 KM Pijnacker  
Niederlande  
Tel.: +49 571 9733980  
Fax: +31 15 3697164  
[www.handicare.de](http://www.handicare.de)  
[info.de@handicare.com](mailto:info.de@handicare.com)

SystemRoMedic™ ist eine ganzheitliche Lösung für denkbar einfache Transfers Pflegebedürftiger. Das Konzept beinhaltet vier Produktbereiche, die für die meisten Transfersituationen eine nahezu perfekte Lösung bieten.

**Transferieren:** von einem Ort zum anderen. **Positionieren:** am gleichen Ort.

**Unterstützen:** bei der Mobilisierung. **Heben:** manuell und elektrisch.