

ReTurn™

SystemRoMedic™



**Patentierte*
Konstruktion**

**Modelle für unterschiedliche
Bedürfnisse**

Aktiviert den Pflegebedürftigen

**Kein schweres Heben für
die Pflegekraft**

Sicheres und aktives Aufstehen und Umsetzen ganz und gar ohne schweres Heben – geradezu spielerisch

ReTurn ist nicht nur ein einfaches und unglaublich effektives Hilfsmittel beim Aufstehen und Umsetzen, ReTurn glänzt auch als Trainingsgerät. ReTurn gibt dem Pflegebedürftigen Sicherheit, ob beim aktiven Aufstehen oder als Hilfsmittel beim Umsetzen zwischen Bett, Sessel, Rollstuhl und Toilette. ReTurn findet auch Verwendung als Hilfsmittel beim Positionieren hinten im Sessel oder Rollstuhl. Transfers mit ReTurn gehen spielerisch einfach von der Hand – und dabei bleibt der Pflegekraft das schwere Heben völlig erspart. Bei Pflegebedürftigen mit Restkraft in Armen und Beinen regt ReTurn das physiologische Bewegungsmuster beim Aufstehen an und stärkt gleichzeitig die Muskeln und Funktionen des Körpers. Dies macht ReTurn zum idealen Hilfsmittel im Reha-Bereich. Durch den Einsatz von ReTurn in den eigenen vier Wänden können Pflegebedürftige meist länger zuhause wohnen bleiben, vor allem wenn ihnen nur ein Helfer beiseite steht.



handicare

ReTurn - das Hilfsmittel, das den Maßstab setzt

Als wir das erste Modell von ReTurn in den Markt einführen, haben wir gleichzeitig einen völlig neuen Begriff eingeführt. ReTurn7100 war nämlich die allererste Transferplattform im Markt – eine völlig neuartige Aufsteh- und Umsetzhilfe. ReTurn7100 vertrat eine noch nie da gewesene Denkweise im Hinblick auf Hilfsmittel für Ältere oder Menschen mit eingeschränkten Bewegungsfunktionen: Aufstehen sowie Umsetzen zwischen Bett, Rollstuhl, Sessel, Duschstuhl und Toilette – auf einfache, reibungslose und natürliche Art und Weise.

Das weiterentwickelte Modell, ReTurn7500, erreichte dann in kürzester Zeit mit einem völlig neuen, einzigartigen Design eine starke Stellung im Markt als eines der absolut beliebtesten und am meisten verwendeten Hilfsmittel in der Kategorie Unterstützen im SystemRoMedic™. Der Grund für den Erfolg ist ganz einfach – ReTurn7500 bietet die ultimative Kombination aus Einfachheit und Vielseitigkeit.

Einfach und vielseitig

ReTurn ist eine manuelle Aufsteh- und Umsetzhilfe – äußerst einfach und intuitiv in der Handhabung, selbsterklärend für Pflegebedürftige und Pflegekräfte. ReTurn ist außerdem ein sehr vielseitiges Produkt, das großen und auch kleinen Pflegebedürftigen beim Aufstehen, bei der

Positionierung im Sitzen und bei kurzen Transfers im Innenbereich in mehrerer Art und Weise sichere und effektive Unterstützung bietet. Und dies auch dort, wo wenig Platz ist. Als hervorragendes Trainingsgerät kann ReTurn im Rehabilitationsprozess als zweckdienliches Hilfsmittel eingesetzt werden.

Kosteneffizienz und optimaler Einsatz von Ressourcen

ReTurn ist eine Transferplattform, die weit mehr als eine herkömmliche Steh- und Drehscheibe bietet. Auch sind dafür nicht so große Investitionen wie für einen mechanischen Aufstehlift erforderlich. Die Einfachheit und die vielen Einsatzbereiche in Verbindung mit der ständigen Verfügbarkeit und der einfachen Anpassung an den jeweiligen Pflegebedürftigen machen ReTurn zu einem Hilfsmittel, das auch tatsächlich gerne verwendet wird.

Durch den optimalen Einsatz von Ressourcen leistet ReTurn wiederum in der Tat einen Beitrag zu besseren Arbeitsbedingungen und zur Vorbeugung von Belastungsschäden beim Pflegepersonal. Darüber hinaus erfährt der Pflegebedürftige mehr Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Würde. Das ist fürwahr ein wunderbarer Fortschritt und ein Gewinn in der Pflege!



Das Bild zeigt ReTurn7100
mit U-förmigem Bügel
(nicht mehr im Programm).

Verschiedene Modelle bieten Wendigkeit für Groß und Klein – überall

ReTurn7500 ist das Original und ein Erfolgsprodukt – und bald ein Klassiker. Um für möglichst viele Situationen ein hohes Maß an Wendigkeit zu bieten und gleichzeitig eine noch bessere Anpassung an die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Pflegebedürftigen zu erzielen, haben wir weitere Modelle von ReTurn entwickelt. Auch unser ReTurn7500 wurde weiterentwickelt. Der grundlegende Gedanke hinter ReTurn ist jedoch immer der gleiche – die beim Pflegebedürftigen vorhandenen Kräfte richtig zu nutzen und zu stärken. Sämtliche Modelle von ReTurn haben daher einige wichtige Dinge gemeinsam: Sie tragen zur Aktivierung des Pflegebedürftigen bei und regen den Pflegebedürftigen zu physiologischen Bewegungsmustern an. Sie bieten dem Pflegebedürftigen die Möglichkeit, sich regelmäßig in den Stand aufrichten zu können. Verbesserung der Lebensqualität kann manchmal so etwas Einfaches sein, wie zum Beispiel einfach die eigene Kraft und die eigenen Fähigkeiten nutzen dürfen!



ReTurn7500 eignet sich für die meisten Erwachsenen.



ReTurn7400 eignet sich für kleine Erwachsene und für Kinder.



ReTurn7600 wurde für große und schwergewichtige Pflegebedürftige bis 205 kg konzipiert.

Zusätzliche Polsterung für Unterschenkelstützen

Padding for leg support (Polster für Unterschenkelstützen) ist ein Zubehör, das schmerzempfindlichen Pflegebedürftigen die Verwendung der Unterschenkelstützen komfortabler macht.



Art.-Nr. 7215, **Padding for leg support**, für ReTurn7100¹⁾/7500/7400
Art.-Nr. 7216, **Padding for leg support**, für ReTurn7600

¹⁾ Nicht mehr im Programm

Tragetasche – praktisch für Transport und Aufbewahrung

Eine strapazierfähige und exklusiv für ReTurn entworfene Tragetasche erleichtert den Transport und die Aufbewahrung. Gleichzeitig schützt sie ReTurn vor Schmutz und Kratzern.



Art.-Nr. 0954, **Bag**, für ReTurn7500/7400

Einfach in der Handhabung und leicht zu manövrieren

ReTurn ist eine manuelle Aufsteh- und Umsetzhilfe – äußerst einfach und intuitiv in der Handhabung, selbsterklärend für Pflegebedürftige und Pflegekräfte. Dies ist natürlich einer der Gründe, warum ReTurn sich größter Beliebtheit erfreut.

Die einzigartige, patentierte* Konstruktion des ReTurn macht die Transferplattform unglaublich wendig und leicht manövrierbar – unabhängig vom Modell und vom Gewicht des Pflegebedürftigen. ReTurn fährt, wendet und dreht sich leicht und nahezu reibungslos auf allen Untergründen, auch bei beengten Platzverhältnissen.

Ganz einfach wird das Hilfsmittel perfekt neben ein Bett, einen Sessel, Rollstuhl oder Toilettenstuhl positioniert. Dabei ist für das Bewegen des ReTurn nur minimale Schubkraft erforderlich, auch bei großen und schwergewichtigen Pflegebedürftigen. Diese Eigenschaften machen ReTurn völlig einzigartig in seiner Produktart.


Das Design ist klar und pflegeleicht. Die Montage ist denkbar einfach, ebenso das Zerlegen für Transport und Aufbewahrung.

Stabile und sichere Bodenplatte

Alle roten Modelle des ReTurn bestehen aus zwei Teilen: einer Bodenplatte und einer Aufrichtleiter. Genau wie beim allerersten Modell des ReTurn ist die stabile Bodenplatte mit der patentierten* Konstruktion die Grundlage für die einzigartige Funktionalität aller ReTurn-Modelle.

Der niedrige Schwerpunkt und die große Standfläche mit Laufrollen in allen Ecken eliminieren die Kippgefahr. Zwei große an der Außenseite der Bodenplatte neben der Aufrichtleiter platzierte Laufrollen mit Feststellbremse tragen den größten Teil des Gewichts des Pflegebedürftigen und verleihen ReTurn leichte Manövrierbarkeit und Richtungsstabilität. Dabei tragen die Drehgelenke an den vier Laufrollen in den Ecken der Bodenplatte zur Wendigkeit bei, auch dort, wo es eng zugeht.

Die niedrige Einstiegshöhe und das schmale hintere Profil der Bodenplatte ermöglichen sehr nahes Heranfahren des ReTurn an den Pflegebedürftigen – bis unter das Bett, den Sessel oder den Rollstuhl. Der Pflegebedürftige muss nur seine Füße leicht anheben und sie dann auf der Bodenplatte richtig platzieren. Die deutlichen Markierungen auf der Bodenplatte helfen dabei – so einfach und eindeutig. Auf der Bodenplatte befindet sich auch ein klares Hinweissymbol, wie die Pflegekraft während des Aufstehens oder Hinsetzens des Pflegebedürftigen de facto ein Gegengewicht bildet.

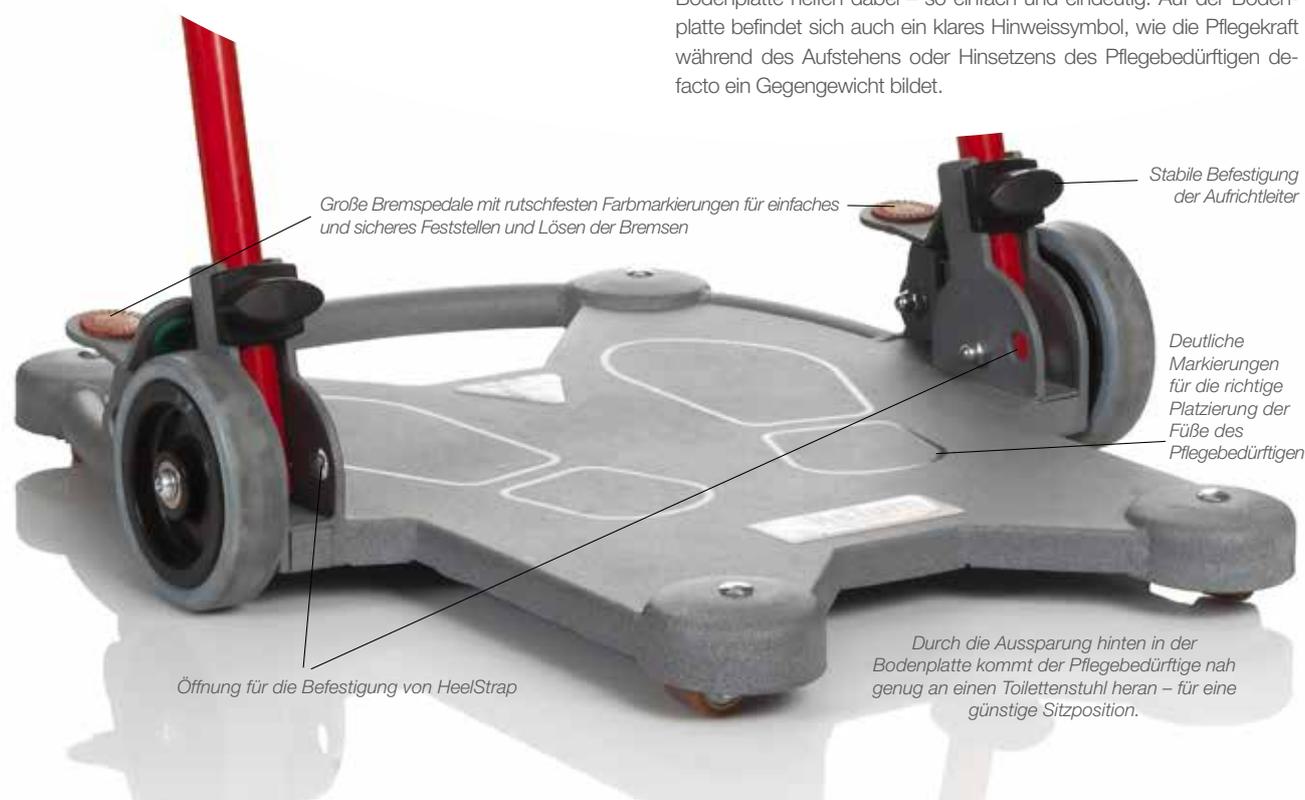

Das Design der Aufrichtleiter erlaubt physiologische Bewegungsmuster und Nähe

Die neuen, roten Modelle unterscheiden sich vom ursprünglichen ReTurn7100, indem sie keine Mittelsäule haben. Statt dessen sind sie mit einer Aufrichtleiter ausgerüstet, die unten ganz offen ist und oben unterschiedlichste Greifmöglichkeiten bietet, einschließlich eines physiologisch vorteilhaften, zentralen „Kraftgriffs“ an der mittleren vertikalen Stange.

Die Neigung der Aufrichtleiter der ReTurn-Modelle nach vorne weg vom Pflegebedürftigen gibt viel Raum und die nötige Nähe zum Hilfsmittel für das Aufrichten in den Stand, indem der Pflegebedürftige sich hoch hangelt und/oder hochzieht. Der Pflegebedürftige kann sich beim Stehtraining und beim Umsetzen an der Aufrichtleiter festhalten. Die Konstruktion ermöglicht auch der Pflegekraft mehr Bewegungsspielraum, mehr Nähe und noch bessere Unterstützung des Pflegebedürftigen von verschiedenen Seiten.



Verstellbare Unterschenkelstützen

Alle ReTurn-Modelle haben Unterschenkelstützen, deren Position sich in Höhe und Breite verstellen lässt. Die Verstellbarkeit der Winkel ermöglicht ganz einfach eine individuelle Anpassung der Unterschenkelstützen an die Größe und sonstigen Eigenschaften des Pflegebedürftigen. Diese Funktionalität erlaubt zudem mehreren Pflegebedürftigen die Nutzung des gleichen ReTurn.

Aktives Aufstehen mit ReTurn – Schritt für Schritt

ReTurn bietet einfache und sichere Unterstützung beim aktiven Aufstehen.

Die Neigung der Aufrichtleiter bei ReTurn7500/7400/7600 ist nach vorne weg vom Pflegebedürftigen. Diese Konstruktion bietet dem Pflegebedürftigen viel Raum und die Möglichkeit nah genug an das Hilfsmittel zu gelangen, um sich aus eigener Kraft und entsprechend physiologischer Bewegungsmuster in den Stand aufzurichten.



Eine Pflegekraft muss während des gesamten Aufstehvorgangs mit einem Fuß auf der Bodenplatte für Gegengewicht sorgen.



Der Pflegebedürftige hebt die Füße ein wenig an und stellt sie auf die Markierungen der Bodenplatte. Danach wird ReTurn mit der Bodenplatte unter das Bett, den Sessel, Stuhl oder Rollstuhl gerollt, bis die Unterschenkel an den Unterschenkelstützen anliegen. Wenn ReTurn die richtige Position erreicht hat, stellt die Pflegekraft die Laufrollen fest.

Die Neigung der Aufrichtleiter nach vorne weg vom Pflegebedürftigen schafft nicht nur die Voraussetzungen, sondern stimuliert auch ein physiologisches Bewegungsmuster. Der Pflegebedürftige beugt sich nach vorne und hält sich ordentlich an der Aufrichtleiter fest.

Mittels Armkraft sowie den Stützen an den Unterschenkeln hangelt und/oder zieht sich der Pflegebedürftige gleichzeitig nach oben und nach vorne. Dabei streckt er nach und nach die Beine und richtet sich auf.

Der Pflegebedürftige hat es aus eigener Kraft und mithilfe von ReTurn in den Stand geschafft. In dieser Position hat ReTurn für den Pflegebedürftigen die Funktion einer Stehstütze und eines Hilfsmittels für den Transfer über eine kürzere Strecke, beispielsweise zu einem Bett, Rollstuhl oder zur Toilette.

ReTurn7500™

SystemRoMedic™



Art.-Nr. 7500i, **ReTurn7500**, standardmäßig mit zusätzlicher Polsterung der Unterschenkelstützen



ReTurn7500 mit Aufrichtleiter in Standardhöhe eignet sich für die meisten Erwachsenen. ReTurn7500 ist jetzt auch in einer neuen Ausführung erhältlich, bei der die Aufrichtleiter (zum Patent** angemeldet) eine Öffnung zum schnellen und einfachen Einhaken des ReTurnBelt bietet. Beide Ausführungen des ReTurn7500 bewältigen bis zu 150 kg Gewicht.

ReTurn7500 und ReTurn7400 sind mit der gleichen stabilen Bodenplatte ausgerüstet, die Aufrichtleiter ist aber unterschiedlich hoch. Durch die gemeinsame Bodenplatte kann jederzeit je nach Bedarf einfach zwischen der niedrigen Aufrichtleiter und der Aufrichtleiter in Standardhöhe gewechselt werden: Dies bedeutet Kosteneffizienz.



ReTurn7400 mit niedriger Aufrichtleiter eignet sich für kleine Erwachsene und für Kinder. ReTurn7400 zeigt auch in bestimmten Pflegesituationen ausgezeichnete Funktionalität, beispielsweise in der Röntgenabteilung. ReTurn7400 bewältigt bis zu 150 kg Gewicht.



Art.-Nr. 7400, **ReTurn7400**

ReTurn7600™

SystemRoMedic™

ReTurn7600 wurde für Pflegebedürftige bis 205 kg konzipiert. Daher bietet dieses Modell mit seiner breiteren Bodenplatte dem größeren und schwergewichtigen Pflegebedürftigen mehr Platz. Die Form der Unterschenkelstützen am ReTurn7600 ist an diese Gruppe von Pflegebedürftigen angepasst. Die Aufrichtleiter ist auch höher und breiter als bei ReTurn7500 und ReTurn7400.



Art.-Nr. 7600, **ReTurn7600**





ReTurn kitzelt die Restkraft heraus

ReTurn ist ein sehr vielseitiges Hilfsmittel, das in den verschiedensten, üblichen Alltagssituationen Verwendung findet und für die meisten Pflegebedürftigen passt, ob Kinder oder Erwachsene. Aber – ReTurn ist auch ein Trainingsgerät. Bei Pflegebedürftigen mit Restkraft in Armen und Beinen regt ReTurn das physiologische Bewegungsmuster beim Aufstehen an und stärkt gleichzeitig die Muskeln und Funktionen des Körpers. Dies macht ReTurn zum idealen Hilfsmittel im Reha-Bereich. Durch den Einsatz von ReTurn in den eigenen vier Wänden können Pflegebedürftige meist länger zuhause wohnen bleiben, vor allem wenn ihnen nur ein Helfer beiseite steht.

Viele Einsatzbereiche

Sämtliche Modelle des ReTurn wurden so konzipiert, dass der Pflegebedürftige möglichst stark zur Aktivierung stimuliert wird. Daher muss der Pflegebedürftige über die notwendige Beinstabilität, eine uneingeschränkte Greiffunktion, gewisse Armkraft und ausreichenden Gleichgewichtssinn verfügen. Die Pflegekraft muss immer während des Aufstehens oder Hinsetzens des Pflegebedürftigen mit einem Fuß auf der Bodenplatte für Gegengewicht sorgen. Kombinieren Sie ReTurn mit ReTurnBelt für noch mehr Unterstützung und Sicherheit.



Prüfung der Beinstabilität

Für die Gefährdungsbeurteilung vor dem Aufrichten aus dem Sitzen in den Stand ist die Prüfung der Beinstabilität des Pflegebedürftigen ein sehr wichtiges Moment. ReTurn ist ein hervorragendes Hilfsmittel für eine sichere Kontrolle des aktuellen Status im Hinblick auf Beinstabilität und Gleichgewicht des Pflegebedürftigen.



Training der Beinstabilität

ReTurn kann als mobile Trainingsstation verwendet werden. Neben dem Bett oder Rollstuhl platziert, kann ReTurn jederzeit zur Verbesserung der Beinstabilität und der Ausdauer in Verbindung mit dem Aufrichten in den Stand, dem Stehen und dem Hinsetzen eingesetzt werden. Um Trainingsfortschritte zu erfassen, ist die Verwendung einer Stoppuhr oder einer Uhr mit Sekundenzeiger hilfreich.



Positionierung hinten im Rollstuhl oder Sessel

ReTurn kann auch dafür verwendet werden, einem in seinem Stuhl nach vorne verrutschten Pflegebedürftigen zu einer bequemeren Sitzposition weiter hinten zu verhelfen. Der Pflegebedürftige stellt die Füße auf die Markierungen der Bodenplatte. Die Pflegekraft rollt die Bodenplatte unter den Stuhl und stellt die Laufrollen fest. Der Pflegebedürftige hält sich an der Aufrichteleiter fest, beugt sich nach vorne und erhebt sich leicht vom Sitz, während die Pflegekraft für Gegengewicht sorgt. Danach schiebt die Pflegekraft ReTurn und den Pflegebedürftigen weiter zum Rollstuhl, in dem der Pflegebedürftige sich nun weiter hinten hinsetzen kann.



Umsetzen vom Bett in den Rollstuhl

Da ReTurn leicht manövrierbar ist, auch mit einem schweren Pflegebedürftigen, kann der Rollstuhl ein Stück weiter weg stehen, um beim Aufrichtvorgang nicht im Weg zu sein. Bevor das Umsetzen beginnt, müssen die Laufrollen des Rollstuhls festgestellt sein. Der Pflegebedürftige sitzt auf der Bettkante und stellt seine Füße auf die Markierungen der Bodenplatte. Während die Pflegekraft für Gegengewicht sorgt, hält sich der Pflegebedürftige an der Aufrichteleiter fest, beugt sich nach vorne und steht mit ReTurn als Stütze auf. Die Pflegekraft zieht ReTurn mit dem stehenden Pflegebedürftigen ein Stück zurück, um ReTurn dann von der Seite her in Richtung Rollstuhl zu lenken. ReTurn ist ganz nah bis unter den Rollstuhl zu positionieren, damit der Pflegebedürftige eine möglichst günstige Sitzposition bekommt. Bevor sich der Pflegebedürftige hinsetzt, sorgt die Pflegekraft für Gegengewicht.



Umsetzen vom Rollstuhl zur Toilette

Durch die Aussparung hinten in der Bodenplatte kommt das Hilfsmittel mit dem Pflegebedürftigen nah genug für eine günstige Sitzposition an den Toilettenstuhl heran.



PantLock hält die Hose am gewollten Platz

Beim Umsetzen zum Toilettenstuhl bietet ReTurn viel Raum für die Pflegekraft für das Handling mit der Hose des Pflegebedürftigen. PantLock ist ein einfaches Hilfsmittel mit Klettverschluss, das bei angezogener Hose oberhalb der Knie um die Hosenbeine befestigt wird. Dort verhindert PantLock das Abrutschen der Hose bis zu den Knöcheln. Der Hosenbund bleibt in Reichweite und lässt sich später leicht hochziehen.



Unterstützen beim Vorbeugen

Beim Anlegen eines Hebegeräts am Sitzenden im Stuhl oder Rollstuhl kann der Pflegebedürftigen ReTurn als Stütze beim Vorbeugen verwenden und somit aktiv mithelfen.

Art.-Nr. Produkt

8055	PantLock
8056	PantLock, 10 Stück /Verpackung

Viel Zubehör für noch mehr Sicherheit und erweiterte Einsatzmöglichkeiten

Durch die Kombination von ReTurn mit verschiedenem Zubehör kann der Pflegebedürftige zusätzlich unterstützt werden und erfährt dadurch noch mehr Sicherheit beim Aufstehen, Stehtraining und Umsetzen. Über die Wahl des Zubehörs entscheiden die aktuelle Situation sowie die Bedürfnisse und das Funktionsniveau des Pflegebedürftigen. Welches Zubehör zu welchen ReTurn-Modellen passt, geht aus den technischen Daten auf der nächsten Seite hervor. Weitere Informationen über die verschiedenen Modelle von ReTurn und sämtliches Zubehör finden Sie auf www.handicare.de.

ReTurnBelt kompensiert Muskelschwäche in den Beinen und bietet zusätzliche Unterstützung

Wenn mehr Unterstützung und Stabilität notwendig sind, ist unser patentierter*** ReTurnBelt eine ausgezeichnete Ergänzung für ReTurn, zum Beispiel wenn die Bein stabilität des Pflegebedürftigen schwankt oder unsicher ist. ReTurnBelt wird einfach an der Aufrichtleiter des ReTurn befestigt.

ReTurnBelt kann auch ohne ReTurn verwendet werden: als Haltegürtel, zur Unterstützung beim Aufstehen aus dem Sitzen und zur Stabilisierung des Pflegebedürftigen im Stehen, zum Beispiel beim Steh- und Gehtraining und beim Umsetzen. ReTurnBelt ist in verschiedenen Materialien und Größen erhältlich – für die ganz Kleinen bis zu den ganz Großen oder Schweren.



Art.-Nr.	Produkt	Größe	Gürtelumfang	Griffe	Art.-Nr.	Produkt	Größe	Gürtelumfang	Griffe
6031	ReTurnBelt	XXS	65 – 80 cm	4 Stück	6133	ReTurnBelt, wischdesinfizierbar	S	90 – 105 cm	2 Stück
6032	ReTurnBelt	XS	80 – 90 cm	4 Stück	6134	ReTurnBelt, wischdesinfizierbar	M	105 – 125 cm	2 Stück
6033	ReTurnBelt	S	90 – 105 cm	4 Stück	6135	ReTurnBelt, wischdesinfizierbar	L	125 – 145 cm	2 Stück
6034	ReTurnBelt	M	105 – 125 cm	4 Stück	6136	ReTurnBelt, wischdesinfizierbar	XL	135 – 155 cm	2 Stück
6035	ReTurnBelt	L	125 – 145 cm	4 Stück	6233	ReTurnBelt, Einwegvliesstoff, NonWoven	S	90 – 105 cm	2 Stück
6036	ReTurnBelt	XL	135 – 155 cm	4 Stück	6234	ReTurnBelt, Einwegvliesstoff, NonWoven	M	105 – 125 cm	2 Stück
6037	ReTurnBelt	XXL	155 – 175 cm	4 Stück	6235	ReTurnBelt, Einwegvliesstoff, NonWoven	L	125 – 145 cm	2 Stück
6038	ReTurnBelt	XXXL	175 – 195 cm	4 Stück	6236	ReTurnBelt, Einwegvliesstoff, NonWoven	XL	135 – 155 cm	2 Stück

*** Patent: SE-0401517-8

SupportStraps bieten als seitliche Stütze mehr Sicherheit

SupportStraps sind ein Zubehör für ReTurnBelt und funktionieren als Seitenstütze für ReTurn7500/7400/7600.

Je ein SupportStrap wird rechts bzw. links an der Aufrichtleiter befestigt. Wenn der Pflegebedürftige in den Stand hoch gekommen ist, wird das andere Ende des jeweiligen SupportStrap an einem geeigneten Griff am ReTurnBelt befestigt. SupportStraps können auch als Beinhaltegurte mit EasyBelt und FlexiBelt in Verbindung mit Steh- und Gehtraining kombiniert werden.



Art.-Nr. 6061,
SupportStraps, 1 Paar



HeelStrap stützt die Fersen des Pflegebedürftigen

HeelStrap ist eine Fersenstütze für den Einsatz mit ReTurn7500 und ReTurn7400. Das Fersenband stützt die Fersen des Pflegebedürftigen beim Aufstehen und Umsetzen. HeelStrap verhindert effektiv ein Zurückrutschen der Füße beim Aufstehen. Dies gibt dem Pflegebedürftigen mehr Sicherheit.

HeelStrap wird mittels der Karabinerhaken am Fersenband an einer besonderen Befestigungsvorrichtung an der Bodenplatte am ReTurn fixiert. HeelStrap lässt sich einfach auf die gewünschte Länge einstellen. Die rutschfeste Innenseite hält die Stütze effektiv am gewünschten Platz an den Fersen des Pflegebedürftigen.

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung
7250	HeelStrap	Für ReTurn7500 ab Seriennummer 373317697500500001 Für ReTurn7400 ab Seriennummer 373317697400500001



PRODUKTSPEZIFIKATION

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung	HMV-Nr.
7500	ReTurn7500	Transferplattform, komplett mit Aufrichtleiter in Standardhöhe, für Pflegebedürftige bis max. 150 kg	22.29.01.1024
7500i	ReTurn7500	Transferplattform, komplett mit Aufrichtleiter in Standardhöhe, mit Öffnung zum Einhängen des ReTurnBelt, für Pflegebedürftige bis max. 150 kg	22.29.01.1024
7400	ReTurn7400	Transferplattform, komplett mit niedriger Aufrichtleiter, für Pflegebedürftige bis max. 150 kg	
7600	ReTurn7600	Transferplattform, komplett mit breiterer Aufrichtleiter, für Pflegebedürftige bis max. 205 kg	
7501	Rising ladder, standard height	Aufrichtleiter, in Standardhöhe, für ReTurn7500 ab Seriennummer 373317697500500001 sowie für ReTurn7400 ab Seriennummer 373317697400500001	
7501i	Rising ladder, standard height	Aufrichtleiter, in Standardhöhe, mit Öffnung zum Einhängen des ReTurnBelt, für ReTurn7500 ab Seriennummer 373317697500500001 sowie für ReTurn7400 ab Seriennummer 373317697400500001	
7401	Rising ladder, low	Aufrichtleiter, niedrig, für ReTurn7400 ab Seriennummer 373317697400500001 sowie für ReTurn7500 ab Seriennummer 373317697500500001	



TECHNISCHE DATEN

Modell / Ausführung	ReTurn7500	ReTurn7500, mit Öffnung zum Einhängen des ReTurnBelt	ReTurn7400	ReTurn7600
Art.-Nr.	7500	7500i	7400	7600
Max. zulässige Belastung	150 kg	150 kg	150 kg	205 kg
Gesamthöhe	1150 mm	1150 mm	995 mm	1210 mm
Bodenplatte, Außenmaße (Länge x Breite)	685 mm x 570 mm	685 mm x 570 mm	685 mm x 570 mm	795 mm x 672 mm
Bodenplatte, Höhe	40 mm	40 mm	40 mm	45 mm
Austauschbare Aufrichtleiter	Ja, Standard 7501	Ja, Standard 7501i	Ja, Standard 7401	--
Alternative Aufrichtleiter	7501i, 7401	7501i, 7401	7501i, 7501i	--
Laufrollen, fest, groß	2 Stück, 125 mm Ø			
Laufrollen, Drehgelenk	4 Stück, 35 mm Ø	4 Stück, 35 mm Ø	4 Stück, 35 mm Ø	4 Stück, 75 mm Ø
Gesamtgewicht	16,5 kg	16,5 kg	16,5 kg	26 kg
Patent / Patentanmeldung	*) SE-0300528-7	*) SE-0300528-7 **) PCT/SE2012/050160	*) SE-0300528-7	*) SE-0300528-7
Designschutz	Design durch eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt: RCD-529631-1			
Zubehör				
ReTurnBelt	6031--6038, 6133--6136, 6233--6236	6031--6038, 6133--6136, 6233--6236	6031--6038, 6133--6136, 6233--6236	6031--6038, 6133--6136, 6233--6236
SupportStraps	6061	6061	6061	6061
HeelStrap	7250	7250	7250	--
Padding for leg support	7215	7215, Standard bei 7500i	7215	7216
Bag	0954	0954	0954	-



6133--6136



6233--6236



handicare

Weteringweg 5 – 9
2641 KM Pijnacker
Niederlande
Tel.: +49 571 9733980
Fax: +31 15 3697164
www.handicare.de
info.de@handicare.com

SystemRoMedic™ ist eine ganzheitliche Lösung für denkbar einfache Transfers Pflegebedürftiger. Das Konzept beinhaltet vier Produktbereiche, die für die meisten Transfersituationen eine nahezu perfekte Lösung bieten.

Transferieren: von einem Ort zum anderen. **Positionieren:** am gleichen Ort.

Unterstützen: bei der Mobilisierung. **Heben:** manuell und elektrisch.