

alber®

Einfach mobil.

scalamobil® scalacombi

Mobile Treppensteighilfen



VON KRANKENKASSEN
ZUGELASSEN

„Treppauf und
treppab – jetzt schaffen
wir das endlich!“



**EINFACH SICHER
TREPPEN STEIGEN.**

Endlich wieder barrierefrei – dank scalamobil und scalacombi

Einfach und sicher Treppen steigen – tausendfach bewährt

Jede einzelne Stufe wird zum Hindernis, wenn man aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht mehr selbständig Treppen steigen kann: zu Hause, beim Arzt, in öffentlichen Gebäuden oder zu Besuch bei Freunden und Verwandten. Mit den mobilen Treppensteigern von Alber – scalamobil und scalacombi – werden verbaute Wege barrierefrei.

Und so funktioniert´s...

Zwei elektrisch angetriebene Radpaare übersteigen kontinuierlich eine Treppenstufe nach der anderen – aufwärts oder abwärts. Dafür sorgt ein sanfter und zuverlässiger Steigmechanismus – von Alber patentiert. Treppab stoppen vier Sicherheitsbremsen scalamobil und scalacombi automatisch vor jeder Stufenkante. Die Begleitperson wählt die Steigrichtung und Geschwindigkeit aus. Während des Steigvorgangs muss sie den Treppensteiger nur in Balance halten.

Einen Film zum scalamobil und scalacombi finden Sie auch im Internet unter www.alber.de.




Hier geht's
zum Film

Die Produktvorteile auf einen Blick

- ▶ Schafft auch enge und gewendelte Treppen – daheim und unterwegs
- ▶ Funktioniert auf jedem Treppenbelag – egal, ob Holz, Stein, Metall oder Teppich
- ▶ Schont den Treppenbelag
- ▶ Ergobalance-Griffe für eine sichere Bedienung mit minimalem Kraftaufwand
- ▶ Bis zu 300 Stufen Reichweite mit einer Akku-Ladung
- ▶ Mit integrierter Sicherheitssensorik





„Endlich kommen wir mit dem Rollstuhl überall hin!“




scalamobil®

Treppen steigen im eigenen Rollstuhl

Das scalamobil passt an die meisten handelsüblichen Rollstühle. Der große Vorteil: Sie können zum Treppensteigen in Ihrem Rollstuhl sitzen bleiben.

1. Ihr Rollstuhl erhält eine kleine Halterung, in die das scalamobil eingehängt wird. Die Halterung schränkt z. B. den Faltmechanismus oder die Verstellmöglichkeiten des Rollstuhls nicht ein.

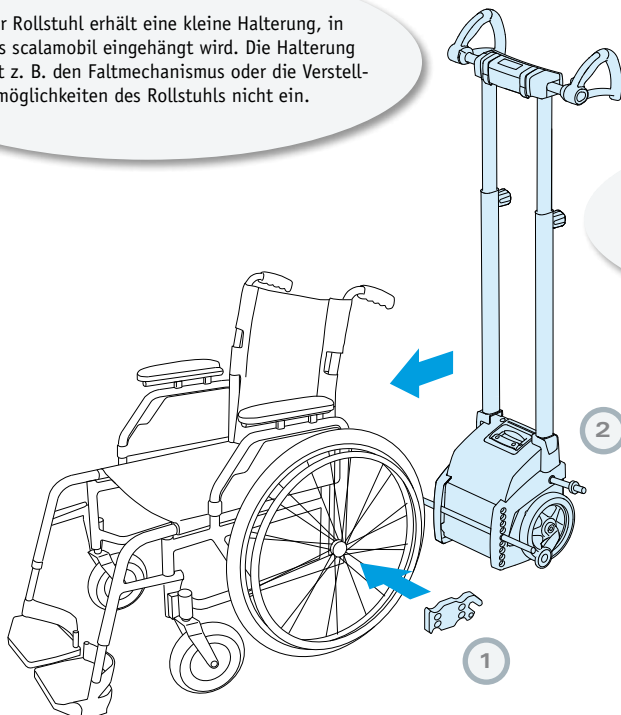

2. Das scalamobil wird mit wenigen Handgriffen in die Rollstuhlhalterung eingehängt und gesichert.



Universal-Adapter **scalaport** für den Transport unterschiedlicher Rollstühle ohne spezielle Halterung. Besonders für Fahrdienste und öffentliche Gebäude geeignet.




scalacombi

Treppen steigen mit integrierter Sitzeinheit

Sie benötigen Hilfe beim Treppensteigen, aber nicht unbedingt einen Rollstuhl? Der Treppensteiger scalacombi bringt Sie mühelos treppauf und treppab. Die kompakten Abmessungen und die lenkbaren Vorderräder machen das scalacombi äußerst wendig. So lässt es sich selbst in kleinen Räumen und auf engen Treppen bequem rangieren.

Wird das scalacombi gerade nicht benötigt, kann es platzsparend zusammengefaltet werden:

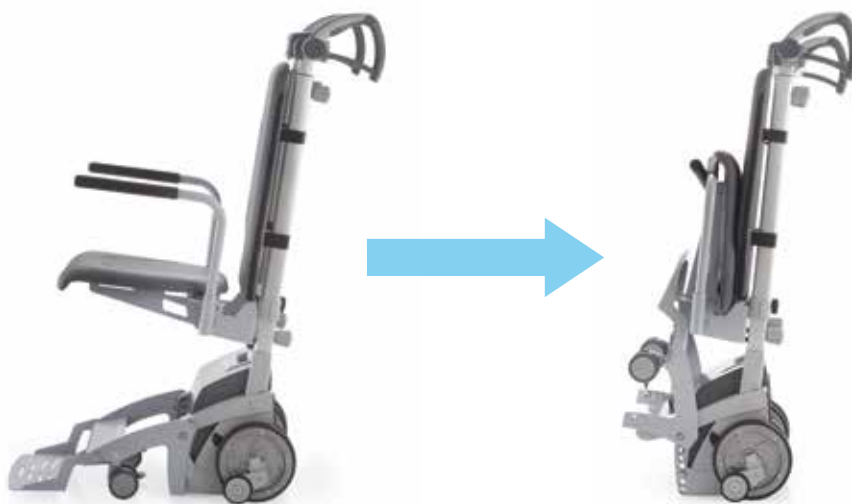

scalamobil und scalacombi sind auch als Sonderversionen für besonders hohe Treppenstufen (bis 25 cm) erhältlich. Für alle Versionen ist ein umfangreiches Zubehörprogramm (z. B. Gurtsysteme, Kopfstützen) verfügbar.



scalamobil und scalacombi – ihre besonderen Stärken

Intelligent und sicher

Höchste Sicherheit und Komfort beim Treppensteigen dank intelligenter Elektronik: scalamobil und scalacombi lassen sich auf die Gegebenheiten Ihrer Treppe zuhause programmieren und steigen dann besonders sanft und bequem.

Bedienungsfreundlich

Dank hervorragender Ergonomie sind alle Bedienelemente genau am richtigen Platz und der Treppensteiger liegt optimal in der Hand. Hier sieht und spürt man die mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung mobiler Treppensteiger bei Alber.

Vielseitig

scalamobil und scalacombi passen sich Ihnen an – nicht umgekehrt. Die Griffereinheit ist in Höhe und Breite einstellbar und passt sich somit jeder Bedienperson und Treppe optimal an.




Ergobalance-Griffe: rutschsicher und handlich geformt



Übersichtliches Display: alle Funktionen im Blick



Komfortpolster: zum Ablegen der Bedieneinheit auf dem Oberschenkel



„Auch unterwegs
können wir jetzt jede
Treppe bewältigen!“



Haben Sie Fragen oder möchten
Sie eine unverbindliche und
kostenlose Vorführung?
Rufen Sie uns an unter:

0800 1224567 (gebührenfrei)

Praktisch für unterwegs...

scalamobil und scalacombi sind überall einsetzbar. Im Handumdrehen lässt sich Ihr Treppensteiger in drei kompakte Einzelteile zerlegen und passt selbst in kleine Kofferräume.

Der mit einem Handgriff entnehmbare Akku-Pack ist 3 kg leicht und bringt mit einer Ladung Energie für bis zu 300 Stufen.



Gut, wenn man sich keine Sorgen machen muss. Der einzigartige 48-Stunden Mobilitätsservice von Alber sorgt dafür, dass Sie bei einem Funktionsausfall innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind.

Sicherheit fährt immer mit.

Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Aus diesem Grund werden unsere Produkte laufend von unterschiedlichen Institutionen geprüft. Zum Beispiel vom TÜV – geprüfte Produktsicherheit nach den Richtlinien für Medizinprodukte. Made in Germany vom Marktführer für Zusatzantriebe.



scalamobil und scalacombi auf einen Blick. Die häufigsten Fragen und Antworten.

„Passt das scalamobil auch an meinen Rollstuhl?“

Ja, das scalamobil passt mittels einer Halterung, die einmalig an den bestehenden Rollstuhl montiert wird, an beinahe alle Modelle.

„Funktionieren scalamobil und scalacombi auch auf Wendeltreppen?“

Ja, und sogar auf unterschiedlichen Materialien wie Teppich, Holz, Stein oder Metall.

„Kann es zu Beschädigungen meiner Treppe kommen?“

Nein, durch den einzigartigen Steigmechanismus und aufgrund der abriebfesten Räder werden die Treppenkannten optimal geschont.

„Wie werden scalamobil und scalacombi angetrieben?“

Der geräuscharme Elektromotor funktioniert mit einem leistungsstarken Akku, der mit Hilfe eines Ladegerätes jederzeit einsatzbereit ist.

„Wie weit komme ich mit einer Batterieladung?“

In der Regel reicht eine Akku-Ladung (bei ca. 70 kg Personengewicht) für bis zu 300 Stufen, das entspricht ca. 20 Stockwerken.

„Benötigt man für das Bedienen viel Kraft?“

Der Elektromotor erledigt auf Knopfdruck die Steigarbeit. Das Führen des scalamobil bzw. scalacombi erfordert nur sehr wenig Kraft.

„Wie hoch und wie tief darf eine Treppe maximal sein?“

Die Treppe sollte mindestens 11 cm tief und nicht höher als 20 cm sein. (Optional bieten wir auch eine Steighöhenerweiterung für Stufenhöhen bis 25 cm an)

„Wie schwer darf eine Person sein, die das scalamobil oder scalacombi als Treppensteighilfe nutzt?“

Das maximale Personengewicht für den sicheren Transport beträgt 140 kg*.

„Können das scalamobil und scalacombi auch außer Haus eingesetzt werden?“

Grundsätzlich können die Treppensteiger auf allen Treppen eingesetzt werden, ob im Freien oder in öffentlichen Gebäuden. Sie sind einfach zu zerlegen, leicht zu transportieren und passen in jeden Kofferraum.

„Wie viel wiegen scalamobil bzw. scalacombi?“

Antriebseinheit scalamobil: 17,4 kg
Antriebseinheit scalacombi (inkl. Sitzeinheit): 29,9 kg
Akku-Pack: 2,7 kg
Griffeinheit: 4,9 kg

scalamobil und scalacombi sind von den Kostenträgern anerkannte Hilfsmittel und unter den Positionsnummern 18.65.01.1026 (scalamobil) und 18.65.01.1027 (scalacombi) im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet.

scalamobil und scalacombi entsprechen der EG-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! Zertifiziert nach aktuellsten Standards: ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003 für Medizinprodukte.

Gewichtsangaben scalamobil/scalacombi

Max. Personengewicht:	140 kg*
Max. Gesamtgewicht: (inkl. scalamobil/scalacombi, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer)	180 kg*

* In Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl und der Eignung der Bedienungsperson sind Einschränkungen möglich.

„Haben Sie noch Fragen zu unseren Treppensteigern? Rufen Sie einfach an – wir sind gerne für Sie da!“



mit freundlicher Empfehlung:

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen
Tel. 0800 600 500
Fax 0800 600 900
www.strack.ch
info@strack.ch

strack
Patienten-
und Pflegebedarf