

Pflegebadesystem TR 900 Serie



Spezifikation

Länge	2325 mm
Breite	830 mm
Benutzergewicht max.	150 kg
Arbeitshöhe Wanne	600 - 1100 mm
Netzanschluss	230 V, 50 Hz

Das komfort Pflegebad

Das freundliche und funktionale Design der TR 900 Pflegebadewanne mit integriertem Panel macht die Bedienung einfach und komfortabel.

Die hochwertige Verarbeitung sowie die absolut glatte Oberfläche ermöglichen eine leichte Reinigung und Pflege der Badewanne. Die zusätzliche Breite der Badewanne an der Oberkörperseite bietet mehr Platz für Arme und Schultern und ist von Vorteil bei der Haarwäsche. Die doppel-schalige Badewanne minimiert Wärmeverlust. Die TR 900 Modelle sind standardmässig mit einem verstellbaren Wannenverkürzer ausgestattet.

Zur Verbesserung des Wohlbefindens der Patienten, kann die Pflegebadewanne mit einem Whirlpool ausgestattet werden. Der entspannende Whirlpool-Effekt regt die Durchblutung an und hilft beim Waschen des Patienten.

Die Duschbrause verfügt über einen ergonomischen Griff und einen weichen und einfach zu reinigenden Düsenkopf, der einen angenehm weichen Wasserstrahl erzeugt. Die Duschbrause ist seitlich an einer Halterung angebracht und kann vom Pflegepersonal leicht erreicht werden.

Das integrierte Desinfektions-System der C-Modelle ist an der linken Seite des Panels angeordnet. Das separate Sicherheitsventil schützt Patient und Pflegepersonal vor unsachgemässer Anwendung. Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden kombiniert mit unserer langjährigen Erfahrung hat die Entwicklung einfachster Bedienelemente für die Anwendung der TR 900 Pflegewanne ermöglicht. Der Einsatz der TR 900 Wannenserie vereinfacht den gesamten Badezyklus für das Pflegepersonal.

Die A-Modelle sind zusätzlich mit einem automatischen Füllstopp ausgerüstet. Diese Pflegewannen sind noch einfacher und effizienter für das Pflegepersonal zu bedienen. Keine Wartezeiten oder Beobachtung bis die Pflegewanne befüllt ist.

Das "Ein-Knopf" System erlaubt ein unbeaufsichtigtes und automatisches Befüllen. Durch kinderleichtes Drücken des Tasters mit dem Befüllsymbol starten Sie den Wasserzulauf. Durch einfaches Drehen können Sie die Wassertemperatur einstellen.

Der Thermomischer sorgt für konstante Zulauftemperatur. Bei Bedarf kann zusätzlich Wasser nachgefüllt werden oder auch vorzeitig die Befüllung gestoppt werden. Sobald das vordefinierte Wasserniveau erreicht ist, wird die Befüllung automatisch gestoppt.

Durch einfachen Fingerdruck auf das gewünschte Symbol können alle Funktionen angewählt werden. Das beleuchtete Display zeigt dem Pflegepersonal die jeweils aktive Funktion an.



In Kombination mit einem Liegelifter bietet das Pflegebadesystem ein Höchstmass an Effizienz, Komfort und Sicherheit. Der Patient verbleibt während dem Baden auf der komfortablen Liege.

TR 900 Serie Pflegewanne höhenverstellbar

strack
Patienten-
und Pflegebedarf

Merkmale

Das 3/4" (22mm) Thermostat-Mischventil mit Verbrüh-
schutz und doppelten Einlaufdüsen sorgt für eine schnelle
Befüllung der Pflegebadewanne.

Das digitale LED-Thermometer zeigt die Wasserzulauf-
temperatur der Dusche und Einlaufdüsen an. Pflegewannen mit
automatischem Füllstopp zeigen auch die aktuelle Wasser-
temperatur in der Wanne an.

Die Desinfektionslösung des integrierten Desinfektionssys-
tems mit gelbem Schlauch (siehe Bild) wird mit kaltem
Wasser vermischt, um eine konstante Desinfektion zu ge-
währleisten.



Bei Pflegewannen mit optionalem Whirlpoolsystem kann
sowohl die Düsenrichtung als auch die beizumischende
Luftmenge verändert werden.



Das seitlich angeordnete Desin-
fektionssystem kann nicht vom
Patienten erreicht werden



TR 900 mit automatischem
Füllstopp

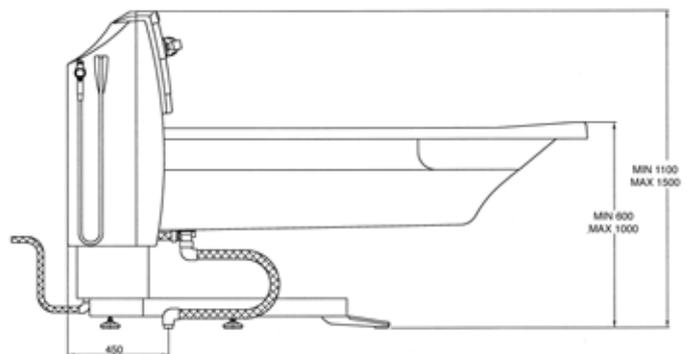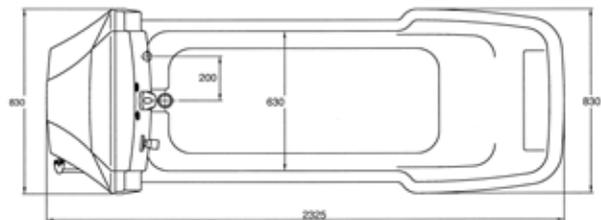

Panel mit automatischem Füllstopp.
Einfachste Bedienung!

Modelle:

TR 900	Standard
TR 900 C	Desinfektion
TR 900 CW	Desinfektion und Whirlpool

TR 900 A	Automatischer Füllstopp
TR 900 CA	Desinfektion, Füllstopp
TR 900 CWA	Desinfektion, Füllstopp und Whirlpool

Optionen:

Die Pflegewanne kann zum besseren Einbringen in zwei
Teilen angeliefert werden.

Zubehör:

- Transporträder, Rampe und Montagehilfe
- Kopfkissen

CE Registriertes Medizinprodukt Klasse I
MDD 93/42EEC

Irrtum vorbehalten. Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. /STR_201001_002_de

Strack AG
Ebnatstrasse 125, 8200 Schaffhausen

Gratis anrufen 0800 600 500
Gratis Fax 0800 600 900

www.strack.ch
info@strack.ch