

Mercury Advance SMARTcare®

A Step Change in Care Delivery

Intelligent
Pressure Care
Management



Mercury Advance SMARTcare® ist eine innovative Lösung zur Prävention und Behandlung von Dekubitus. Es bietet eine effektive Doppeltherapie auf einer einzigen Oberfläche durch Kombination von klinisch erprobten Hybrid-Oberflächen, welche bis jetzt nur separat erhältlich waren.



Klinische Anwendung /
Dekubitus Grad




Sehr hohes
Risiko

Der äussere dampfdurchlässige Multi-Stretch Dartex™ Überzug vereinigt Hochfrequenz geschweißte Nähte und eine schützende Reißverschlussabdeckung entsprechend den striktesten Infektionsrichtlinien

Eine einzigartige Niederdruck-Luftzone lässt die Fersen 'schweben' und reduziert so den Druck speziell an dieser anfälligen Stelle

3 Schaumstoff- und Luftzellen mit kleinem Profil um den oberen Rücken sowie die Schultern zu unterstützen
7 Schaumstoff- und Luftzellen mit großem Profil zur Rumpf-, Sakral-, Oberschenkel-, und Beinunterstützung

Reine Schaumstoff-Zone für den Kopf

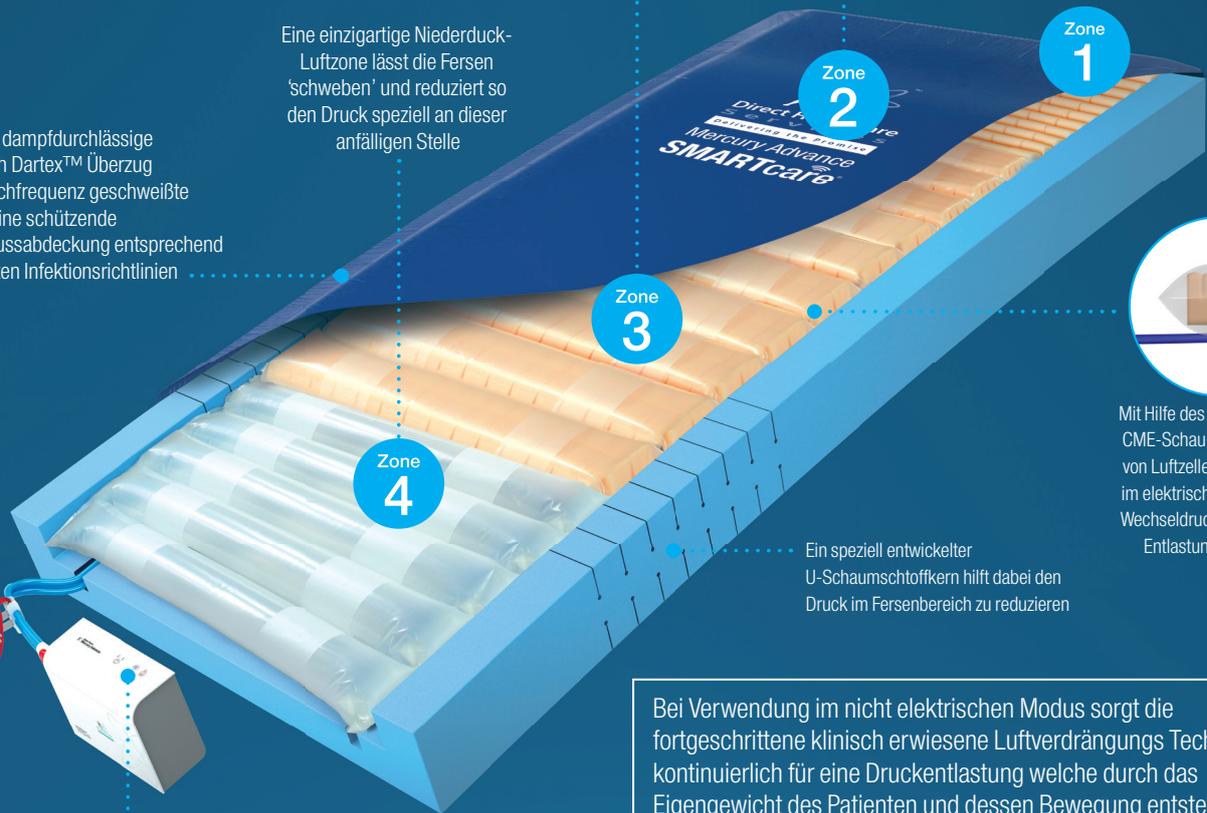

Mit Hilfe des hoch qualitativen CME-Schaumstoffes umhüllt von Luftzellen, ist es möglich im elektrischen Betrieb einen Wechseldruck und somit eine Entlastung zu schaffen

Ein speziell entwickelter U-Schaumstoffkern hilft dabei den Druck im Fersenbereich zu reduzieren

Einfache CPR
Entlüftungslasche


Abhängig von der klinischen Beurteilung kann die alternierende Funktion im LO oder HI Druckmodus verwendet werden

Bei Verwendung im nicht elektrischen Modus sorgt die fortgeschrittene klinisch erwiesene Luftverdrängungs Technologie kontinuierlich für eine Druckentlastung welche durch das Eigengewicht des Patienten und dessen Bewegung entsteht.
Bei Verwendung im elektrischen Modus, bietet Mercury Advance SMARTcare® eine Druckentlastung durch mehrere verbundene alternierende Schaum- und Luftzellen. Ohne Einfluss eines Schaumstoffes als Oberschicht, versichert die einzigartige 'Schaumstoff in Luftzellen' Technologie eine effektive Druckentlastung.

Ein deutlicher Fortschritt in der Pflegeversorgung

Mercury Advance SMARTcare® unterstützt klinisch erwiesenen die Prävention und die Behandlung von Dekubitus. Der Fortschritt in der Pflegeversorgung, wird durch die Zahl der notwendigen Maßnahmen sowie der Zeit welche benötigt wird Patienten auf die optimale Auflagefläche umzulagern erreicht. Mit **Mercury Advance SMARTcare®** kann je nach klinischer Situation einfach von statischen auf dynamischen Modus aufgerüstet, sowie zurück in den statischen Modus gewechselt werden. Dies geschieht ohne jegliche Zeitverzögerung, administrative Aufwände sowie ohne den Patienten in ein anderes Bett transferieren zu müssen.

Mercury Advance SMARTcare® kombiniert die innovativsten, klinisch erwiesenen Druckentlastungstechnologien in einem einzigen System.

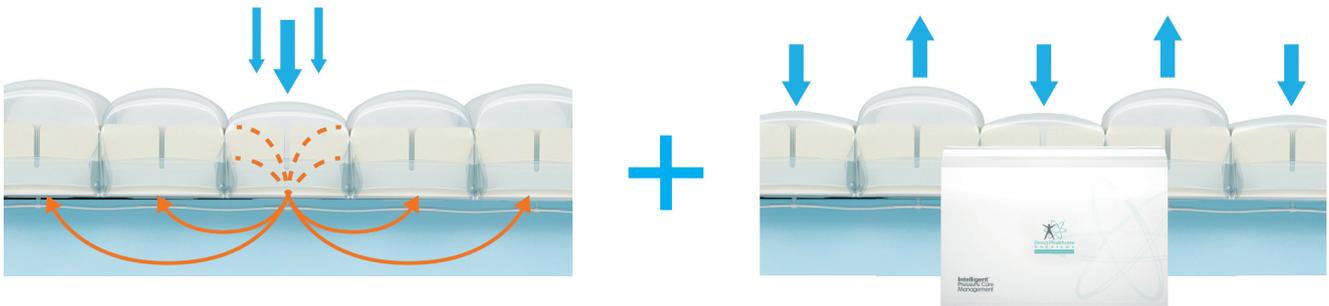

EFFEKTIVERE, KONTINUIERLICHE OPTIMIERTE DRUCKVERTEILUNG

- Hoch qualitative CME Schaum und Luftzellen Konstruktion
- Fortschrittliche Luftverdrängungstechnologie, welche kontinuierlich für eine optimale Druckverteilung sorgt und auf das Gewicht und die Bewegung des Patienten reagiert
- Die Fersenzone mit reinen Luftzellen sorgt für eine effektive Druckreduktion an dieser gefährdeten Stelle

EFFEKTIVE DRUCKREDUKTIONSTHERAPIE

- Für eine alternierende Funktion einfach die Motoreinheit anschließen
- Einzigartige 'Schaum-in-Luftzellen' Konstruktion sorgt für eine effektivere Therapie
- 10 Minuten, 2 in 1 alternierender Zyklus
- Wahl zwischen LO oder HI Einstellung

Alle Komponenten sind auswechselbar, was wiederum die Produktlebenszeit, sowie eine kosteneffektive Lösung bietet.

Infektionsverhinderung/Hypochlorit-Lösungen verträglich

Matratzenschoner/Motoreinheit können mit einer entsprechend verdünnten Hypochloritlösung und warmen Wasser gereinigt werden.

Benutzen Sie eine Natrium-Hypochlorit Lösung welche auf 1.000pp verdünnt wurde. Bei schweren Kontaminationen kann eine Lösung mit 10.000 ppm verwendet werden. Spülen Sie das Produkt nach der Reinigung gründlich ab.

Technische Daten

Produktcode	MAT1610001
Risikokategorie	Sehr hohes Risiko
Gewichtsbeschränkungen	Kein Mindestgewicht. Produkt ausgelegt für 254 kg
Garantie	2 Jahre
Größe	Standard Größe (Länge) 198cm x (Breite) 88cm x (Höhe) 15cm
Produktgewicht	13.3kg Matratze / 1.7kg Pumpe
Zykluszeit	10 Minuten
Arbeitsweise	Elektronisch
Stromspannung	220V – 240V / 50HZ
Leistungsbedarf	10W
Klasse	Ila

strack Patienten- und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60
Ebnatstrasse 125 www.strack.ch
8200 Schaffhausen info@strack.ch