

Einstellen eines ROHO-Kissens



Schritt 1

Drehventil öffnen und Kissen leicht überpumpen.
Drehventil schliessen.

Bei 4-Kammer/SELECT-Kissen mit ISOFLOR™:
Grüner Knopf vor dem Aufpumpen eindrücken
(Luft gelangt in alle 4 Kammern).



Schritt 2

PatientIn auf das Kissen setzen.
Sicherstellen, dass PatientIn möglichst weit
hinten im Stuhl sitzt, Arm-, Fuss- und Rücken-
Stützen richtig eingestellt sind und PatientIn in
gewohnter Ruhestellung sitzt.



Schritt 3

Hand unter das Sitzbein (Tuber Ischiadicum)
schieben. Drehventil öffnen und Luft entweichen
lassen, bis der Handrücken die Sitzfläche berührt.
Drehventil schliessen.

Verbleibender Abstand zwischen Sitzbein & Sitz-
fläche: ca. 1.5 – 2.5cm. Eine regelmässige Nach-
kontrolle mit der Hand ist empfohlen.



Schritt 4

(nur bei 4-Kammer/SELECT-Kissen mit ISOFLOR™):

PatientIn nach Bedarf positionieren.

Bei gewünschter Sitzposition roten Knopf
eindrücken. Die Luft wird so in den einzelnen
4 Kammern eingeschlossen, wodurch eine
stabile Position erreicht wird.

Nachkontrolle mit der Hand für den optimalen
Abstand zwischen Sitzbein und Sitzfläche
(gem. Schritt 3).

Allenfalls Nachpumpen mit eingedrücktem, grünen
Knopf. Wenn beendet, roten Knopf wieder eindrücken.

1.5 – 2.5cm



**Einsinken und IM Kissen sitzen
– aber: NICHT Durchsitzen**

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch