

# ROHO<sup>®</sup> Sitzkissen

Das optimale  
Sitzerlebnis



# QUADTRO SELECT®




## Mehrere Optionen

viele unterschiedliche Kissengrößen,  
verschiedene Zellenhöhen,  
ungeachtet des Gewichts eines Benutzers.





ROHO-Kissen wurden entwickelt, um den Benutzern ein optimales Sitzgefühl zu geben. Im Zentrum steht dabei die Notwendigkeit, eine bequeme und stabile Position zu schaffen, sowie die Haut und das Gewebe kurz- und langfristig zu schützen.

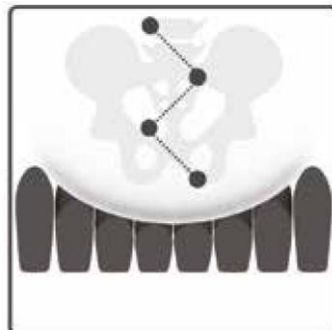

### 1) Dynamische Positionierung


Jeder hat eine optimale Sitzposition, aber nicht jedes Kissen kann dies anbieten. Bei der Positionierung geht es darum, die Becken- und Beinunterstützung genau an den richtigen Stellen anzusetzen, um die bestmögliche Haltung für die Sitzbedürfnisse eines Benutzers zu erzielen. Eine gute Haltung wirkt sich jedoch nicht nur auf die Art und Weise aus, wie eine Person sitzt, sondern auch darauf, wie effektiv sie verschiedene Aktivitäten unterstützt.

ROHO-Kissen zeichnen sich durch eine dynamische Positionierung aus, um das Becken zu halten und sicherzustellen, dass ein Benutzer in der optimalen Position sitzt. Um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, bietet ROHO vom Vier-Kammern-SELECT® Kissen bis zum Schaumstoff-Luftkombinations-Kissen, verschiedene Modelle an.




### 2) Stabilität im Sitzen

Der Schlüssel zu einer guten Stabilität liegt darin, das Becken in einer natürlichen Position zu halten. Wenn ein Kissen eine schlechte Stabilität hat, verbraucht ein Benutzer im Laufe eines Tages sehr viel Energie. Bei optimaler eingestellter Sitzstabilität werden das Becken und die Oberschenkel in Position gehalten, um dem Benutzer maximale Unterstützung zu bieten. Viele ROHO-Kissen bieten diese Sitzstabilität.

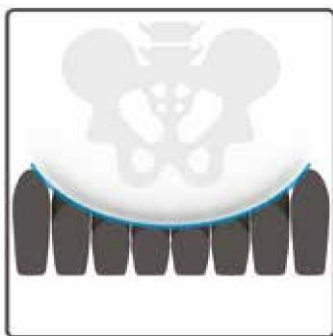

### 3) Haut- und Gewebeschutz

Das tägliche Sitzen auf einem Stuhl übt einen enormen Druck auf den Körper aus, insbesondere auf das Becken und die Sitzhöcker. Eine gleichmäßige Verteilung des Drucks im gesamten Sitzbereich ist wichtig, um die Deformation der Haut und des Gewebes zu minimieren und letztendlich den Abbau von Haut und Gewebe zu verhindern. ROHO-Kissen bieten proaktiven Schutz und unterstützen die Wundheilung.

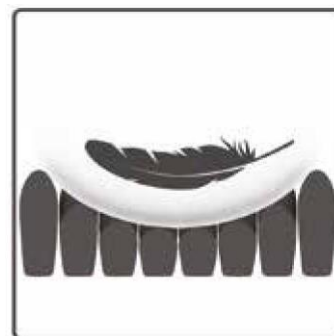

### 4) Komfort

Komfort bedeutet für verschiedene Menschen verschiedene Dinge. Für die einen bedeutet es, ohne Angst vor Haut- und Gewebeschäden zu sitzen, für andere bedeutet es Dinge zu tun ohne Angst zu haben umzufallen und für nochmals andere bedeutet Komfort, bequem zu sitzen. Die Luftzellen im Kissen formen sich dem Körper eines Benutzers an und verteilen Gewicht und Druck gleichmäßig über den gesamten sitzenden Kontaktbereich, egal wie lange jemand sitzt.

# Die Grundlagen des ROHO-Kissens



## ROHO Kissen

### LASSEN SIE EINSINKEN

Immer, wenn zwei Dinge zusammenkommen, drücken sich ihre Kräfte gegeneinander. Hier ist es die Kraft des Körpers gegen die Kraft des Kissens. Ein ROHO Kissen ermöglicht es dem Benutzer, ohne Widerstand in die Luftzellen einzutauchen.



## ROHO Kissen

### PASSEN ZU IHRER FORM


Wasser passt sich perfekt dem Körper an. Hiervon nachgeahmt, passen sich die flexiblen Zellen des ROHO-Kissens der Körperform an und sorgen gleichzeitig dafür, dass der Benutzer in der richtigen Position bleibt.



## ROHO Kissen

### BEWEGEN SICH MIT IHNEN

Unser Körper bewegt sich ständig, verändert sich im Laufe des Tages, der Woche, der Jahre. ROHO-Kissen sind so konzipiert, dass sie sich mit dem Körper bewegen und sich ständig an die Veränderungen anpassen, die im Laufe der Zeit auftreten.

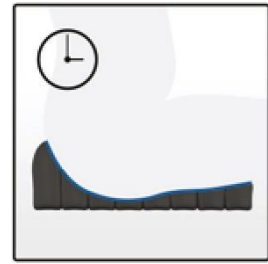

## ROHO Kissen

### ARBEITEN MIT IHNEN

Reibung trifft jedes Mal auf, wenn sich eine Person bewegt. In einem ROHO-Kissen muss sich der Benutzer nicht um Reibung und Scherung kümmern. Der Sitzende bewegt sich und das Kissen funktioniert, indem die Luft durch die Zellen transportiert wird und die Zellen sich der neuen Position anpassen.

## ROHO Sitzanleitung, wann welches Kissen

Die Sitzanleitung soll helfen, das optimale ROHO-Kissen für den Benutzer zu ermitteln. Sie zeigt auf, welche Vorteile jedes Kissen im Sortiment liefert.

### Benutzerbedürfnisse



Dynamisches Positionieren



Stabilität im Sitzen



Haut- und Gewebeschutz

### ROHO-Lösungen



HYBRID ELITE®  
2-Kammer-Kissen



CONTOUR SELECT®  
Kissen



QUADRO SELECT®  
Kissen



Stabilität im Sitzen



Haut- und Gewebeschutz



AIRLITE®  
Kissen



ENHANCER®  
Kissen



HYBRID ELITE®  
1-Kammer-Kissen



Haut- und Gewebeschutz



ROHO®  
1-Kammer-Kissen



Komfort

Alle ROHO-Kissen bieten den Benutzern ein komfortables Sitzgefühl, sowie physisches und psychisches Wohlbefinden.



**PROMEFA®**

Importeur: PROMEFA AG, Steinackerstrasse 7, 8180 Bülach

[www.promefa.ch](http://www.promefa.ch)



# ROHO Kissen für jeden Bedarf

## SELECT® - Kissen und deren Vorteile

- positioniert links/rechts, vorne/hinten
- stabilisiert und hält die Position des Beckens und der Oberschenkel
- formt sich dem Körper an und bewegt sich mit ihm
- bietet Haut- und Gewebeschutz
- einfach einzustellen



DYNAMISCHE POSITIONIERUNG  
SITZSTABILITÄT  
HAUT- UND GEWEBESCHUTZ



### QUADTRO SELECT®

ist das klinisch fortschrittlichste Kissen in der ROHO-Familie, das sich ständig an die Bedürfnisse und Aktivitäten des Benutzers anpasst. Dank dem 4-Kammer-System liefert es ein Höchstmass an Stabilität und Positionierung.

### CONTOUR SELECT®

verfügt über dieselben klinisch fortschrittlichen Funktionen und Technologien wie das QUADTRO SELECT®, hat jedoch verschiedene Zellenhöhen. Diese helfen, das Becken in der hinteren Position zu halten und die Oberschenkel zu führen.



### ISOFLO Memory Control®

steuert die vier einzelnen Kammern des Kissens durch Verriegeln oder Öffnen des Reglers. Sobald die Grundeinstellungen durchgeführt sind (Aufpumpen-Einsinken), können Sie jetzt mit dem ISOFLO-Regler positionieren und stabilisieren.

1. Stellen Sie sicher, dass der ISOFLO-Regler entsperrt ist → grüner Knopf drücken
2. Positionieren Sie den Benutzer in die ideale Haltung und halten Sie ihn so, bis die Luft ganz zirkuliert hat.
3. Drücken Sie den roten Knopf, um die Kammern zu schliessen.

## HYBRID ELITE® Kissen

Ist eine Kombination von den einzigartigen Eigenschaften der ROHO-Zellen und den Stützmerkmalen von Schaumstoff in einem Kissen. Ideal für Benutzer, die den vollen Schutz mit Luft für das Becken und die Unterstützung von Schaumstoff bei den Oberschenkeln wünschen.

- stabilisiert und hält die Position des Beckens und der Oberschenkel
- bietet Haut- und Gewebeschutz
- formt sich dem Becken an und bewegt sich mit ihm
- einfach einzustellen
- erleichtert den Transfer



### HYBRID ELITE® 2-Kammer-Kissen

- positioniert den Benutzer links und rechts

DYNAMISCHE POSITIONIERUNG

SITZSTABILITÄT

HAUT- UND GEWEBESCHUTZ

### HYBRID ELITE® 1-Kammer-Kissen

- kann optional mit Smart Check verwendet werden

DYNAMISCHE POSITIONIERUNG

SITZSTABILITÄT


HAUT- UND GEWEBESCHUTZ



### ENHANCER®

ist ein anatomisch vorgeformtes Kissen mit guter Beckenstabilisierung und mit einstellbarer Seitenstabilität für optimale Oberschenkelführung.


- stabilisiert und hält das Becken zentral
- bietet optimale Kontrolle der Oberschenkel
- bietet Haut- und Gewebeschutz
- formt sich dem Becken an und bewegt sich mit ihm
- einfach einzustellen

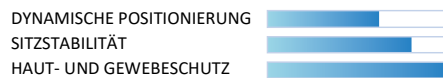

### 1-Kammer-Kissen SENSOR READY®

Das Kissen wird standardmässig mit der elektronischen Sicherheitsvorrichtung SMART CHECK geliefert.


- bietet Haut- und Gewebeschutz
- formt sich dem Körper an und bewegt sich mit ihm
- einfach einzustellen und kann mit SMART CHECK für Überwachung verwendet werden.

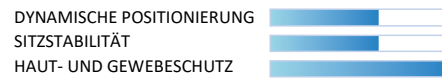

### AirLITE®

ist ein Schaumstoffkissen mit eingebauten Luftzellen für besseren Schutz im Sitzhöckerbereich.

- bietet Stabilität dank vorgeformter, anatomischer Form
- vorbeugender Haut- und Gewebeschutz
- ermöglicht unabhängigen Transfer

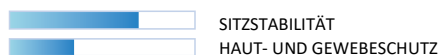

# ROHO<sup>®</sup> Das Optimum an Sitz erfahrung



**PROMEFA<sup>®</sup>**

Importeur: PROMEFA AG, Steinackerstrasse 7, 8180 Bülach

[www.promefa.ch](http://www.promefa.ch)

