

# Clean, Clean 24, Clean Höhenverstellbar


Dusch- und Toilettenstuhl

Ersatzteilliste




**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

78661A 16-09-13

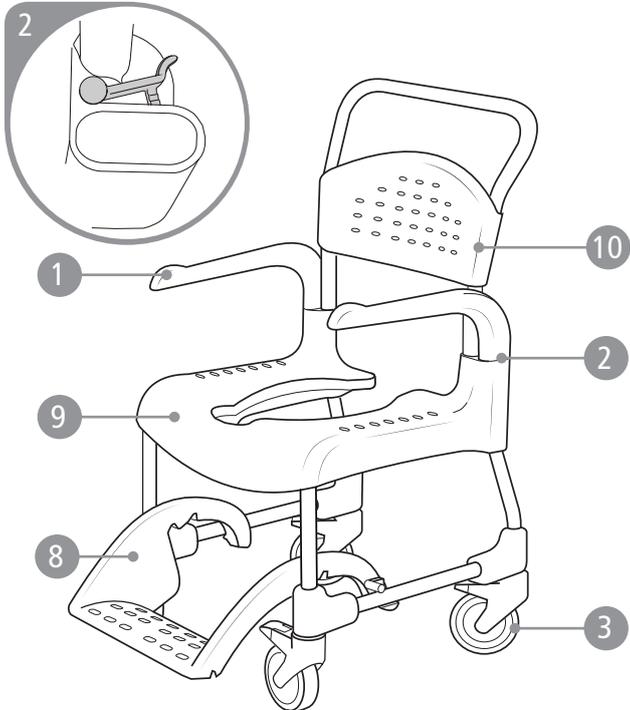

Clean

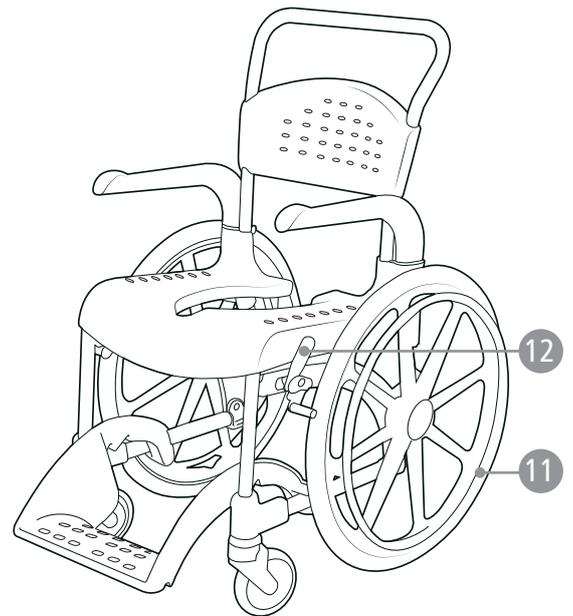


Clean 24"



Clean Höhenverstellbar

Zubehör

13

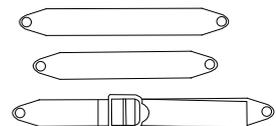

14

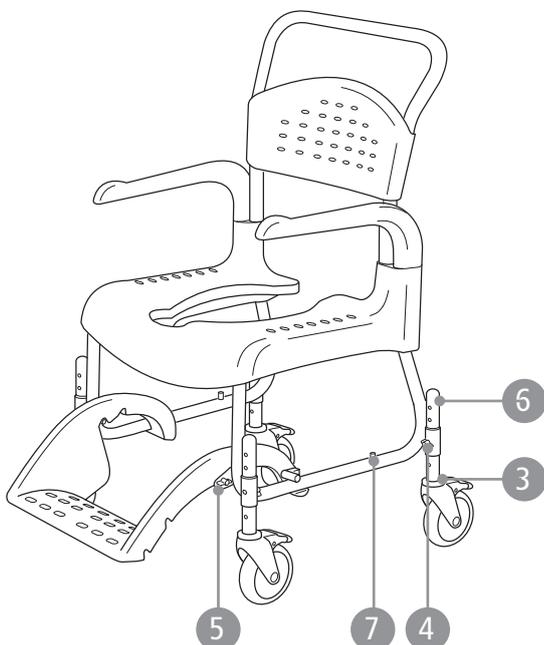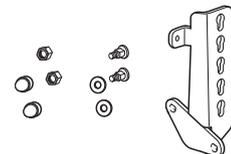

Ersatzteilen			Produkt			
Pos.	Benennung	Art. nr.	Clean	Clean 24	Clean Hvb.	Zubehör
1	Armlehne, Paar weiß	84006131	●	●	●	
	Armlehne, Paar, Lagune grün	84006132	●	●	●	
2	Armlehnennarretierung, Paar	84005036	●	●	●	
3	Lenkrad 125 mm Lagune grün vorn - paar, verschließbar	84006133	●	●		
	Lenkrad 125 mm Lagune grün hintern - paar, verschließbar	84006134	●			
	Lenkrad 125 mm Lagune grün vorn - paar, verschließbar + nicht verschließbar	84006135	●	●		
	Lenkrad 125 mm Lagune grün hintern - paar, verschließbar + nicht verschließbar	84003136	●			
	Lenkrad 125 mm weiß vorn - paar, verschließbar	84006137	●	●		
	Lenkrad 125 mm weiß hintern - paar, verschließbar	84006138	●			
	Lenkrad 125 mm weiß vorn - paar, verschließbar + nicht verschließbar	84006139	●	●		
	Lenkrad 125 mm weiß hintern - paar, verschließbar + nicht verschließbar	84006140	●			
	Lenkrad Clean höhenverstellbar weiß, abschließbar kompl	84006141			●	
4	Schraube/Mutter Sats Clean, 4+4	84001271			●	
5	Zapfen/ Mutter, Clean höhen-verstellbar, 2+2	84001272			●	
6	Rohrstück Clean höhenverstellbar, für Lenkräder, 4 St	84001273			●	
7	Kappe Fußstützenanschlag, Clean höhenverstellbar, 2 St.	84001274			●	
8	Fußstütze Clean weiß	84006142	●	●	●	
	Fußstütze Clean Lagune grün	84006143	●	●	●	
9	Sitz Clean, weiß	84006144	●	●	●	
	Sitz Clean, Lagune grün	84006145	●	●	●	
10	Rückenlehne Clean, weiß	84006146	●	●	●	
	Rückenlehne Clean, Lagune grün	84006147	●	●	●	
11	Antriebsrad Clean 24", Paar	84005039		●		
12	Bremse Clean rechts	84005040		●		
	Bremse Clean links	84005041		●		
13	Befestigungsriemen Protect Sitzkissen	84005056	○	○	○	●
14	Befestigung Beinstütze rechts, Clean höhenverstellbar	84001285			○	●
	Befestigung Beinstütze links, Clean höhenverstellbar	84001286			○	●
15	Ausbesserungsfarbe weiss	84005052	○	○	○	●

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60  
Ebnatstrasse 125 www.strack.ch  
8200 Schaffhausen info@strack.ch

**etac**<sup>®</sup>