



2019

## TOPRO PREMIUMGEHWAGEN

Taurus, Troja Walker, Troja Neuro

CH

  
Made in Norway

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf



# TAURUS

DER STARKE ARM

Der TOPRO Taurus bietet optimale Unterstützung für bewegungseingeschränkte Benutzer. Er kann bereits als Aufstehhilfe vom Bett oder Stuhl genutzt werden und wird mit wenigen Handgriffen auf die ergonomischen Notwendigkeiten seines Nutzers eingestellt.

Hierbei werden in erster Linie die Körpergröße, aber auch der Körperrumfang und die Armlagerung berücksichtigt. Die Handgriffe lassen sich optional auf die gewünschte Position einstellen.

Alle vier Räder sind schwenkbar und bieten somit umfassende Bewegungsfreiheit.

Die Hinterräder der Premiumversion sind arretierbar und alle Räder mit einer Feststellbremse versehen. Optional kann der Nutzer mit einer Handbremse seine persönliche Schiebegeschwindigkeit bestimmen. Rutschfeste Räder garantieren sicheres Manövrieren.

Der TOPRO Taurus ist eine vielseitige Gehhilfe, die durch ihre hydraulische oder elektrische Höhenverstellung für jeden Nutzer individuell einstellbar ist. Mit verstellbaren Unterarmauflagen, speziellen für den therapeutischen Einsatz optimierten Rädern und einer grossen Palette Zubehör – die optimale Hilfe beim Gehen.



Made in Norway





## DETAILS TOPRO TAURUS



Verstellbare Griffe



Kippschalter für die elektrische  
Höheneinstellung beim Taurus E



Stufenlos verstellbare Armauflagen



Arretierbare Räder



Mit stufenloser  
Höheneinstellung.  
Dank der Skala ist die richtige  
Position schnell erreicht.



Mit der Transportplatte können  
auch Personen mit starken  
Geheinschränkungen schonend  
transferiert werden.

## ZUBEHÖR TOPRO TAURUS



Stufenlose Breiteneinstellung der Unterarmauflagen für individuelles Anpassen.

### Fernbedienung für TOPRO Taurus E

Unverbindl. Preisempf. CHF 179.10  
bis Modell 2011 Artikel-Nr. 814805  
ab Modell 2011 Artikel-Nr. 814646



### Einstellbare Handgriffe für eine individuelle Winkeinstellung der Handgriffe

Unverbindl. Preisempf. CHF 453.15  
Artikel-Nr. 814001



### Halterung für Drainagebeutel

Unverbindl. Preisempf. CHF 230.85  
Artikel-Nr. 814034



### Infusionsstativ

Unverbindl. Preisempf. CHF 193.95  
Artikel-Nr. 814793



### Multifunktionsnetz

Zusatzablage im Handgriffbereich,  
einfach Kleinteile verstauen, bis 2 kg  
belastbar

Unverbindl. Preisempf. CHF 157.95  
Artikel-Nr. 814821



### Tablett

für den sicheren Transport von  
Getränken und Essen

Unverbindl. Preisempf. CHF 277.25  
Artikel-Nr. 814810



### Halterung für Sauerstoffflasche

Unverbindl. Preisempf. CHF 274.65  
Artikel-Nr. 814820



### Transportplatte

für den Personentransport  
zwischen zwei Orten

Unverbindl. Preisempf. CHF 298.50  
Artikel-Nr. 814645



Durch die Unterstützung des TOPRO Taurus kann sich der Nutzer mühelos vom Bett, Stuhl o. ä. erheben, mit oder ohne Hilfsperson.



# TROJA WALKER

## DIE STÜTZE IM ALLTAG

Der TOPRO Troja Walker mit Unterarmauflagen ist für all jene entwickelt worden, deren Handkraft für das Schieben eines Rollators nicht ausreicht oder die Unterstützung beim Aufrichten des Rumpfes benötigen.

Aufgrund seines geringen Gewichts und des Einhandfaltmechanismus ist der TOPRO Troja Walker mit Unterarmauflagen extrem leicht zu handhaben.

Seine Armauflagen sind in der Höhe verstellbar, haben die bekannte Memoryfunktion und können so optimal an jeden Nutzer angepasst werden. Er gibt Sicherheit und Unabhängigkeit.

Der TOPRO Troja Walker mit Unterarmauflagen bietet die Möglichkeit, die Unterarme während des Gehens auf dem Rollator abzulegen, für mehr Selbständigkeit im Alltag.



Unterarmauflagen nur für Troja M, S und X als Zubehör erhältlich.  
Unverbindl. Preisempf. CHF 570.00



Made in Norway



# TROJA NEURO

DER SPEZIALIST

Der TOPRO Troja Neuro wurde speziell für Personen mit neurologischen Erkrankungen wie Parkinson, Demenz oder Schlaganfall entwickelt. Er basiert auf dem bewährten TOPRO Troja Classic und ist mit einem reversiblen Bremssystem (RBS) ausgestattet, bei dem der Rollator dauerhaft gebremst wird, ohne dass der Nutzer an den Bremshebeln ziehen muss. So kann der Rollator nicht ungewollt wegrollen, sondern muss aktiv „gestartet“ werden, um zu gehen.

Zum Fahren müssen die Bremsen gelöst und gehalten werden. Dieses reversible Bremssystem erleichtert Personen mit neurologischen Erkrankungen bzw. altersbedingten Gangbildveränderungen die Koordination, erhöht ihre Sicherheit und gibt ihnen mehr Stabilität beim Sitzen auf dem Rollator sowie bei Alltagsverrichtungen wie dem Einkaufen.

Die Bedienung der Bremsen ist dabei intuitiv verständlich, sie wird in der Regel auch von vergesslichen Personen problemlos akzeptiert und trägt maßgeblich zur Sturzprävention bei.



Der TOPRO Troja Neuro ist mit ergonomischen Handgriffen – dem Ergo Grip – ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten des Haltens und Greifens im Stehen bieten.

Umgreifen entlastet so die Hände. Der Ergo Grip kombiniert die klassische Handgriffposition mit einem Greifknopf im vorderen Bereich des Griffs. Dadurch entsteht mehr Stabilität, das Aufstehen aus dem Sitz und Aufrichten des Oberkörpers werden erleichtert und verbessert. Auch das Stehen im Rollator ist komfortabler und den individuellen Bedürfnissen angepasst.



Als Zubehör kann der TOPRO Troja Neuro ausserdem mit unserem speziellen TOPRO Rollwiderstand-System (RWS) ausgestattet werden. Dieses wird ober- oder unterhalb des Kantenabweisers am Rad angebracht und ist über das Einstellrädchen stufenlos verstellbar. So kann der Widerstand des Rollators individuell an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden – immer so, dass der Nutzer den optimalen Widerstand erhält, um sicher und gleichmässig gehen zu können.



Rollwiderstand-System (RWS) unterhalb des Kantenabweisers montiert



Der Kantenabweiser und das reversible Bremssystem (RBS) erleichtern Ihren Alltag. Dauerhaft gebremst; zum Gehen ziehen/zum Halten loslassen.



Made in Norway





## ZUBEHÖR TOPRO TROJA NEURO UND WALKER



TC  
OL  
2G  
OD  
TN  
TW

**Schirm mit Multifunktionsarm**  
ergonomisch und körpernah  
einstellbar

Unverbindl. Preisempf. CHF 132.30  
schwarz Artikel-Nr. 814068  
rot Artikel-Nr. 814099



TC  
2G  
TN  
TW

**Einkaufstasche Troja 2G**

leicht abnehmbar, bis 10 kg belastbar  
Unverbindl. Preisempf. CHF 74.65  
schwarz Artikel-Nr. 814622  
schwarz/weiss Artikel-Nr. 814641  
tartan-rot Artikel-Nr. 814643  
rose sublime Artikel-Nr. 814672  
blue waves Artikel-Nr. 814677

**Rollwiderstand-System (RWS)**  
zur Anpassung des  
Rollwiderstands beim Gehen  
im Rollator

Unverbindl. Preisempf. CHF 118.00  
Artikel-Nr. 814038



OL  
2G  
OD  
TN

**Getränkehalter**  
damit der Durst jederzeit  
gelöscht werden kann  
(Flasche separat verfügbar)

Unverbindl. Preisempf. CHF 28.35  
Artikel-Nr. 814043



TC  
OL  
2G  
OD  
TN  
TW

**Führungsgriff**  
für Begleitperson

Unverbindl. Preisempf. CHF 71.65  
Artikel-Nr. 814014



TC  
OL  
2G  
OD  
TN  
TW

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

TC = für Troja Classic    OL = für Olympos    2G = für Troja 2G  
OD = für Odyssé        TN = für Troja Neuro    TW = Troja Walker

## TECHNISCHE DATEN TOPRO TROJA NEURO

Grösse	M (medium)	S (small)
<b>Empfohlene Körpergrösse</b>	150-200 cm	135-170 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>	165 kg	125 kg
<b>Max. Zuladung Einkaufsnetz</b>	10 kg/16 L	10 kg/16 L
<b>Griffhöhe</b>	780-1.000 mm	710-860 mm
<b>Grösste Länge</b>	650 mm	650 mm
<b>Grösste Breite</b>	600 mm	600 mm
<b>Abstand zwischen Stützpunkten</b>	470 mm	470 mm
<b>Sitzhöhe</b>	620 mm	540 mm
<b>Wendekreis</b>	840 mm	840 mm
<b>Durchmesser Vorder-/Hinterrad</b>	200 mm	200 mm
<b>Breite Vorder-/Hinterrad</b>	36 mm	36 mm
<b>Ergo Grip (Handgriffe)</b>	vielfältige Greifpositionen, Material: TPE schadstofffrei	
<b>Abstand Handgriff zu Bremsgriff für Bremsaktivierung</b>	65 mm	65 mm
<b>Höhe zusammengeklappt</b>	800 mm	740 mm
<b>Breite zusammengeklappt</b>	240 mm	240 mm
<b>Länge zusammengeklappt</b>	650 mm	650 mm
<b>Gewicht</b>	7,8 kg	7,4 kg
<b>TOPRO Artikelnr. Troja Neuro Standard</b>	814746	814747
<b>HMV-Nummer</b>	keine	keine
<b>UVP Troja Neuro Standard</b>	CHF 695.00	CHF 695.00

Modell S erhältlich in:  
silber

Modell M erhältlich in:  
dunkelgrau

7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

## TECHNISCHE DATEN TOPRO TAURUS

<b>Bauart</b>	H (Gasdruckfeder)	E (elektrisch)
<b>Empfohlene Körpergrösse</b>	140-210 cm	140-210 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>	150 kg	150 kg
Höhe der Armauflagepunkte (von Armauflagenmulde gemessen)	865-1.320 mm	865-1.360 mm
<b>Abstand zwischen den Stützpunkten</b> (innen gemessen)	330-470 mm	330-470 mm
<b>Länge der Armauflagen</b>	340 mm	340 mm
<b>Wendekreis</b>	910 mm	910 mm
<b>Durchmesser Räder</b>	125 mm	125 mm
<b>Breite Vorder-/Hinterrad</b>	31 mm	31 mm
<b>Breite vorne Innenmass</b>	480 mm	480 mm
<b>Breite vorne Aussenmass</b>	570 mm	570 mm
<b>Breite hinten Innenmass</b>	570 mm	570 mm
<b>Breite hinten Aussenmass</b>	660 mm	660 mm
<b>Handgriffe</b>	Rund, Ø 35mm	
<b>Gewicht</b>	18 kg	22 kg

Modell	Artikelnummer	HMV-Nummer	Unverbindliche Preisempfehlung
<b>TOPRO Taurus H Basic</b> 130 N Gasdruckfeder, ohne Einhandbremse	814785	10.46.02.1006	CHF 1'522.50
<b>TOPRO Taurus H Premium</b> 130 N Gasdruckfeder, einstellb. Handgriffe, Einhandbremse rechts	814787	10.46.02.1013	CHF 2'094.75
<b>TOPRO Taurus E Basic (elektrisch)</b> , ohne Einhandbremse	814790	10.46.02.1009	CHF 3'113.25
<b>TOPRO Taurus E Premium</b> (elektrisch), einstellb. Handgriffe, Einhandbremse rechts	814789	10.46.02.1011	CHF 3'673.95

2 Jahre Garantie, ausgenommen Verschleissteile und Montage

## TECHNISCHE DATEN TOPRO TROJA WALKER

<b>Grösse</b>	M (medium)	S (small)	X (extra small)
<b>Empfohlene Körpergrösse</b>	150-185 cm	130-170 cm	130-160 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>	135 kg	125 kg	80 kg
<b>Max. Zuladung Einkaufsnetz</b>	5 kg/20 L	5 kg/20 L	5 kg/11 L
<b>Höhe der Armauflagepunkte</b> (von Armauflagenmulde gemessen)	980-1.170 mm	840-1.000 mm	840-960 mm
<b>Grösste Länge</b>	650 mm	650 mm	650 mm
<b>Grösste Breite</b>	630 mm	630 mm	530 mm
<b>Sitzhöhe</b>	620 mm	540 mm	500 mm
<b>Wendekreis</b>	840 mm	840 mm	790 mm
<b>Durchmesser Vorder-/Hinterrad</b>	200 mm	200 mm	200 mm
<b>Breite Vorder-/Hinterrad</b>	36 mm	36 mm	36 mm
<b>Handgriffe</b>	Rund, Ø 35mm	Rund, Ø 35mm	Rund, Ø 35mm
<b>Abstand Handgriff zu Bremsgriff</b> <b>für Bremsaktivierung</b>	65 mm	65 mm	65 mm
<b>Höhe zusammengeklappt</b>	1.020 mm	880 mm	880 mm
<b>Breite zusammengeklappt</b>	330 mm	330 mm	330 mm
<b>Länge zusammengeklappt</b>	650 mm	650 mm	650 mm
<b>Gewicht</b>	10,1 kg	9,8 kg	9,3 kg
<b>TOPRO Artikelnummer besteht aus</b>	814750-000100 und 814829	814770-000200 und 814845	814740 und 815274
<b>HMV-Nummer</b>	10.50.04.1166	10.50.04.1167	keine
<b>Unverbindliche Preisempfehlung</b>	CHF 965.00	CHF 965.00	CHF 965.00

Modell X, S erhältlich in:



silber

Modell M erhältlich in:



dunkelgrau



weinrot



silber

7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege



## Premiumprodukte aus Norwegen

### Hersteller:



TOPRO Industri AS  
Postboks 428  
2803 Gjøvik

### Firmensitz:

Rambekkveien 5  
2816 Gjøvik  
Norway

Tel. +47 61 13 46 00  
Fax +47 61 13 46 01  
E-Mail: [post@topro.no](mailto:post@topro.no)  
[www.topro.no](http://www.topro.no)

**Quality Assurance Standards**  
DIN-EN ISO 9001 – quality  
DIN-EN ISO 14001 – environment

Vertrieb durch



TOPRO GmbH  
Zweigniederlassung Stetten  
Im Stetterfeld 2  
5608 Stetten

Tel: +41 (0) 44 940 36 50  
Fax: +41 (0) 44 940 36 51  
E-Mail: [mail@topro.ch](mailto:mail@topro.ch)  
[www.topro.ch](http://www.topro.ch)



**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG  
Ebnetstrasse 125  
8200 Schaffhausen

052 630 31 60  
[www.strack.ch](http://www.strack.ch)  
[info@strack.ch](mailto:info@strack.ch)