

Alligator Rampen DF

Montage- und Gebrauchsanleitung



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter und behalten uns das Recht vor, ohne weitere Ankündigung die Spezifikationen und Funktionen der Produkte zu ändern.

Zweckbestimmung

Mobilex-Rampen sind mobile, transportable Rampensysteme zum Befahren mit dem Rollstuhl. Sie ermöglichen die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe (z.B. Treppenstufen). Die Mobilex-Rampen ermöglichen somit den Patienten, die aufgrund einer Mobilitäts-einschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein Gebäude zu verlassen bzw. aufzusuchen und tragen somit zur Befriedigung der Grundbedürfnisse bei. Sie können im Außen- und Innenbereich angewandt werden. Jede andere Verwendung ist untersagt.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sicherheitshinweise


- Verwenden Sie nur das Produkt in einwandfreiem technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt entdecken, kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch von allen Personen, die die Rampe benutzen aufmerksam gelesen wird. Schäden, die durch das Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden, haben keinen Garantieanspruch.
- Rampen dürfen nicht mit mehr als dem zulässigen Gewicht belastet werden. Siehe dazu die technischen Daten und das Etikett auf dem Produkt.
- Die Rampen können für folgende maximalen Höhenunterschiede verwendet werden:
 - DF-180: 35 cm*
 - DF-240: 50 cm*
 - DF-300: 60 cm*
- Verwenden Sie die Rampe ausschliesslich für den vorgesehenen Einsatzbereich.
- Nehmen Sie keine konstruktive Änderungen an der Rampe vor, es sei denn diese sind vom Hersteller schriftlich genehmigt worden
- Die Rampe darf nur auf einem stabilen Untergrund verwendet werden.
- Seien Sie beim Falten und Entfalten der Rampe besonders vorsichtig. Es besteht die Gefahr sich die Finger zwischen den Rampenteilen einzuquetschen oder abzutrennen!

3. Beschreibung

Produkt Beschreibung

Die Mobilex DF-Rampen sind faltbare Rampen aus Aluminium. Die Fahr-Oberfläche ist mit einem speziellen rutschhemmenden Material bedeckt. Um Handhabung und Transport zu erleichtern bestehen die Rampen aus zwei faltbaren Hälften die für den Einsatz einfach zusammengesteckt werden können. Die DF Rampen werden in 2 Kartons geliefert.

Montage- und Funktionshinweise

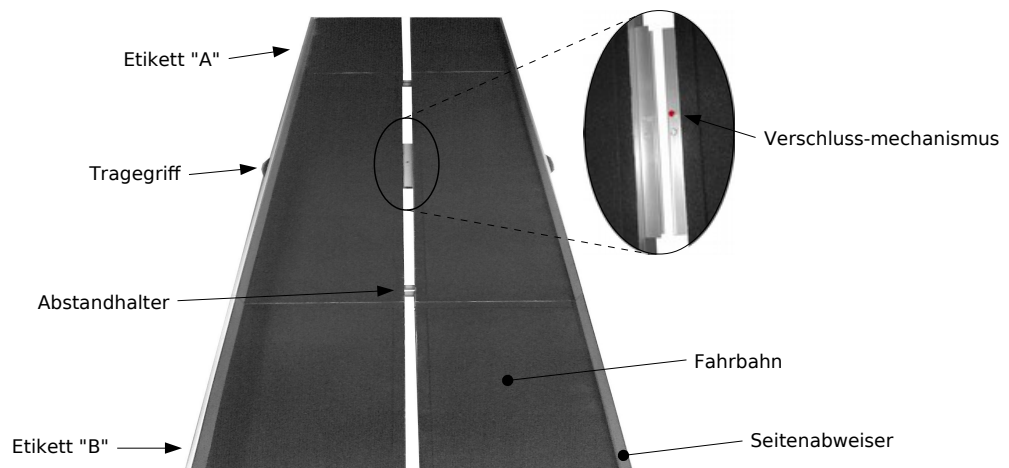

- Die Rampen sind mit Etiketten "A" und "B" ausgestattet. Die Etikette "A" markiert die obere Seite der Rampe (die Seite die am Hindernis aufliegt) und die Etikette "B" markiert die untere Seite der Rampe (die Seite die am Boden aufliegt)
- Die beiden Rampenteile müssen gerade und parallel und mit dem Abweiser nach aussen zusammengefügt und mittels Verschlussmechanismus (roter Federknopf) gekoppelt werden
- Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch dass die Rampen gerade am Boden aufliegen und dass die zwei Hälften gekoppelt sind.

Handhabung beim Transport

Die zwei Hälften der Mobilex DF Rampen können unabhängig voneinander zum Transport mittig gefaltet und an den Tragegriffen wie 2 Koffer transportiert werden. Achten Sie vor dem Transport immer darauf, dass beide durch den Sicherungshaken gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert sind.

Optionen / Zubehör

Für die Mobilex DF Rampen ist kein weiteres Zubehör erhältlich.

4. Technische Daten

Mobilex DF-Rampen	DF-180	DF-240	DF-300
Gesamtlänge (geöffnet)	180 cm	240 cm	300 cm
Gesamtbreite	79 cm	79 cm	79 cm
Fahrbahnbreite	75 cm	75 cm	75 cm
Höhe der Seitenabweiser	6 cm (innen)	6 cm (innen)	6 cm (innen)
Faltmaß (L x B x H)	91 x 36 x 19 cm	124 x 40 x 19 cm	154 x 40 x 19 cm
Max. Steigung / Max. überwindbare Höhe	12° / 36 cm	12° / 50 cm	12° / 60 cm
Gesamtgewicht	16 kg	22 kg	27,2 kg
Max. Belastbarkeit	300 kg	300 kg	300 kg

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich an einem der Seitenabweiser

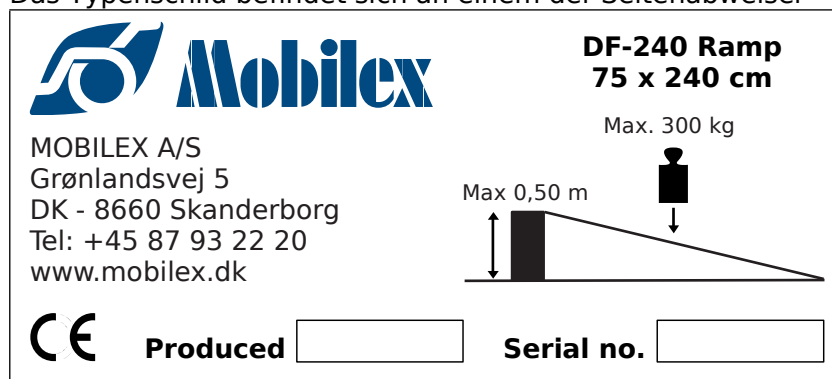


Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

6. Allgemeine Problembehebungen

Problembeschreibung	mögliche Ursache	was ist zu tun
Die Rampe liegt nicht stabil	Die Oberfläche auf der die Rampe liegt ist nicht eben	Kontrollieren Sie die Lage der Rampe: sie muss eben aufliegen.
Die Rampe liegt nicht stabil	Die Rampe wurde verkehrt herum aufgestellt (oben/unten)	Kontrollieren Sie dass die Etikette "A" oben und die Etikette "B" unten liegt und die Rampe mit dem Etikett "A" nach oben aufstellen.
Die Rampe lässt sich nicht öffnen	Der/die Sicherungshaken sind nicht geöffnet	Öffnen Sie die Sicherungshaken
Beide Rampenhälften liegen nicht parallel	Der Verschlussmechanismus (roter Federknopf) ist nicht eingerastet	Stellen Sie die Rampenhälften parallel zueinander auf und schieben Sie sie zusammen bis der Verschlussmechanismus einrastet

7. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

8. Garantie

Mobilex A/S bietet 2 Jahre Garantie auf Schäden die durch Produktionsfehler oder Materialfehler verursacht sind. Die Garantie erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Reparatur, Wartung oder Verwendung des Produkts. Teile mit normalem Verschleiß unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Produktänderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung erlischt die CE-Kennzeichnung und unsere Produkthaftung. Im Falle von Produktschäden, die durch diese Garantie abgedeckt sind, benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler oder Mobilex A/S direkt. Die Garantie deckt keine Transportkosten und keinen Schadenersatz während der Reparatur und keinen Personenschaden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verletzungen oder andere Schäden, die auf Nicht-Einhaltung von

der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.

9. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass das Produkt

Mobilex Alligator DF Rampe

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte**

Lars Nygaard
Geschäftsführer
Mobilex A/S



Skanderborg, am 30.06.2009

.....
Unterschrift