

Alligator SC Rampen Montage- und Gebrauchsanleitung



CE

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

Zweckbestimmung

Mobilex-Rampen sind mobile und transportable Rampensysteme zum Befahren mit dem Rollstuhl. Sie ermöglichen die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe (z.B. Treppenstufen). Die Mobilex Rampen ermöglichen somit den Patienten, die aufgrund einer Mobilitätseinschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein Gebäude zu verlassen bzw. aufzusuchen und tragen somit zur Befriedigung der Grundbedürfnisse des Benutzers bei. Sie können im Außen- und Innenbereich angewandt werden.

Bei weiteren Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie die Rampen nur für den vorgesehenen Einsatzbereich (siehe Zweckbestimmung)
- Beim Auseinander- oder Zusammenfallen der Rampen darauf achten keine Finger oder andere Körperteile einzuquetschen
- Die Rampen dürfen nur auf einer stabilen Bodenfläche verwendet werden

3. Beschreibung

Produkt Beschreibung

Die Mobilex SC Rampen bestehen aus Aluminium mit geriffelter rutschfester Oberfläche. Die SC Rampen sind in 4 Längen verfügbar.

Funktionsbeschreibung

Mobilex-Rampen finden bei Patienten Anwendung, die auf Rollstühle angewiesen sind. Sie sollen den Patienten die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe ermöglichen.

Handhabung beim Transport

Die Mobilex SC-Rampen können für einen bequemen Transport in Längsrichtung zusammengeklappt werden und sind mit einem bequemen Tragegriff ausgerüstet (siehe Bild rechts)



5. Technische Daten

SC Rampen	SC-045	SC-090	SC-120	SC-150	SC-180
Länge	46 cm	92 cm	122 cm	152 cm	182 cm
Breite	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Laufflächen Breite	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Höhe Radabweiser	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Max. Steigung / Höhe	12° / 10 cm	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm	12° / 36 cm
Gewicht	4,50 kg	9,00 kg	12,00 kg	15,00 kg	18,00 kg
Max. Belastung	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Faltmasse in cm (LxBxH)	45 x 40 x 8	92 x 40 x 8	122 x 40 x 8	152 x 40 x 8	182 x 40 x 8

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich außen am Radabweiser

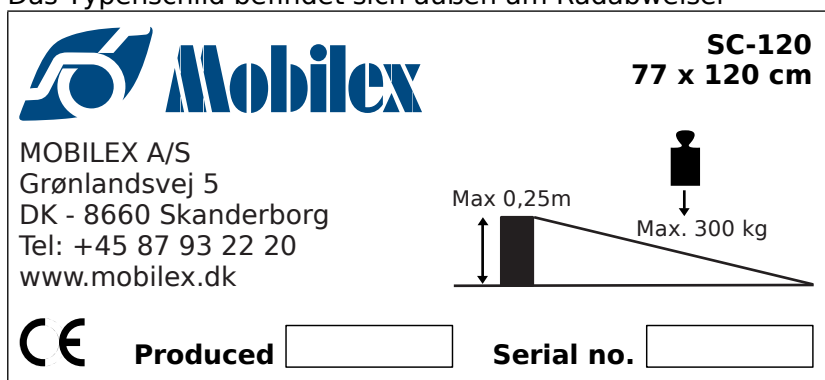


Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

6. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

7. Allgemeine Problembehebungen

Problembeschreibung	Mögliche Ursache	Problembehebung
Die Rampe klemmt beim Aus-einander- oder Zusammen-Falten	Die seitlichen Radabweiser könnten verbogen sein	Versuchen Sie die Radabweiser gerade zu biegen
Die Rampe lässt sich schwer Aus-einander- oder Zusammen-Falten	Schmutz an oder in den Scharnieren	Reinigen und ölen Sie die Scharniere

8. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

9. Garantie

Mobilex A/S bietet 2 Jahre Garantie auf Schäden die durch Produktionsfehler oder Materialfehler verursacht sind. Die Garantie erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Reparatur, Wartung oder Verwendung des Produkts. Teile mit normalem Verschleiß unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Produktänderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung erlischt die CE-Kennzeichnung und unsere Produkthaftung. Im Falle von Produktschäden, die durch diese Garantie abgedeckt sind, benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler oder Mobilex A/S direkt. Die Garantie deckt keine Transportkosten und keinen Schadenersatz während der Reparatur unden keinen Personenschaden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verletzungen oder andere Schäden, die auf Nicht-Einhaltung von der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.

10. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass das Produkt

Mobilex Alligator SC Rampen

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG**

Lars Nygaard
Geschäftsführer
Mobilex A/S

Skanderborg, am 19.06.2017



Unterschrift