

# Mobilex Alligator Koffer-Rampen SR

## Montage- und Gebrauchsanleitung



**CE**

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG  
Ebnatstrasse 125  
8200 Schaffhausen

052 630 31 60  
[www.strack.ch](http://www.strack.ch)  
[info@strack.ch](mailto:info@strack.ch)

## 1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

### Zweckbestimmung

Mobilex-Rampen sind mobile, transportable Rampensysteme zum Befahren mit dem Rollstuhl. Sie ermöglichen die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe (z.B. Treppenstufen). Die Mobilex Rampen ermöglichen somit den Patienten, die aufgrund einer Mobilitätseinschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein Gebäude zu verlassen bzw. aufzusuchen und tragen somit zur Befriedigung der Grundbedürfnisse bei. Sie können im Außen- und Innenbereich eingesetzt werden.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

### Mobilex A/S

Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex.dk

## 2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Einsatzbereich (*siehe Zweckbestimmung*)
- Wenn die Rampen auseinander gefaltet werden, muss der Benutzer darauf achten dass Finger oder andere Körperteile nicht eingequetscht werden
- Die Rampen dürfen nur auf ebenem und festen Boden verwendet werden
- Die Rampen dürfen maximal mit insgesamt 300 kg belastet werden
- Die Rampen dürfen maximal für folgende Höhenunterschiede verwendet werden:
  - Modell SR-180: 35 cm
  - Modell SR-240: 50 cm

## 3. Beschreibung

### Produkt Beschreibung / Lieferumfang

Die Mobilex SR Rampen sind faltbare Kofferrampen aus Aluminium mit einer rutschfesten Fahrbahnoberfläche aus Aluminiumsilikat.


Die Mobilex SR Rampen werden in 1 Karton mit folgendem Inhalt geliefert:

- ✓ 1 Mobilex SR Rampe
- ✓ dieses Handbuch

### Montagehinweise

Die SR Rampen benötigen keine weitere Montage, müssen aber vor Gebrauch auseinander- bzw. nach Gebrauch zusammen gefaltet werden (siehe nachfolgendes Bild)

### Funktionsbeschreibung / Faltechnik

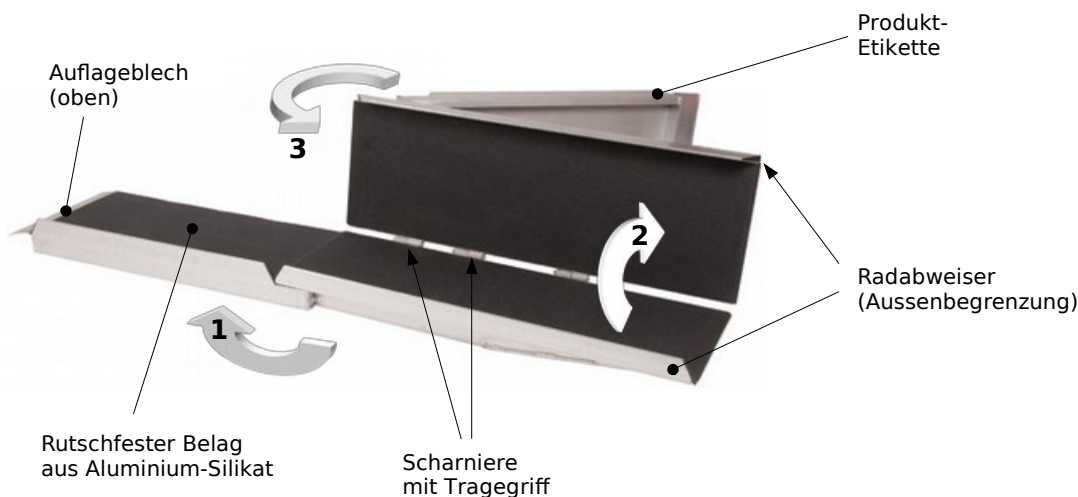

Öffnen Sie die SR Rampe in der oben aufgezeichneten Reihenfolge (Pfeile):

1. Klappen sie ein äusseres Rampenteil der Längsrichtung nach auf
2. öffnen Sie die beiden Rampenteile für ca. 90° wie ein Buch und
3. klappen Sie nun das zweite Aussenteil komplett auf und öffnen Sie beide Fahrbahnen so dass sie flach (180°) zu liegen kommen. Die Rampe ist nun komplett aufgeklappt.

Legen Sie die Rampe mit den beiden oberen Auflageblechen auf das Hindernis. Die Rampe ist nun verwendbar. Um die Rampe wieder zusammen zu falten befolgen Sie genannte Punkte in umgekehrter Reihenfolge.

Bitte beachten Sie:

- Die SR-Rampen sind mit einem Typenschild gekennzeichnet (siehe Abbildung oben).
- Die Auflagebleche kennzeichnen die obere Seite der Rampen, die auf dem Hindernis aufliegen und müssen stets auf einem stabilen und waagrechten Untergrund platziert werden
- Achten Sie darauf, daß die Rampen nur in komplett aufgeklapptem/geöffnetem Zustand verwendet werden dürfen
- Prüfen Sie die Rampen vor jedem Befahren auf eine sichere, stabile Lage

### Handhabung beim Transport

Für den Transport können die Rampen wie oben beschrieben zusammen-gefaltet werden.

### Optionen / Zubehör

Für die Mobilex SR Rampen sind keine weiteren Optionen oder Zubehör verfügbar.

## 4. Technische Daten:

| Alligator Rampe                  | SR-180           | SR-240           |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Länge                            | 180 cm           | 240 cm           |
| Breite                           | 80 cm            | 80 cm            |
| Lauffläche                       | 72 cm            | 72 cm            |
| Höhe der Rad-Abweiser            | Außenkante: 6 cm | Außenkante: 6 cm |
| Max. Steigung / Höhenunterschied | 12° / 36 cm      | 12° / 50 cm      |
| Gesamtgewicht                    | 14,1 kg          | 18,5 kg          |
| Max. Benutzergewicht (Traglast)  | 300 kg           | 300 kg           |

### Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich an der Aussenseite der Rampe

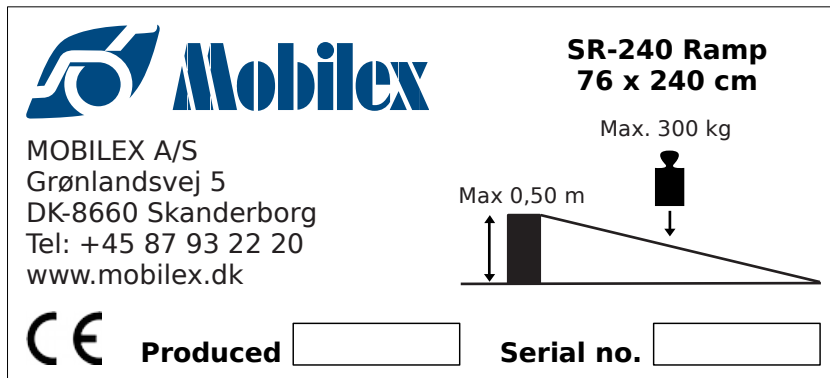


Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

## 5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel). Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

## 6. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

## 7. Garantie

Mobilex A/S bietet 2 Jahre Garantie auf Schäden die durch Produktionsfehler oder Materialfehler verursacht sind. Die Garantie erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Reparatur, Wartung oder Verwendung des Produkts. Teile mit normalem Verschleiß unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Produktänderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung erlischt die CE-Kennzeichnung und unsere Produkthaftung. Im Falle von Produktschäden, die durch diese Garantie abgedeckt sind, benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler oder Mobilex A/S direkt. Die Garantie deckt keine Transportkosten und keinen Schadenersatz während der Reparatur und keinen Personenschaden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verletzungen oder andere Schäden, die auf Nicht-Einhaltung von der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.

## 8. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass das Produkt

### **Mobilex Alligator SR Rampen**

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte**

Lars Nygaard,  
Geschäftsführer  
Mobilex A/S  
Skanderborg, am 10.09.2007



.....  
Unterschrift