

Terrassenrampen T80060, T80075, T80125 Montage- und Gebrauchsanleitung



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

Zweckbestimmung

Mobilex-Rampen sind mobile und transportable Rampensysteme zum Befahren mit dem Rollstuhl. Sie ermöglichen die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe (z.B. Treppenstufen). Die Mobilex Rampen ermöglichen somit den Patienten, die aufgrund einer Mobilitäts-einschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein Gebäude zu verlassen bzw. aufzusuchen und tragen somit zur Befriedigung der Grundbedürfnisse des Benutzers bei. Sie können im Außen- und Innenbereich angewandt werden.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie die Rampen nur für den vorgesehenen Einsatzbereich (siehe Zweckbestimmung)
- Beim Einstellen der Höhe darauf achten keine Finger oder andere Körperteile einzuquetschen
- Die Rampen dürfen nur auf einer stabilen Bodenfläche verwendet werden

3. Beschreibung

Montagehinweise

Die Mobilex Terrassenrampen werden fertig montiert geliefert. Es muss nur die Höheneinstellung reguliert werden um die Rampe an die Schwellenhöhe anzupassen

Produkt Beschreibung

Die Mobilex Terrassen Rampen bestehen aus Aluminium mit geriffelter rutsch-fester Oberfläche. Die Terrassen Rampen sind in 3 Größen verfügbar.

Funktionsbeschreibung

Die Terrassen Rampen bestehen aus einem festliegendem und höhenverstellbarem Rampenteil und sind z.B. zur Überwindung von Türschwellen von Terrassen o.ä. gedacht. Die Höheneinstellung ermöglicht ein Anpassen an die Höhe der Schwelle.

Handhabung beim Transport

Für einen einfacheren Transport kann bei den Mobilex Terrassen Rampen der Höheneinstell-Mechanismus auf die niedrigste Höhe eingestellt werden

Optionen / Zubehör

Für diesen Rampentyp gibt es kein weiteres Zubehör

4. Technische Daten:

Terrassen Rampen	T80060	T80075	T80125
Gesamt-Länge	60 cm	75 cm	125 cm
Gesamt-Breite	80 cm	80 cm	80 cm
Max. Steigung / Höhenunterschied	9 cm	13 cm	28 cm
Gesamtgewicht	8,00 kg	12,00 kg	21,50 kg
Max. Benutzergewicht (Traglast)	225 kg	225 kg	225 kg
Höheneinstellung	5 - 9 cm	8 - 13 cm	11 - 28 cm

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich unter der Rampe

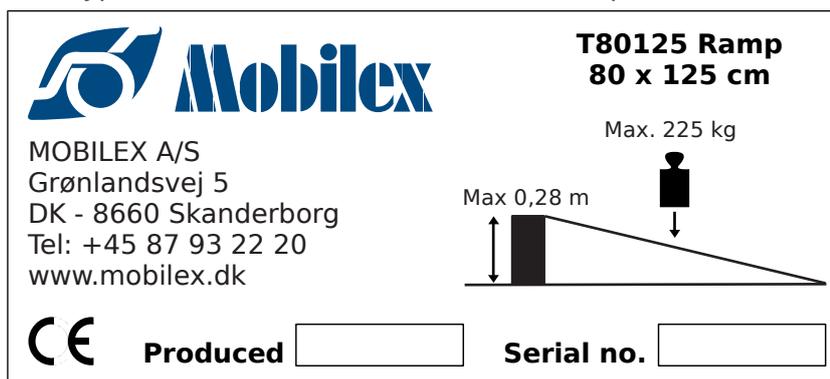


Abbildung des Typenschildes (*nicht originales Beispiel*)

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

6. Allgemeine Problembehebungen

Problembeschreibung	Mögliche Ursache	Problembehebung
Die Rampe liegt nicht eben auf	Die Höheneinstellung an beiden Seiten könnte unterschiedlich sein	Stellen Sie die Höheneinstellung beider Seiten auf dieselbe Höhe ein
Die Höheneinstellung lässt sich nur schwer verstellen	Schmutz an oder in den Scharnieren	Reinigen und ölen Sie die Scharniere

7. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

8. Garantie

Mobilex A/S bietet 2 Jahre Garantie auf Schäden die durch Produktionsfehler oder Materialfehler verursacht sind. Die Garantie erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Reparatur, Wartung oder Verwendung des Produkts. Teile mit normalem Verschleiß unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei Produktänderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung erlischt die CE-Kennzeichnung und unsere Produkthaftung. Im Falle von Produktschäden, die durch diese Garantie abgedeckt sind, benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler oder Mobilex A/S direkt. Die Garantie deckt keine Transportkosten und keinen Schadenersatz während der Reparatur und keinen Personenschaden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verletzungen oder andere Schäden, die auf Nicht-Einhaltung von der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.

9. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass das Produkt

Terrassenrampen T80060, T80075 und T80125

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte**

Lars Nygaard
Geschäftsführer
Mobilex A/S



Skanderborg, am 01.12.2009

.....
Unterschrift