


TAiMA **M** GTTAiMA **S** GT TAiMA **M** ECOstrack Patienten-
und Pflegebedarf

DIETZ Rehab

Produktbezeichnung	Produktname	Artikelnummer	Stand
Leichtgewicht - Rollator	TAiMA M-GT / S-GT / M-ECO	200160 / 200153 / 200061	V1.2.0 02/2020

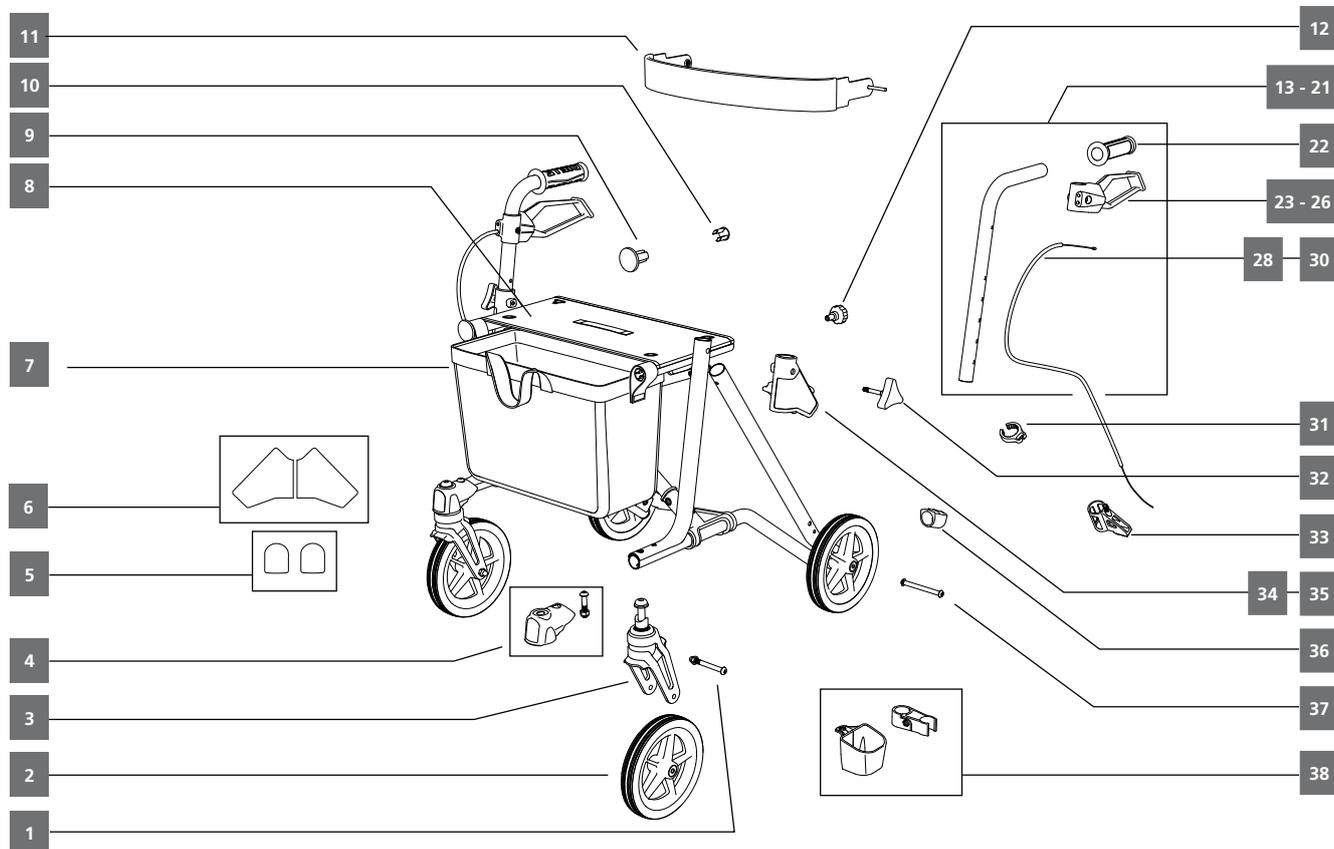

Seite 1	200160	200153	200061			
Objekt	Art. Nr.	M-GT	S-GT	M-ECO	Beschreibung	Liefermenge
1	500218	•	•	•	Achse Schwenkrad mit Stop-Mutter	Set
2	290125	•			Rad, vorne/hinten, 8", EVA, Bereif. schwarz, 5 Speichen, ab SN 372V008365	Stk.
	290125		•		Rad, vorne/hinten, 8", EVA, Bereif. schwarz, 5 Speichen, ab SN 373V002951	Stk.
	290121	•			Rad, vorne/hinten, 8", EVA, Bereif. schwarz, 5 Speichen, bis SN 372V008364	Stk.
	290121		•		Rad, vorne/hinten, 8", EVA, Bereif. schwarz, 5 Speichen, bis SN 373V002950	Stk.
	500516			•	Rad, vorne/hinten, 8", PU, Bereifung dunkelgrau, 8 Speichen	Stk.
3	290089	•	•	•	Radgabel komplett	Set
4	290090	•	•	•	Abdeckkappe Radaufhängung, links / rechts, inkl. Reflektor, Schraube, Mutter	Set
5	290099	•	•		Reflektoren, Abdeckkappe Radaufhängung, 2 Stk.	Set
6	290097	•	•		Reflektoren Verbindung Seitenrahmen	Paar
7	290010	•		•	Netztasche, Standard, M	Stk.
	290131		•		Netztasche, Standard, S	Stk.
o. Abb.	290291	•		•	Rollatortasche M, Nylon, schwarz, mit Reißverschluss	Stk.
o. Abb.	290292		•		Rollatortasche S, Nylon, schwarz, mit Reißverschluss	Stk.
8	290020	•		•	Sitzbespannung, schwarz, inkl. Schienen	Set
	290043		•		Sitzbespannung, schwarz, inkl. Schienen	Set
9	290021	•	•	•	Abdeckkappe, Sitzrohr vorne, 2 Stk.	Set
10	290022	•	•	•	Abdeckkappe, Sitzrohr hinten, 2 Stk.	Set
11	290118	•	•	•	Rückengurt, Standard, inkl. Befestigungsmaterial	Set

TAiMA **M** GTTAiMA **S** GTTAiMA **M** ECO DIETZ Rehab

Produktbezeichnung	Produktname	Artikelnummer	Stand
Leichtgewicht - Rollator	TAiMA M-GT / S-GT / M-ECO	200160 / 200153 / 200061	V1.2.0 02-2020

Seite 2	200160	200153	200061			
Objekt	Art. Nr.	M-GT	S-GT	M-ECO	Beschreibung	Liefermenge
o. Abb.	290126	•	•	•	Rückengurt, Komfort, inkl. Befestigungsmaterial	Set
12	290024	•	•	•	Entriegelungsknopf inkl. Mutter	Set
13	290071	•		•	Schiebegriff links, inkl. Handgriff, Bremshebel, Bremszug	Set
14	290134	•			Schiebegriff links, inkl. Handgriff, Bremshebel, Bremszug, ab SN 372W004921	Set
	290134			•	Schiebegriff links, inkl. Handgriff, Bremshebel, Bremszug, ab SN 386W002461	Set
15	290041		•		Schiebegriff links, inkl. Handgriff, Bremshebel, Bremszug	Set
16	290132		•		Schiebegriff links, inkl. Handgriff, Bremshebel, Bremszug, ab SN 373W000591	Set
17	290072	•		•	Schiebegriff rechts, inkl. Handgriff, Bremshebel, Bremszug	Set
18	290135	•			Schiebegriff rechts, inkl. Handgriff, Bremshebel, Bremszug, ab SN 372W004921	Set
	290135			•	Schiebegriff rechts, inkl. Handgriff, Bremshebel, Bremszug, ab SN 386W002461	Set
19	290070		•		Schiebegriff rechts, inkl. Handgriff, Bremshebel, Bremszug	Set
20	290133		•		Schiebegriff rechts, inkl. Handgriff, Bremshebel, Bremszug, ab SN 373W000591	Set
21	290029	•		•	Schiebegriffe verlängert (99 - 114 cm), inkl. Handgriffe, Bremshebel, Bremszüge	Paar
22	290016	•	•	•	Handgriff, links / rechts	Stk.
23	290017	•	•	•	Bremshebel Set links, ohne Bremszug	Set
24	290128	•			Bremshebel Set links, ohne Bremszug, ab SN 372W004921	Set
	290128		•		Bremshebel Set links, ohne Bremszug, ab SN 373W000591	Set
	290128			•	Bremshebel Set links, ohne Bremszug, ab SN 386W002461	Set
25	290014	•	•	•	Bremshebel Set rechts, ohne Bremszug	Set
26	290127	•	•	•	Bremshebel Set rechts, ohne Bremszug, ab SN 372W004921	Set
	290127		•		Bremshebel Set rechts, ohne Bremszug, ab SN 373W000591	Set
	290127			•	Bremshebel Set rechts, ohne Bremszug, ab SN 386W002461	Set
27	290015	•	•	•	Bremszug-Set, 2 Stk.	Set
28	290129	•			Bremszug-Set, 2 Stk., ab SN 372W004921	Set
	290129		•		Bremszug-Set, 2 Stk., ab SN 373W000591	Set
	290129			•	Bremszug-Set, 2 Stk., ab SN 386W002461	Set
	290136	•		•	Bremszug-Set für verlängerte Schiebegriffe, 2 Stk., für Modelle ab 2020	Set
29	290028	•	•	•	Einhandbremse links / rechts, Umrüstsatz (Bremszug)	Set
30	290130	•	•	•	Einhandbremse links / rechts, Umrüstsatz (2 Bremszüge), für Modelle ab 2020	Set
31	290032	•	•	•	Halteclip Bremszugführung, Kunststoff	Stk.
32	290019	•	•	•	Feststellschraube Schiebegriff, 2 Stk.	Set
33	290037	•	•	•	Bremsklotz Set inkl. Bolzen, Schrauben, Feder und Stellschraube	Set
34	290095	•	•	•	Verbindung Seitenrahmen oben, links, inkl. Reflektor, Schraube, Mutter	Set
35	290096	•	•	•	Verbindung Seitenrahmen oben, rechts, inkl. Reflektor, Schraube, Mutter	Set
36	290042	•	•	•	Auftrittskappe, 2 Stk.	Set
37	290025	•	•	•	Achse Hinterrad, inkl. Mutter	Set
38	290094	•	•	•	Stockhalter, Set aus Ober- & Unterteil	Set
o. Abb.	601227	•	•	•	Regenschirm, Rollatoren, rot, mit Halterung	Set
o. Abb.	601228	•	•	•	Regenschirm, Rollatoren, macchiato, mit Halterung	Set
o. Abb.	297001	•	•	•	Abdeckhaube Rollatoren, grau, mit Bleiband unten	Stk.
o. Abb.	280009	•	•	•	Tablett, Acryl, transparent	Stk.