

Birdie® EVO



Die neuen Invacare Patientenlifter
mit Komfort-Effekt und Design-Anspruch

Die EVOLution des mobilen Patientenlifters

Die neue Lifter-Familie *Invacare Birdie^{EVO}* zeichnet sich durch eine Fülle an durchdachten Funktionen für den sicheren und komfortablen Transfer aus – zwischen Bett, Stuhl und sogar für die Aufnahme vom Boden.

Basierend auf den positiven Erfahrungen mit dem Vorgängermodell *Invacare Birdie* stellt die neue *Birdie^{EVO}* Lifter-Familie eine maßgebliche Weiterentwicklung dar: Neue Technologien verbessern Komfort und Sicherheit.

Modernes Design

Das ergonomische, ansprechende Design ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern trägt maßgeblich zum individuellen Sicherheitsgefühl des Patienten bei.

Viel Raum für Komfort und Sicherheit

Die *Birdie^{EVO}*-Familie ermöglicht ein besonders angenehmes Anheben. Dabei kann der Patient einfach um 360° gedreht werden. Dies erleichtert die ideale Positionierung für die Pflegekraft und vermittelt ein sicheres Gefühl. Der hohe Ausleger sowie die Position des Motors bieten Patienten viel Raum. Sie fühlen sich nicht eingeeengt und können vollkommen sicher gehoben und bewegt werden.



Einfache Bedienung, schneller Transport und praktische Aufbewahrung

Alle Modelle der *Birdie^{EVO} Familie* lassen sich komplett werkzeuglos auf- und zusammenklappen sowie praktisch hochkant lagern und sind daher besonders platzsparend. Falls nötig, sind sie ohne Werkzeug in zwei Teile zerlegbar.

Der *Birdie^{EVO} COMPACT* ist mit 31 kg Gesamtgewicht besonders leicht und daher noch einfacher zu transportieren und aufzubewahren.



NEU

**EXKLUSIVE
VORTEILE**



Slow'R®

- ▶ Der integrierte Dämpfer reduziert Bewegungen des Patienten auf ein Minimum.



SMARTLOCK®

- ▶ Schneller und einfacher Austausch zwischen 2- und 4-Punkt-Spreizbügel, ganz ohne Werkzeug. SMARTLOCK ist so schlau design, dass der Bügel in jeder Position gesichert ist.



Innovatives Haken-Design

- ▶ Die neu designten Haken ermöglichen eine einhändige Gurtbefestigung. Das höchst stabile, gummierte Material reduziert die Verletzungsgefahr.

Weitere **NEUE** Vorteile



- ▶ Durch die ergonomischen Griffe lässt sich der Birdie^{EVO} besonders einfach manövrieren.



- ▶ Durch die geschwungene Form von Ausleger und Spreizbügel haben Patient und Pflegekraft ein freies Sichtfeld und können jederzeit Blickkontakt halten.



- ▶ Das ergonomisch gebogene Design verleiht ein sicheres, geborgenes Gefühl. Der Lifter lässt sich spielend leicht und noch näher an Bett, Sessel oder Elektro-Rollstühle heranfahren.



Die Innovationen auf einen Blick

Vom Ausleger, zum Spreizbügel,
zum Patientengurt...



◀ **Slow'R®** PATENTIERT
**Das Dämpfungssystem reduziert
Bewegungen des Spreizbügels**

Der neu entwickelte Dämpfer ist im Lifterarm **unsichtbar integriert**. Er sorgt dafür, dass der Patient auch bei zügigen Bewegungen **sehr ruhig** im Lifter hängt.



◀ **SMARTLOCK®** PATENTIERT
**Einfach, schnell und sicher
auszuwechseln**

Der neu entwickelte und patentierte Mechanismus ermöglicht ein schnelles und sicheres Wechseln zwischen 2- und 4-Punkt-Spreizbügel, ganz ohne Werkzeug. SMARTLOCK ist so schlau design, dass der Bügel **stets gesichert** ist. Seitliche Bewegungen werden durch die Form der Aufhängung **effektiv reduziert**.



◀ **Innovatives Haken-Design**
Patientengurte einfach anbringen

Das neue, ergonomische Design der Haken ermöglicht das **einhändige Anbringen** des Patientengurtes. Durch die weite Öffnung kann die Gurtschleife einfach eingehängt werden. Ein Widerhaken verhindert ein unbeabsichtigtes Herausrutschen des Gurtes.

Die Birdie^{EVO}-Familie

Die mobile Patientenlifter-Serie. (R)evolutionär weiterentwickelt.



Birdie^{EVO COMPACT}

- ▲ **Kompakt, leicht und besonders einfach zu manövrieren**

Die kompaktere Variante für beengte Räumlichkeiten



Birdie^{EVO}

- ▲ **Vorreiter bei Patientenliftern**

Die (r)evolutionäre Weiterentwicklung des bewährten Birdie Patientenlifters



Birdie^{EVO PLUS}

- ▲ **Maximale Ausstattung mit umfassenden Funktionen**

Für höchste Ansprüche in der institutionellen Pflege

Modell	Birdie ^{EVO COMPACT}	Birdie ^{EVO}	Birdie ^{EVO PLUS}
Max. Belastbarkeit	▶ 150 kg	▶ 180 kg	▶ 180 kg
Fahrgestell-Spreizung	▶ Manuell	▶ Manuell oder elektrisch	▶ elektrisch
Rollen	▶ 75 oder 100 mm	▶ 75 oder 100 mm	▶ 125 mm hinten / 100 mm vorne
Kontrollbox	▶ Homecare	▶ Homecare	▶ Jumbocare
Handbedienung	▶ Standard	▶ Standard	▶ Mit Akkuanzeige
Innovative Spreizbügel-Form und Haken-Design	▶ Ja	▶ Ja	▶ Ja
Slow'R®	▶ Nachrüstbar	▶ Nachrüstbar	▶ Bereits installiert
SMARTLOCK®	▶ Nachrüstbar	▶ Nachrüstbar	▶ Bereits installiert


Optionen und Zubehör

- ▶ 2-Punkt- und 4-Punkt-Spreizbügel in verschiedenen Breiten
- ▶ Große Auswahl an Patientengurten für die individuelle Versorgung:
 - 14 Modelle,
 - 3 Stoffarten: Standard, Netz (zum Baden) und Premium (für besonderen Komfort)
 - 5 Größen durch farbigen Saum unterscheidbar
 - Max. Belastbarkeit bis 200 kg, XL-Größen bis 250 kg
- ▶ Akku-Wandladegerät (für Birdie^{EVO PLUS})
- ▶ Geeichte Waage zum Einhängen zwischen Lifter und Spreizbügel



Technische Daten ▼

Weitere Informationen, inkl. Bedienungsanleitung, finden Sie auf www.invacare.de

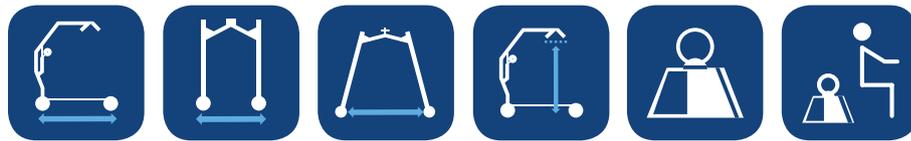

Länge Fahrgestell ▼ Breite Fahrgestell ▼ Weite Fahrgestell-Spreizung ▼ Hubhöhe ▼ Gewicht ▼ Max. Belastbarkeit ▼

Birdie EVO COMPACT	1080 mm	520 mm	815 mm	530 - 1590 mm	31 kg	150 kg
Birdie EVO	1220 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	40 kg	180 kg
Birdie EVO PLUS	1235 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	41 kg	180 kg



Höhe Fahrgestell ▼ Bodenfreiheit ▼ Höhe gefaltet ▼ Wendekreis ▼ Akku-Kapazität* ▼

Birdie EVO COMPACT	110 mm	35 mm	470 mm	1070 mm	40 Hebezyklen
Birdie EVO	110 mm	35 mm	470 mm	1400 mm	40 Hebezyklen
Birdie EVO PLUS	115 mm	35 mm	470 mm	1400 mm	40 Hebezyklen

Die Maßgaben beziehen sich auf 100 mm Rollen und 2-Punkt Spreizbügel.
75 mm Rollen reduzieren die Höhenangaben um 15 mm.

*Mit einer Akkuladung zwischen 100 % und 50 %

Produktfarben ▼



Lichtgrau:
Mast, Ausleger
und Spreizbügel
RAL: 7035



Anthrazitgrau:
Fahrgestell und
Handgriffe
RAL: 7016

Bitte beachten Sie: die Originalfarben können leicht von der Abbildung abweichen.



Zertifizierungen ▼

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
Fax +49 7562 700-66
kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch



Yes, you can.®