



FloorBed Kurzanleitung

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen


052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

- 1 Kopfteil
- 2 Integrierte Bettverlängerung
- 3 Liegefläche mit Oberkörperhochlagerung
- 4 Rollen mit integrierter Bremse
- 5 Liegefläche mit Beinhochlagerung
- 6 Fussteil



Bedienteil

- 1 / 2 Liegefläche Oberkörper heben/senken
- 3 / 4 Liegefläche Beine heben/senken
- 5 / 6 Ganze Liegefläche heben/senken
- 7 + 6 **zusammen gedrückt halten**
Liegefläche fährt auf tiefst mögliche Stellung
- 8 Anti-Schocklagerung (Kopf hoch / Beine tief)
- 9 Schocklagerung (Kopf tief / Beine hoch)

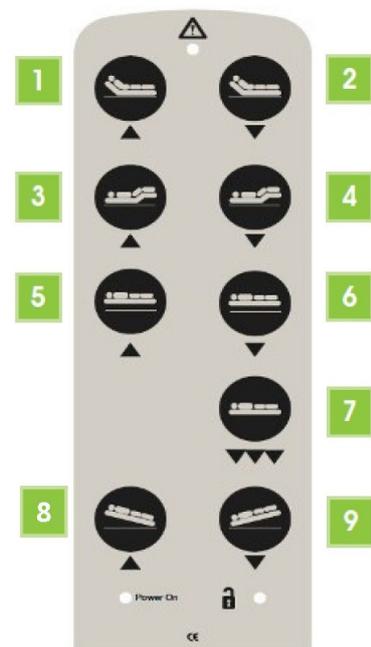

Bedienteil sperren/entsperren

Dazu benötigen Sie den Magnetschlüssel, welcher am Kabel vom Bedienteil angebracht ist. Streichen Sie damit über den untersten Teil des Bedienteils.

- 1x Streichen:** Die obersten 6 Tasten sind entsperrt.
 - Grüne LED leuchtet, Normalbetrieb für Patient
- 2x Streichen:** Alle 9 Tasten sind entsperrt.
 - Orange LED leuchtet
 - Achtung fällt nach 45 Sek. wieder in Vollsperrung
- 3x Streichen:** Das Bedienteil fällt in Vollsperrung
 - Kein LED leuchtet

