

Küschall® COMPACT



UNLIMIT YOUR WORLD

Wir bei Kuschall sind davon überzeugt, dass alles möglich ist, wenn der Wille, es zu erreichen, stark genug ist. Der Kuschall Compact bietet in einem einzigen Produkt Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit zugleich. Lass deiner Persönlichkeit und deinen Komfortwünschen freien Lauf - **befreie deine Welt von Grenzen.**

KÜSCHALL COMPACT

Der Kuschall Compact ist höchster Standard für Zuverlässigkeit und erstklassige Qualität. Er ist entweder mit wegschwenkbaren Beinstützen oder festem Vorderrahmen erhältlich. Der feste Vorderrahmen ist ideal für alle, die besonderen Wert auf eine hohe Steifigkeit des Rahmens und damit eine verbesserte Fahrperformance legen. Legst du mehr Wert auf eine hohe Funktionalität und Anpassbarkeit, dann ist der Kuschall Compact mit wegschwenkbaren Beinstützen perfekt für dich.

ZAUBERWORT: HYDROFORMING

Stärke, Leichtigkeit und Stabilität: Der hydrogeformte, vordere Rahmen des Kuschall Compact verbessert das Fahrverhalten, indem er die Steifigkeit erhöht. Durch die besondere, kantige und ergonomische Form kannst du dich leichter abstützen und umsetzen. Und das Beste an der neuen Form: Der Rollstuhl sieht einmalig aus! Unglaublich modern, charakteristisch und einzigartig.

ZEIGT KANTE: DER NEUE VORDERRAHMEN

■ Das Highlight der neuen Kuschall-Serie: der komplett neu konstruierte Vorderrahmen! Du erkennst ihn an seiner charakteristischen kantigen Form, die erst durch Einsatz des Hydroforming-Verfahrens möglich wurde. Der Kuschall Compact wird dadurch sogar noch leichter: Wir konnten das Gewicht um bis zu 500 Gramm reduzieren!

BEINSTÜTZE

■ Stelle deinen Rollstuhl nach deinen Bedürfnissen aus: entweder mit seitlich abschwenkbaren Beinstützen für den einfacheren Transport; oder mit einem festen Vorderrahmen in einem Winkel von 70° oder 80°, um die Steifigkeit zu erhöhen und dadurch die Fahrperformance zu optimieren.

FUSSAUFLAGEN

■ Ob einteilig oder zweiteilig: Alle Kuschall Fußauflagen sind neu designt und mit einer Antirutsch-Oberfläche ausgestattet - für einen perfekten Halt.



Küschall® COMPACT

EINFACH ZUSAMMENFALTEN

- Mit nur einem einzigen Finger kannst du deinen Küschall Compact zusammenfalten. Beim Entfalten sorgen zusätzliche Führungselemente für eine sichere und stabile Aufnahme des Sitzmoduls.

KREUZSTREBE

- Der Küschall Compact ist leicht und dabei höchst stabil konstruiert. Die schlanken Rahmenrohre verleihen ihm ein sportlich-leichtes Aussehen. Elegant in die Konstruktion integriert ist die Kreuzstrebe, die die Belastbarkeit nochmals steigert.

DIE SPUR HALTEN

- Intuitive Einstellmöglichkeiten der Vorderradgabeln ermöglichen eine optimale Ausrichtung der Vorderräder - damit du die Spur exakt halten kannst.

VORDERRADGABELN

- Das neue und klare Design mit integrierten Lagern ist deutlich weniger anfällig für Schmutz und wartungsfreundlicher.

HAUPTMERK- MALE

ZUVER- LÄSSIG

Je steifer der Rahmen, desto besser ist die Kraftübertragung beim Antreiben. Im Kuschall Compact sind verschiedene technische Lösungen zur Erhöhung der Steifigkeit integriert, wie z.B. die eigens entwickelte Kreuzstrebe. In Kombination mit einer einteiligen Fußplatte erreichst du eine unschlagbare Fahrperformance für deinen faltbaren Rollstuhl!



JEDES TEIL DURCHDACHT

Auch auf die Kleinigkeiten kommt es an: Die Beinstützen sind wahlweise mit einem Winkel von 70° oder 80° verfügbar. Ihr äußerst präziser Verriegelungsmechanismus reduziert jegliches Spiel.

NOCH MEHR KOMFORT

Stimme den Kuschall Compact auf deine Bedürfnisse ab - zum Beispiel kannst du statt der abschwenkbaren Beinstützen einen festen Adduktionsrahmen wählen. Dieser optimiert deine Beinpositionierung und sorgt für besseren Halt auf der Fußplatte. Der Rollstuhl lässt sich noch leichter manövrieren und braucht weniger Platz.



HYDROFOR- MING MACHT'S LEICHT

Der Rahmen wurde im Hydroforming-Verfahren gefertigt und in allen Einzelheiten modernisiert. Dabei wurde sein Design mit viel Bedacht überarbeitet und eine Gewichtsreduzierung von bis zu 500 Gramm erzielt.

DEIN COMPACT - DEIN STYLE!

1 WÄHLE DEINE RAHMENFARBE



Verkehrsweiß



Anthrazitgrau



Tiefschwarz



Verkehrsblau



Karminrot

*weitere Rahmenfarben optional erhältlich

2 WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN



3 WÄHLE DEINE LOGO-FARBE



Rot



Schwarz



Hellgrau



Gold



Rot



Blau



Dunkelgrau



Schwarz

TECHNISCHE DATEN

SITZBREITE
280 – 500 mm
in 20 mm Schritten



SITZTIEFE
320 – 500 mm
in 20 mm Schritten



**UNTERSCHENKEL-
LÄNGE**
200 – 510 mm
in 10 mm Schritten



**RÜCKENLEHNEN-
HÖHE**
300 – 510 mm
in 15 mm Schritten



**RÜCKENLEHNEN-
WINKEL**
82° / 86° / 90° /
94° / 98° / 102°



SITZHÖHE
vorne: 370 – 530 mm
hinten: 360 – 500 mm
in 10 mm Schritten



RAHMENWINKEL
70° / 80°
Standard- oder
Adduktionsrahmen



GESAMTBREITE
SB + 180 mm



**GESAMTBREITE
GEFALTET**
ca. 290 mm



GESAMTLÄNGE
70°: ca. 870 – 1220 mm
80°: ca. 850 – 1200 mm



RADSTURZ
0° / 3°



**GESAMTGEWICHT,
LEER**
ca. 9,6 kg
(fester Vorderrahmen)
ca. 10,5 kg
(wegschwenkbare Beinstützen)



**TRANSPORT-
GEWICHT**
ca. 6,7 kg
(fester Vorderrahmen)
ca. 7,8 kg
(wegschwenkbare Beinstützen)



**MAX. NUTZER-
GEWICHT**
130 kg



CRASH TEST
Crash getestet gem.
ISO 7176-19



Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern.



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

/ UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

Küschall, Küschall Unlimit your world und Champion sind Marken von Invacare International GmbH. Es wurde alles daran gesetzt, dass sich der Inhalt dieser Veröffentlichung zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand befindet. Im Rahmen der laufenden Optimierung des Produkts behält sich Invacare International GmbH das Recht vor, bestehende Modelle jederzeit zu ändern.

© Februar 2020, Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DE - 1647067