



Positionierung auf einen Blick!



KUBIVENT PurplePos

Mehr Vielfalt ist ihre Stärke.




KUBIVENT PurplePos

Zwei Systeme – eine herausragende Wirkung!



Für beide Systeme gilt: Formstabil und trotzdem weich!

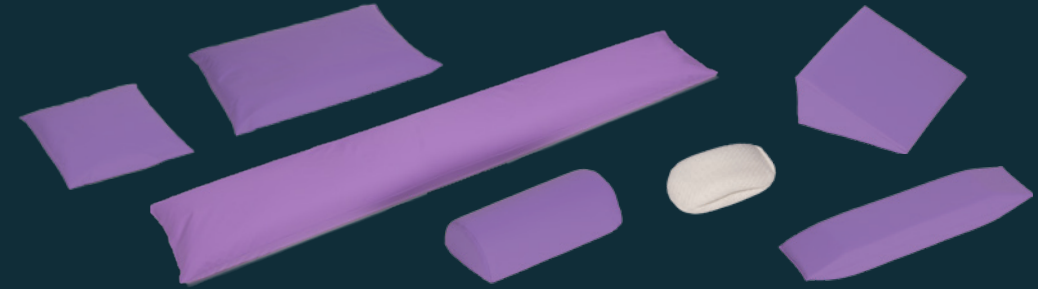

Auf den ersten Blick macht die Farbe Lila den Unterschied. Sie wurde bewusst gewählt, da sie auf den Patienten beruhigend wirkt und den gewünschten Entspannungszustand positiv unterstützt. Mehr noch stehen aber mit **KUBIVENT PurplePos** zwei Systeme im Fokus, die von qualifizierten Experten entwickelt wurden, um die optimale Wirkung in jeder Bedarfssituation zu entfalten. Mit dem Mikroperlen-System und dem Sandwich-System wird das gesamte Spektrum der Positionierungen im pflegerischen Bereich abgedeckt. Ausgesuchte Materialien werden hier mit spezifischen Formen kombiniert, die dekubitus-prophylaktisch wie auch -therapeutisch effizient wirken.

DAS MIKROPERLEN-SYSTEM

Die mit dem Mikroperlen-System ausgestatteten Positionierungskissen von **KUBIVENT** sind auf eine optimale Druckentlastung und Entspannung des Patienten ausgelegt. Dafür sorgen kleinste EPS-Perlen, die sowohl die Position des Patienten als auch dessen Bewegungsförderung besonders wirksam unterstützen. Man kann diese Positionierungskissen sehr individuell modellieren und dennoch sind sie bei aller Anschließbarkeit absolut formstabil! **Zudem ist dieses System äußerst geräuscharm und fördert die Körperwahrnehmung.**

DAS SANDWICH-SYSTEM

Die Positionierungs-Rollen, -Keile und -Kissen sind nach einem Sandwich-System aufgebaut. Sie bieten eine wirkungsintensive Kombination von zwei Schaumstoffarten, die speziell für diese Anwendungen ausgewählt wurden. Der stabilere PU-Schaum-Kern wird dabei von einer weichen Kaltschaum-Schicht ummantelt. Von beiden Seiten nutzbar, haben diese Positionierungshilfen einen großen Vorteil: **Sie können sehr flexibel für unterschiedlichste Anwendungen eingesetzt werden.**

EINSATZ UND INDIKATIONEN

Das Programm der **KUBIVENT** Positionierungshilfen kann für alle üblichen Unterstützungsarten im Pflegebereich eingesetzt werden:

- 30°-Seitenpositionierung
- Mikropositionierung
- 135°-Seitenpositionierung
- Bobath-Positionierung
- Positionierung von Kopf und Extremitäten
- Langsitz
- Nestchen-Positionierung
- Sonstige pflegerisch indizierte Positionierungsunterstützungen


Natürlich sollte dabei immer das individuelle Krankheitsbild beachtet werden. Als mögliche Indikationen kommen z. B. in Betracht:

- Lähmungen
- Kontrakturen
- Spastiken
- Dekubiti
- Verschiedene Positionierungsarten (30°, 45°, 90°, 120°, 135°)
- Atemunterstützende Positionierungen
- Mikropositionierung
- Unterstützung in sitzender Position

Die völlig neue Dimension der Positionierung

KUBIVENT VariMed

Durch die längliche Ausführung lassen sich die Kissen in individuelle Formen bringen. Durch das Mikroperlen-System im Inneren lässt sich die gewünschte Form stabilisieren.

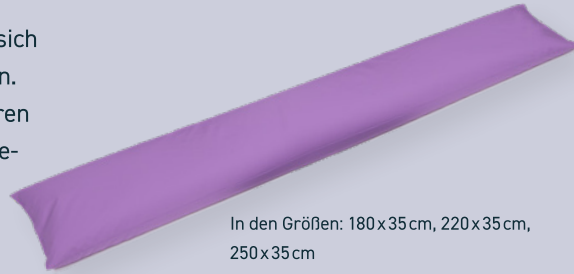

In den Größen: 180x35cm, 220x35cm, 250x35cm

KUBIVENT PhysiForm

Die quadratischen bzw. rechteckigen Universalkissen können je nach Bedarf für die individuelle Positionsunterstützung verwendet werden. Sie nehmen auf angenehme Weise die Körperwärme an und sind gegen Flüssigkeiten jeder Art resistent.

Das Kissen in der Größe 70x50cm gibt es zusätzlich in einer speziellen Ausführung. Mit seiner stärkeren Füllung eignet es sich vorrangig für die Lagerung des Kopfes, um eine Überdehnung des Nackens zu vermeiden.



In den Größen: 40x40cm, 60x40cm, 70x50cm

VORTEILE


- Äußerst geräuscharme Füllung
- Kleinste Mikroperlen (0,5- 1,0mm statt herkömmlicher 1,0- 1,5mm)
- Sehr gute Modulierbarkeit bei absoluter Formstabilität
- Kissen passen sich dem Patienten an und nicht umgekehrt
- Wahrnehmungs-Förderung durch die bisher unerreichte individuelle Körperanpassung
- Bewegungsfähigkeit wird unterstützt
- Nur zwei – verformbare – Kissenformen statt einer Vielzahl vorgeformter Kissen
- Feinste Nahtstabilität
- Feinstes eingearbeitetes Sicherheitsnetz für die Füllung
- Desinfizierbarer Inko-Bezug
- Waschbarer Baumwollbezug inklusive

KUBIVENT Handkissen

Individuell modellierbar durch seine Mikroperlen-Füllung. Ideal für die Positionierung der leicht geöffneten Hand. Der abnehmbare Hygiene-Bezug über dem lila Inko-Bezug sorgt für den Abtransport von Schweiß, ist bei 60°C waschbar und schnell wieder einsetzbar. Die antibakterielle Wirkung des Bezuges wird durch das Antiseptikum Silber erreicht, das als Faden eingewebt ist. Der Silberanteil beträgt ca. 1%. Bitte bei evtl. Silberallergie berücksichtigen.



Größe: 14 x 11 cm

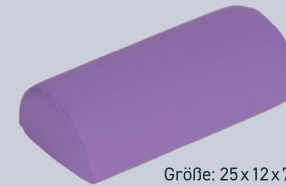


Größe: 25 x 12 x 7,5cm

KUBIVENT Halbrolle

Optimal zur individuellen Positionsunterstützung der Beine. Durch die spezielle Schaumstoff-Kombination aus Kalt- und PU-Schaum wird eine angenehme Position mit der nötigen Stützkraft geschaffen.

KUBIVENT Keil

Geeignet zur Mikrolagerung. Der etwas stabilere Schaumstoff-Innenkern ist an jeder Seite mit einem weicherem Kaltschaum ummantelt. Dadurch ist der Keil flexibel einsetzbar.

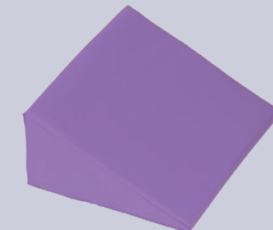

Größe: 25x20x10-1 cm



Größe: 50 x 11 x 6 cm

KUBIVENT Keilkissen XS

Zur zeitlich begrenzten Unterstützung von Bewegungsaktivitäten. Ebenso effizient bei der individuell unterstützenden Oberkörperpositionierung. Durch sanften Auslauf der Enden wird eine gute Körperanpassung erzielt. Einsetzbar als Zwischenpolster für die Beine. Platzsparend und leicht anwendbar.

Mehr Vielfalt ist ihre Stärke!

PurplePos Positionierungshilfen in der Anwendung

Es ist nicht länger nötig, eine Vielzahl unterschiedlichster Positionierungshilfen für unterschiedliche Anwendungen zu haben, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Indem wir einzelne Produkte vielseitiger gemacht haben, genügt ein insgesamt kleineres Programm an Hilfen, um das komplette Spektrum der Positionierung abzudecken. Mehr Effizienz ist das Geheimnis von **KUBIVENT PurplePos**.

POSITIONIERUNG MIT DEM VARIMED



A-Positionierung, liegend



U-Positionierung, liegend



A-Positionierung, sitzend



C-Positionierung, sitzend



90°-Positionierung


POSITIONIERUNG MIT DEM VARIMED UND PHYSIFORM



30°-Positionierung



45°-Positionierung

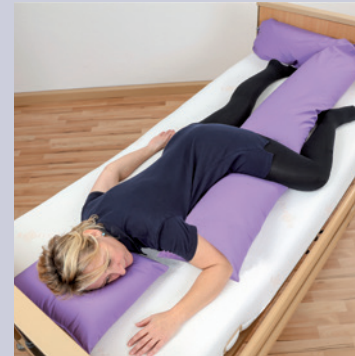

135°-Positionierung



Herz-Bett-Positionierung



Positionierung auf der Bettkante



Sitzend im Bett

POSITIONIERUNG MIT DEM PHYSIFORM



30°-Positionierung



90°-Positionierung



Fuß-Positionierung



Kopf-Positionierung



Sitzend im Bett



Sitzend im Bett



Arm-Positionierung im Rollstuhl



Arm-Positionierung



Bein-Positionierung

POSITIONIERUNG MIT DER HALBROLLE



Arm-Positionierung

POSITIONIERUNG MIT DEN KEILEN



Positionierung auf der Bettkante



Mikro-Positionierung



Mikro-Positionierung



Mikro-Positionierung

POSITIONIERUNG MIT DEM KEILKISSEN XS



Bein-Positionierungen

BEWEGUNGSFÖRDERNDE POSITIONIERUNGEN



POSITIONIERUNG MIT DEM HANDKISSEN



Hand-Positionierung

Kennen Sie schon unsere PurpleTraus Produkte?




Das Pflege-Leicht-Programm

KUBIVENT PurplePos und PurpleTrans

*Positionierung und
Transfer auf
leichteste Art*

KUBIVENT PurpleTrans

Die einfache Art des Transfers!

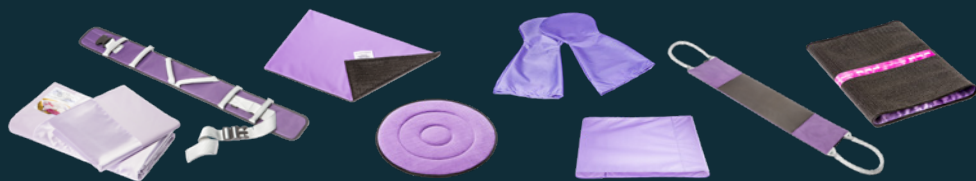

KUBIVENT
is the
new
BLACK

Positionierungshilfen von **KUBIVENT**, dem Spezialisten für Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie, geben die individuell passende Antwort auf unterschiedliche Bedarfssituationen. Dabei spielt auch eine wirksame Prophylaxe gegen pflegerische Risiken wie das Sturz-, Kontraktur-, Pneumonie-, Thrombose- und auch das Dekubitus-Risiko eine wesentliche Rolle. Je nach Befindlichkeit bzw. Krankheitsbild ist das Mikroperlen-System oder das Sandwich-System die optimale Lösung für den, der im Mittelpunkt steht.

Das **KUBIVENT PurplePos** Programm will das Beste für den Patienten leisten.

KUBIVENT



KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme
Robert-Bosch-Str. 8 · 73660 Urbach
Telefon: 071 81 / 47 50 6-0 · Fax: 071 81 / 47 50 6-99
info@kubivent.com · www.kubivent.com