



Einfach mobil.

**strack**

Patienten-  
und Pflegebedarf

# PRODUKT- INFORMATIONEN

**NEU**



***E-PILOT***

ZUGGERÄT FÜR ROLLSTÜHLE

**P15**






# ***E-PILOT***

ZUGGERÄT FÜR ROLLSTÜHLE

Highlights	4
Produktvorteile	6
Produktaufbau	7
Lieferumfang	8
Anbau Halterung	9
Farben	10
Zubehör	11
Mobility Plus Package	13
Technische Daten	14
Ersatzteildokumentation	16
Bestellformular	22

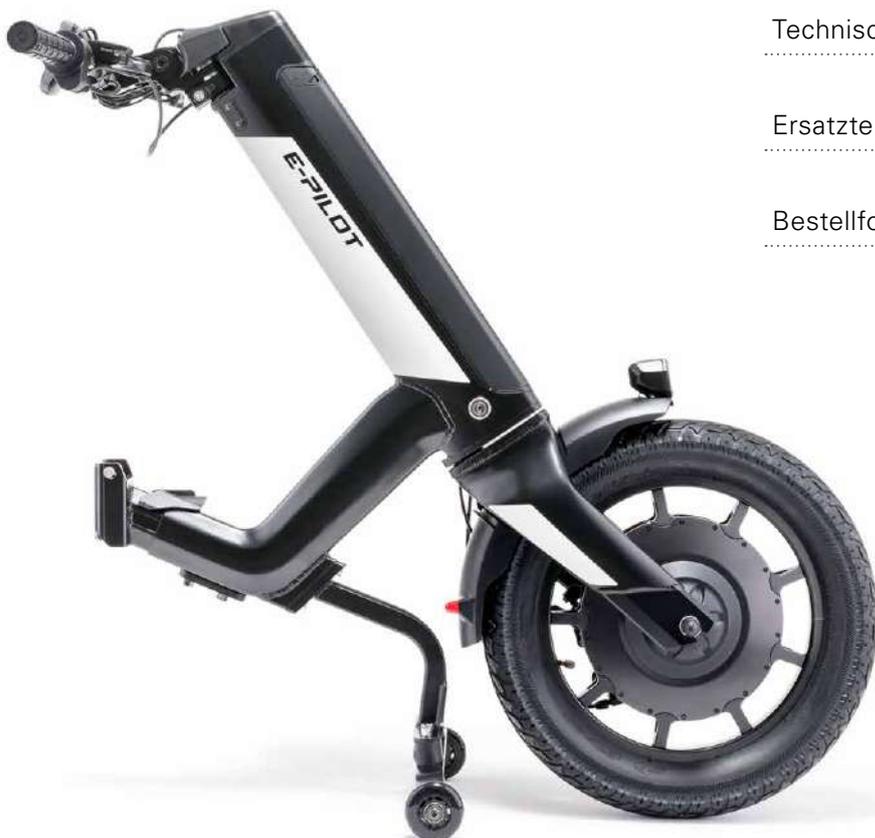

 **MADE IN GERMANY**



# Alle Highlights auf einen Blick



## Große Reichweite und Laufruhe

- Abnehmbarer Lithium-Ionen Akku-Pack
- Reichweite bis zu 50 km mit einer Akku-Ladung
- Hocheffizienter und geräuschloser Direktantrieb



## Genieße die Geschwindigkeit

- Basisversion 6 km/h schnell, optional erweiterbar bis 20 km/h über Mobility Plus Package<sup>1) 2)</sup>
- Vorwahl der maximalen Geschwindigkeit in 4 Stufen möglich
- Doppelte Sicherheit: zwei hydraulische Bremsen



## Mobilität mit Stil

- Integrierter Akku-Pack und innenliegende Kabelverlegung
- Sportlich-dynamisches Rahmendesign dank innovativer Hydroforming-Technologie



## Robuste Ausführung für mehr Fahrkomfort

- Großes 16"-Vorderrad
- Gute Federung dank dicker Balloon-Luftbereifung
- Stabile Konstruktion von Gabel und Chassis
- Ständer mit patentierter Schwenkfunktion bei Hindernissen



## Einfach in der Handhabung

- Einfache Bedienung über zwei Bedienelemente an den Griffen
- Großes, farbiges 2,4"-TFT-Display
- Leichtes An- und Abdocken an manuellen Rollstuhl
- Mit Rückwärtsgang



## Individuell anpassbar

- Umfangreiche Farbauswahl
- KLICKfix® Ablage- und Taschensortiment
- Vielfältiges Zubehörprogramm

## Mobility App



### Eine smarte Erweiterung

- Mobility App mit Anzeige von Akku-Kapazität und weiteren Produktinformationen
- Mobility Plus Package zur Erweiterung der Funktionen um
  - Speed: Geschwindigkeitserhöhung bis 20 km/h
  - Cruise: Tempomat-Funktion
  - easyNavi: rollstuhlgerechte Navigation

<sup>1)</sup> Im Geltungsbereich der Straßenverkehrsordnung (StVO) darf die Geschwindigkeit 6 km/h nicht überschreiten, 20 km/h Unterstützungsgeschwindigkeit sind nur auf privatem Gelände erlaubt.

<sup>2)</sup> Bei Verwendung des e-pilot mit 10 oder 15 km/h im Geltungsbereich der StVO ist eine Einzelabnahme nach StVZO und Versicherung gemäß Pflichtversicherungsgesetz notwendig.

# Speed up your life.





## Produktvorteile

Speed up your life. Der e-pilot ist ein elektrisches Zuggerät, das einfach an den manuellen Rollstuhl angedockt wird. Hierdurch werden Mobilität und Unabhängigkeit des Rollstuhlfahrers deutlich erhöht.

### Die wichtigsten Produktvorteile auf einen Blick

- Intelligenter Andockmechanismus für ein sekundenschnelles An-/Abdocken des e-pilot
- Rückwärtsgang für einfaches Rangieren
- Zuschaltbare Traktionshilfe bei glattem Untergrund für sicheres Anfahren
- Großer Aktionsradius dank des modernen Lithium-Ionen Akku-Packs mit einer Reichweite von bis zu 50 km
- Überlegene Fahreigenschaften dank geräuschlosem und effizientem Direktantrieb
- Großes Vorderrad zur einfachen Überwindung von Randsteinen oder unebenen Untergründen
- Zwei hydraulische Bremsen für doppelte Sicherheit
- Große Flexibilität durch individuellen Anbau an die meisten manuellen Rollstühle

Hilfsmittelverzeichnis-Nummer: [beantragt](#)

## Rollstuhlanbau

- Faltrollstühle, vorzugsweise mit doppelter Kreuzstrebe, auch mit abschwenkbaren Beinstützen
- Aktivrollstühle (mit Starr- oder Faltrahmen)

Das flexible Halterungssystem erlaubt die Kombination mit einer Vielzahl von Rollstühlen.

Außerdem empfehlen wir die Verwendung der verstärkten Hinterräder (optional) und eine Radstandserweiterung.

### Kompatibilitätsprüfung

Ermitteln Sie folgende Angaben, um sicherzustellen, dass der vorhandene Rollstuhl mit dem e-pilot kombiniert werden kann: Rollstuhlhersteller, genaue Modellbezeichnung, Sitzbreite, Sitztiefe, Sitzhöhe (gemessen Unterkante Sitzbespannung vorne), Unterschenkelänge und Art der Beinstützen.

Kontaktieren Sie mit den Angaben unseren Kundenservice unter der Rufnummer 0800 9096 999 (gebührenfrei) oder per Mail unter [info@alber.de](mailto:info@alber.de). Alternativ können Sie die Prüfung auch in unserem Dealer Information Pool vornehmen ([www.dip.alber.de](http://www.dip.alber.de)), Menüleiste „Anbau“.

## Unser Qualitäts-Anspruch – Ihre Sicherheit

Prüfsiegel und -institut



TÜV Süd, Hannover

CE-Konformität



Entspricht der EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG

Produkt der Anwendungsklasse

Klasse A (Innenbereich)

Klasse B (Innen- und Außenbereich)

Klasse C (Außenbereich)



**Der Akku-Pack**

Formschön integriert und mit Schloss diebstahlgesichert.  
Bis zu 50 km Reichweite,  
5 LEDs zur Kapazitätsanzeige.

**Das Antriebsrad**

Geräuschloser, effizienter Direktantrieb mit dicker Balloon-Bereifung für gute Federung.

**Die Halterung**

Wird am Sitzrohr des Rollstuhls befestigt, mittlere Strebe abnehmbar, Rollstuhl bleibt faltbar.

**Der Ständer**

Mit großen Rollen zum einfachen An- und Abdocken sowie patentierter Wegschwenkfunktion bei Hindernissen.

Abbildung: Standardversion mit Designfarbe Weiß seidenmatt



**Das Display**

Abnehmbares 2,4"-Farbdisplay mit klarer Anzeige von Akkukapazität, Geschwindigkeit und Tour-Daten. Inklusive Bluetooth für Smartphone-Konnektivität.



**Die Ladebuchse**

Serienmäßig mit USB-Buchse zum Laden des Smartphones.



**Die Bremsen**

Serienmäßig mit zwei starken und gut dosierbaren hydraulischen Bremsen ausgestattet.

**Der Gasgriff**

Einstellung der Geschwindigkeit.

**Bedienelement 1**

Einfache Ansteuerung von Hupe und Licht.

**Bedienelement 2**

Einfache Ansteuerung von Ein/Aus, Menü, Fahrstufen/Rückwärtsgang und Tourdaten.



#### Antriebseinheit

- Innovativer und formschöner Hydroforming-Aluminium-Rahmen
- Integrierter Akku-Halter mit Schloss
- Kabel und Leitungen im Rahmen geführt
- Taster für Ein/Aus, Menü, Fahrstufen/Rückwärtsgang, Tourdaten
- Taster für Hupe und Licht
- Bremshebel links und rechts, hydraulisch
- Ständer mit patentierter Wegschwenkfunktion zur einfachen Hindernisüberwindung
- USB-Buchse zum Laden eines Smartphones
- Grundfarbe Schwarz, Designfarbe Weiß seidenmatt (weitere Farben siehe Seite 10)
- Für den Straßenverkehr zugelassene Beleuchtung



#### Antriebsrad

- Getriebeloser Motor, daher geräuschlos, wartungsfrei
- Motor mit 250 W (konstant) und 650 W (Spitze)
- Scheibenbremse 203 mm mit zwei hydraulischen Bremssätteln
- 16"-Ballon-Luftbereifung
- Vier Vorwärtsfahrstufen, Rückwärtsgang



#### Akku-Pack

- Akku einsetzen und mit einem „Klick“ automatisch arretieren
- Reichweite bis zu 50 km (abhängig von Untergrund, Personengewicht, Temperatur, Rollstuhleinstellungen und Gelände)
- Gewicht: nur 2,9 kg
- Aufladen des Akkus im ein- oder ausgebauten Zustand möglich
- Optionaler Wechsel-Akku für noch mehr Reichweite erhältlich



#### Display

- Einfaches Aufstecken dank automatischer Kontaktierung
- TFT-Farbdisplay mit Anzeige von Geschwindigkeit, Akku-Kapazität, Fahrstufe, Fahrmodus und Tour-Daten
- Weitere Funktionen über Menü anwählbar



#### Automatik-Ladegerät

- Elektronische Lade- und Abschaltautomatik
- Ladezeit eines leeren Akkus ca. 4 Stunden



### e-pilot Mobility App

- Für Smartphones mit Android- oder iOS-Betriebssystem und Internetfähigkeit
- Kostenlos in Google Play oder im App Store downloaden

Die Mobility App im Überblick:

- Guide:
- Kurzbedienungsanleitung
  - Fehlerinformation mit Lösungsvorschlägen
  - Fachhändlersuche weltweit
- Cockpit:
- Anzeige von Restkapazität und -reichweite
  - Tour-Computer
  - Aufzeichnen einer gefahrenen Strecke

Erweiterung der Funktionen durch das optional erhältliche Mobility Plus Package (siehe Seite 13).



### Anbausatz Rollstuhl

- Mechanische Anbindung des e-pilot an den manuellen Rollstuhl (bitte mitbestellen, falls nicht vorhanden)
- Flexibler Anbau an die meisten Rollstühle
- Die Halterung für den e-pilot besteht aus folgenden Teilen:
  - Andockstrebe
  - Rollstuhlspezifische Halterung

### Andockstrebe:

- Diese ist in der Breite und im Winkel an den Rollstuhl anpassbar.
- Die Andockstrebe kann über zwei Quickpins einfach entnommen werden. Der Rollstuhl bleibt somit faltbar und es bleibt weniger zusätzliches Gewicht am Rollstuhl.

### Rollstuhlspezifische Halterung:

- Diese besteht aus acht Klemmen, zwei Trägern und zwei Aufnahmen. Diese Teile sind speziell auf den Rollstuhl angepasst und verbleiben am Rollstuhl. Die Halterung hat ein Gewicht von 700–900g, je nach Ausführung.



### Farboptionen

Individueller Auftritt durch ein breites Angebot an Designfarben. Die Rahmenfarbe ist Schwarz. Die farbigen Flächen an der Seite des Rahmens und der Gabel sind serienmäßig weiß oder farblich auswählbar (siehe Farben unten).

Farbauswahl für Designelemente:

- 4 Hochglanz-Signalfarben
- 6 Metallicfarben matt



Weiß seidenmatt  
(Standard)

### Option Hochglanz-Signalfarben\*




Fire Red

Dark Yellow

Lime Green

Light Blue

### Option Metallicfarben matt\*

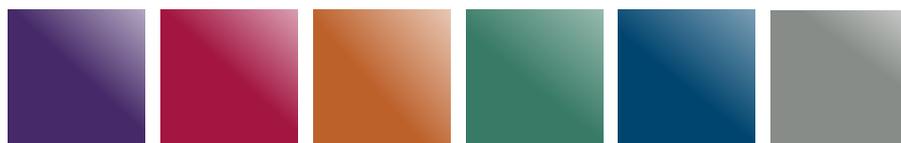

Purple

Cherry Red

Blaze  
Orange

Emerald  
Green

Dark Blue

Anthracite

\* Abgebildete Farben sind nicht farverbindlich. Änderungen in der Farbauswahl vorbehalten.



#### KLICKfix® Grundträger vorne

- Montage am Rahmen vorbereitet, Grundträger jederzeit nachrüstbar
- Zur Aufnahme von Shopping-Tasche oder Vario-Träger
- Adapter passend für weiteres KLICKfix®-Zubehör mit Lenkeradapter
- Akku-Pack auch bei montiertem Grundträger herausnehmbar



#### Shopping-Tasche

- Kompatibel mit KLICKfix® Grundträger vorne
- Mit Alurahmen zur einfachen Beladung
- Mit Reißverschluss, formstabil durch Versteifungsstreben
- Abmessungen 35 cm x 28 cm x 26 cm
- Zuladung bis max. 15 l bzw. 5 kg
- Farben: Schwarz oder Schwarz mit bunten Punkten (ohne Abbildung)



#### Vario-Träger

- Kompatibel mit KLICKfix® Grundträger vorne
- Universeller Träger für Taschen und Rucksäcke
- Der Vario-Träger kann in zwei Positionen am Adapter angekoppelt werden
- Abmessungen 21 cm x 32 cm x 17 cm
- Farbe Schwarz
- Zuladung max. 7 kg



#### KLICKfix® Grundträger hinten

- Montage am Rahmen vorbereitet, Grundträger jederzeit nachrüstbar
- Kombination mit vorderem Grundträger möglich
- Zur Aufnahme von Compact-Tasche und Flaschenhalter
- Adapter passend für weiteres KLICKfix®-Zubehör mit Miniadapter



#### Compact-Tasche

- Passend für KLICKfix® Grundträger hinten
- Mit zwei Fächern und Reißverschluss
- Farbe Schwarz
- Abmessungen 11 cm x 19 cm x 9 cm
- Zuladung bis max. 2 l bzw. 1 kg



#### Flaschenhalter

- Passend für KLICKfix® Grundträger hinten
- Farbe Schwarz
- Für Flaschen mit 30–60 mm Durchmesser
- Zuladung max. 1 kg



#### Wechsel-Akku-Pack

- Zur Erweiterung der Reichweite
- 36 V, 496 Wh, Gewicht 2,9 kg



#### Vorderlicht Supernova

- Doppelte Lichtausbeute im Vergleich zur Standardbeleuchtung
- Robustes Design-Aluminiumgehäuse
- Extra leuchtstark mit 205 Lumen
- StVZO-zugelassen
- Standlicht bis 5 Min. nach dem Ausschalten



#### Rücklicht für Schiebegriffe

- Batteriebetrieben (2x AAA)
- Laufzeit bis zu 50 Std.
- StVZO-zugelassen
- Inklusive einstellbaren Gummibands zur Befestigung an den Schiebegriffen
- Beidseitige Anbringung lt. StVO vorgeschrieben



#### Rückspiegel

- Zur Befestigung am Lenker links
- Nicht kompatibel mit optionalem Gasgriff links
- Einfache Montage und Einstellung
- Abklappbar zum platzsparenden Abstellen
- Einfach nachrüstbar



#### Handballenauflage Gasgriff

- Ermüdungsfreies Betätigen des Gasgriffs
- Einfache Montage über Klemmhalterung
- Einfach nachrüstbar



#### Manuelle Hinterräder

- Extra robuste Ausführung speziell für den Einsatz mit dem Zuggerät e-pilot
- Bereifung Marathon Plus 24" x 1 3/8" Luft, Pannenschutz-Einlage
- Steckachse 1/2" (12,7 mm), Länge 104 mm



#### Sicherheitspaket

- Bestehend aus: Heckmarkierungstafel, zwei Reflektoren, zwei batteriebetriebenen Rückleuchten und Versicherungstafelhalter
- Notwendig für Zulassung nach StVZO (Geschwindigkeit über 6 km/h)
- Zur Befestigung an den Rollstuhlschiebegriffen
- Nicht kompatibel mit Rollstühlen ohne Schiebegriffe



## Das e-pilot Mobility Plus Package und die Funktionen im Überblick

- Erweiterung der e-pilot Mobility App um nützliche Funktionen wie Tempomat Cruise, easyNavi oder die Geschwindigkeitserhöhung Speed
- Voraussetzung ist ein internetfähiges Android- oder iOS-Smartphone mit Bluetooth
- Enthält: Booklet mit Bedienungshinweisen und Lizenzcode zur Erweiterung der Mobility App




### Speed <sup>1)2)</sup>

- Erhöhung der maximalen Geschwindigkeit von 6 auf 20 km/h
- Neues, dynamisches Fahrgefühl mit dem e-pilot



### Cruise

- Tempomat zum Halten einer eingestellten Geschwindigkeit
- Leichte Anpassung in 1-km/h-Schritten

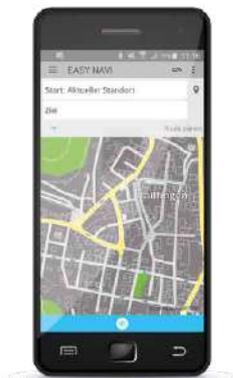

### easyNavi

- Einfache Start-/Zielnavigation mit rollstuhlgerechter Routenführung
- Routen-Import (GPX)
- Kartenmaterial: Open Street Map



### Phone <sup>3)</sup>

- Anzeige einer Kurzinfo bei eingehenden Anrufen oder SMS auf dem Display des e-pilot

<sup>1)</sup> Im Geltungsbereich der Straßenverkehrsordnung (StVO) darf die Geschwindigkeit 6 km/h nicht überschreiten, 20 km/h Unterstützungsgeschwindigkeit sind nur auf privatem Gelände erlaubt.

<sup>2)</sup> Bei Verwendung des e-pilot mit 10 oder 15 km/h im Geltungsbereich der StVO ist eine Einzelabnahme nach StVZO und Versicherung gemäß Pflichtversicherungsgesetz notwendig.

<sup>3)</sup> Nur bei Android.



### Allgemein

Personengewicht	Max. 100 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	Max. 135 kg
Steigfähigkeit	Bis 10 %
Bremsfähigkeit	Bis 15 %

### Antriebsrad

Größe/Bereifung	16" / 16 x 3.00
Motor-Nennleistung	250 W
Motorleistung max.	650 W
Betriebsspannung	36 V
Max. Drehmoment	40 Nm
Geschwindigkeit	0,5 – 20 km/h Bis 6 km/h (Standardversion) / bis 15 km/h <sup>1)</sup> / bis 20 km/h <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Nur mit entsprechender Ausstattung (Sicherheitspaket), Einzelabnahme und Versicherung.

<sup>2)</sup> Nur mit Mobility Plus Package möglich. Nur auf privatem Gelände.

### Akku-Pack

Akku-Zellen	36 V, 13,8 Ah Auslaufsicher und wartungsfrei, Lithium-Ionen-Akku, 24 Monate Garantie
Akkuleistung	496 Wh
Reichweite	Bis 50 km, je nach Untergrund, Anwendergewicht, Temperatur und Topografie

### Display

Beleuchtetes TFT-Display	Farbdisplay 2,4" mit Fahrinformationen, Tourdaten (Zeit, Strecke, Restreichweite), Bluetooth-Verbindung
--------------------------	---

### Bedieneinheit links

Funktionen	Licht, Hupe
------------	-------------

### Bedieneinheit rechts

Funktionen	Ein/Aus, Menü, Geschwindigkeitsvorwahl in 4 Stufen, Rückwärtsgang
------------	---

### Weitere Funktionen

Fahrmodi (Eco, Tour, Sport), Traktionshilfe, USB-Ladeadapter (max. 1,3 A) Sprachauswahl: DE, GB, FR, NL, IT, ES, SE, NO

### Ladegerät

Eingangsspannung	230 V (AC), 50 Hz, Lade- und Abschaltautomatik
Ausgangsspannung	45 V (DC)
Ladestrom	4 A
Ladezeit	Ca. 4 Stunden bei leerem Akku-Pack

### Gewicht

Gesamtgewicht	18,4 kg
Gesamtgewicht ohne Akku-Pack	15,5 kg
Akku-Pack	2,9 kg
Antriebsrad	6,5 kg




CE-konform gemäß  
Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG

Hilfsmittelverzeichnis-Nummer [beantragt](#)



## Abmessungen

A = Gesamtbreite	560 mm
B = Gesamtlänge	900 mm
C = Gesamthöhe	950 mm
D = Breite Akku-Pack	82 mm
E = Länge Akku-Pack	443 mm
F = Höhe Akku-Pack	71 mm

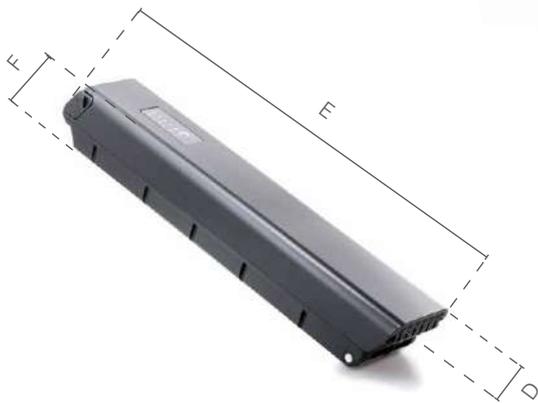




Komponenten	17
Lenker, Dock und Gasgriff	18
Bremsen	19
Antriebsrad, Reifen und Schlauch	20
Ständer	21
Lenkereinheit	22
Andockmechanismus	23

# ERSATZTEILE UND ERSATZTEILPREISE




# Komponenten

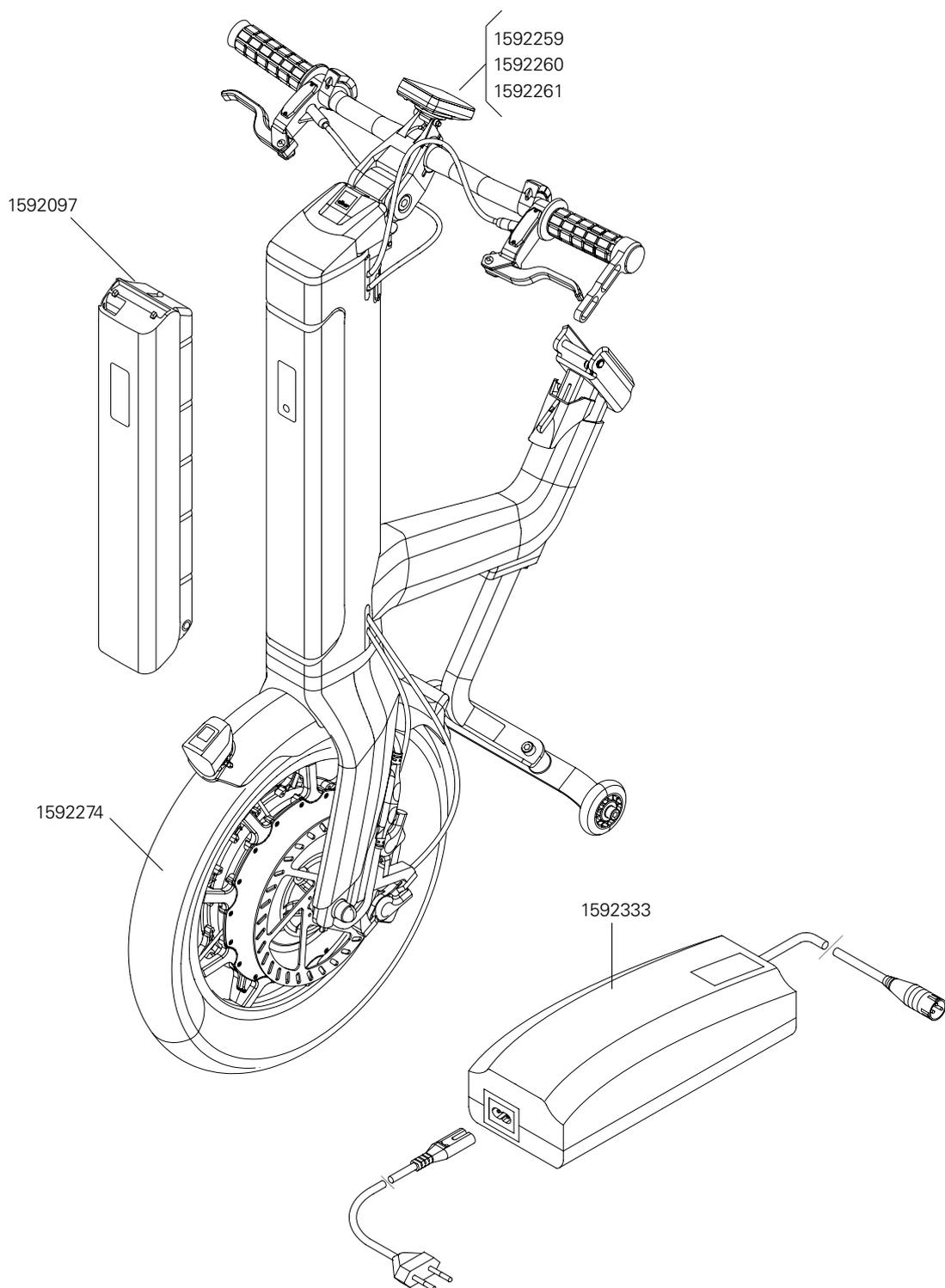

Bestellnummer	Bezeichnung	Anzahl	Netto in EUR
1592097	Akku-Pack P15 36 V / 13,8 Ah	Stück	760,00
1592259	Display P15 Connect 6 km/h	Stück	189,00
1592260	Display P15 Connect 10 km/h	Stück	189,00
1592261	Display P15 Connect 15 km/h	Stück	189,00
1592274	Antriebsrad P15 komplett	Stück	745,00
1592333	Ladegerät 4A für e-pilot P15	Stück	240,00




## Lenker, Dock und Gasgriff

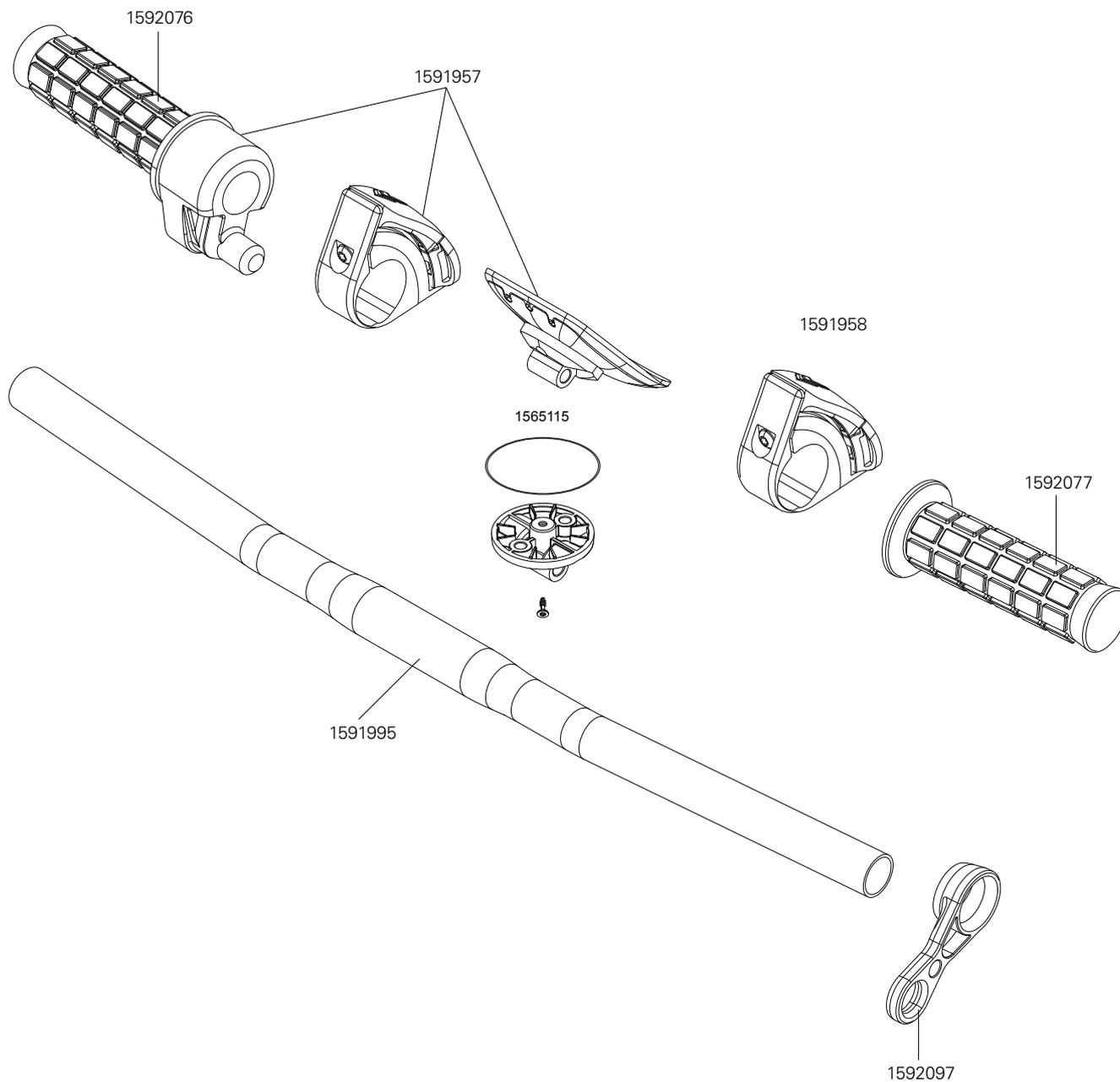


Bestellnummer	Bezeichnung	Anzahl	Netto in EUR
1565115	Montageset für Halterungsdock Z10 / Z15 und P15	Stück	4,95
1591957	Halterungsdock Display P15 inkl. Gasdrehgriff u. Bedienelement	Stück	333,00
1591958	Bedienelement Licht / Hupe P15	Stück	67,75
1591995	Lenker schwarz gerade P15	Stück	33,50
1592076	Gasgriff für Lenker P15	Stück	138,00
1592077	Griffbezug für Lenker P15	Stück	9,70
1592079	Arretierung für Bremse P15	Stück	7,50




## Bremsen

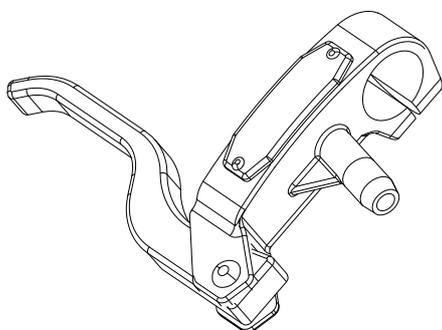


1592004

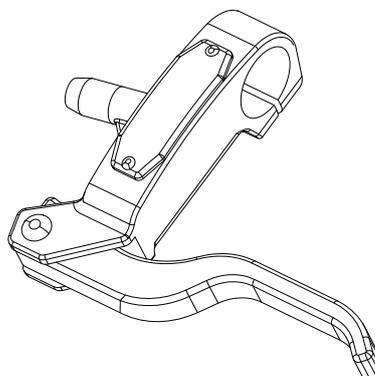

1592003

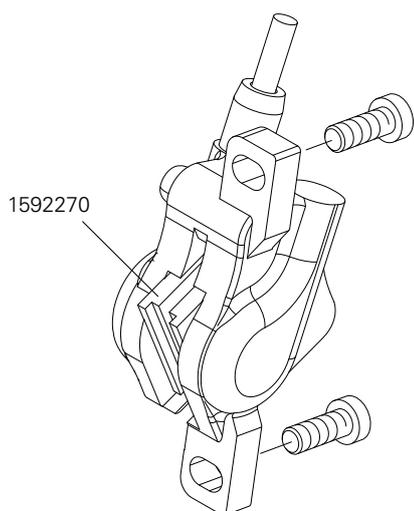


1592270

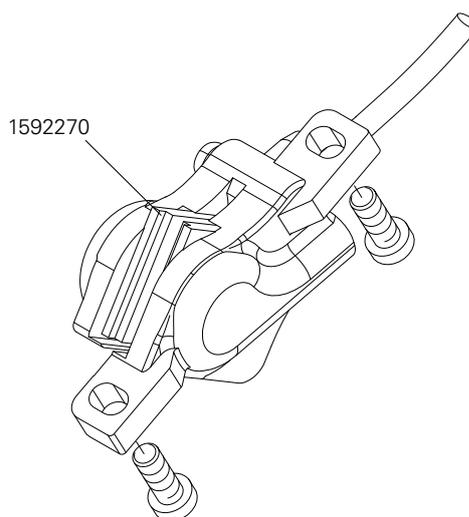

1592270

Bestellnummer	Bezeichnung	Anzahl	Netto in EUR
1592003	Bremse P15 links komplett	Stück	77,65
1592004	Bremse P15 rechts komplett	Stück	77,65
1592270	Bremsbelag Shimano Disc Brake Pads B01S	Stück	12,50


## Antriebsrad, Reifen und Schlauch

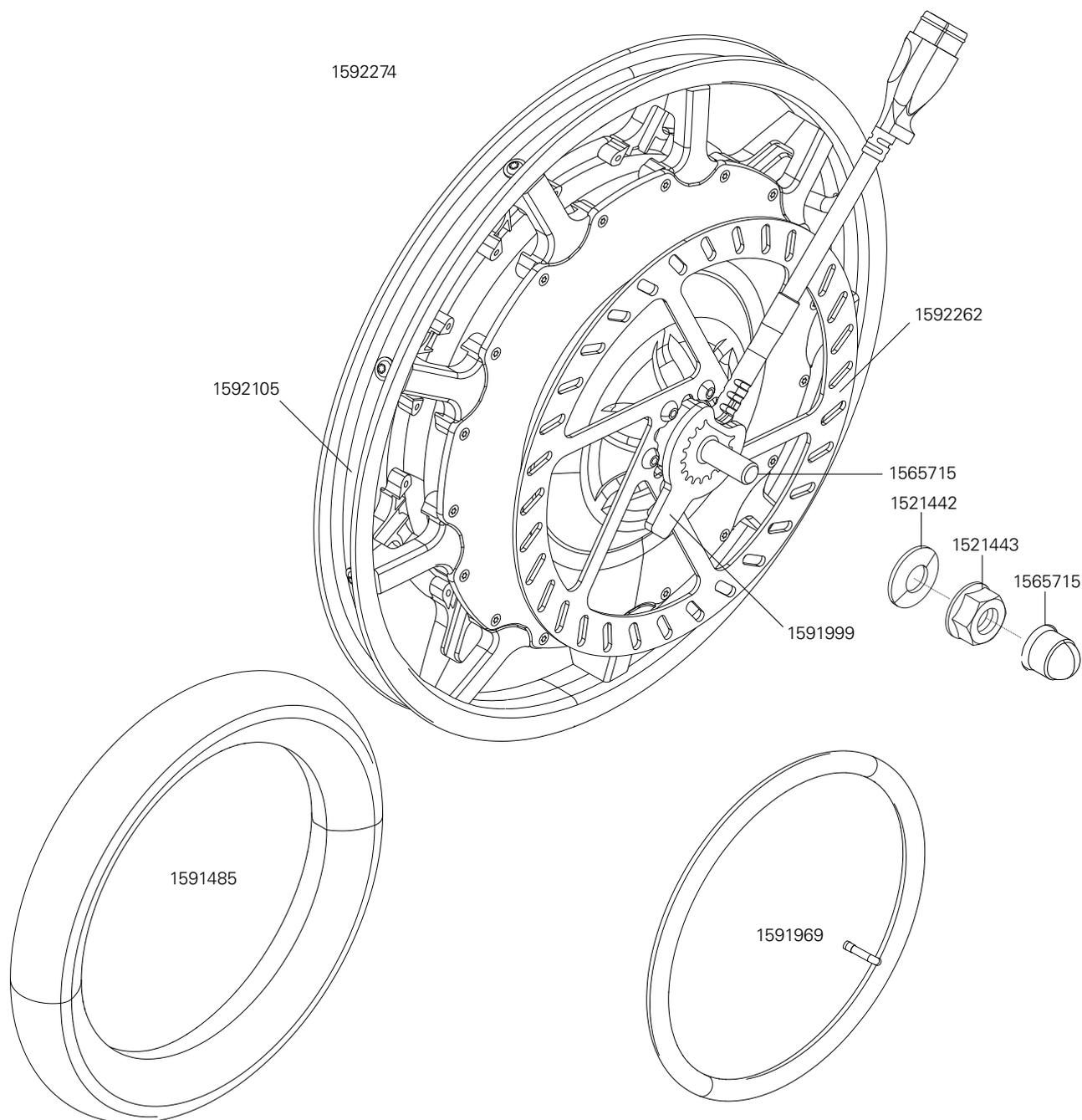

Bestellnummer	Bezeichnung	Anzahl	Netto in EUR
1521442	U-Scheibe für Schraubachse Z10/Z20 und P15	Stück	0,20
1521443	Mutter für Schraubachse Z10/Z20 und P15	Stück	0,50
1565715	Abdeckung Achsmutter Z10 / Z20 / P15	Stück	0,85
1591485	Reifen 16 x 3.00 für P15	Stück	48,50
1591999	Drehmomentstütze P15	Stück	19,60
1592105	Felgenband 16 Zoll P15	Stück	4,60
1592262	Bremsscheibe 203mm	Stück	20,95
1592274	Antriebsrad P15 komplett	Stück	745,00




# Ständer

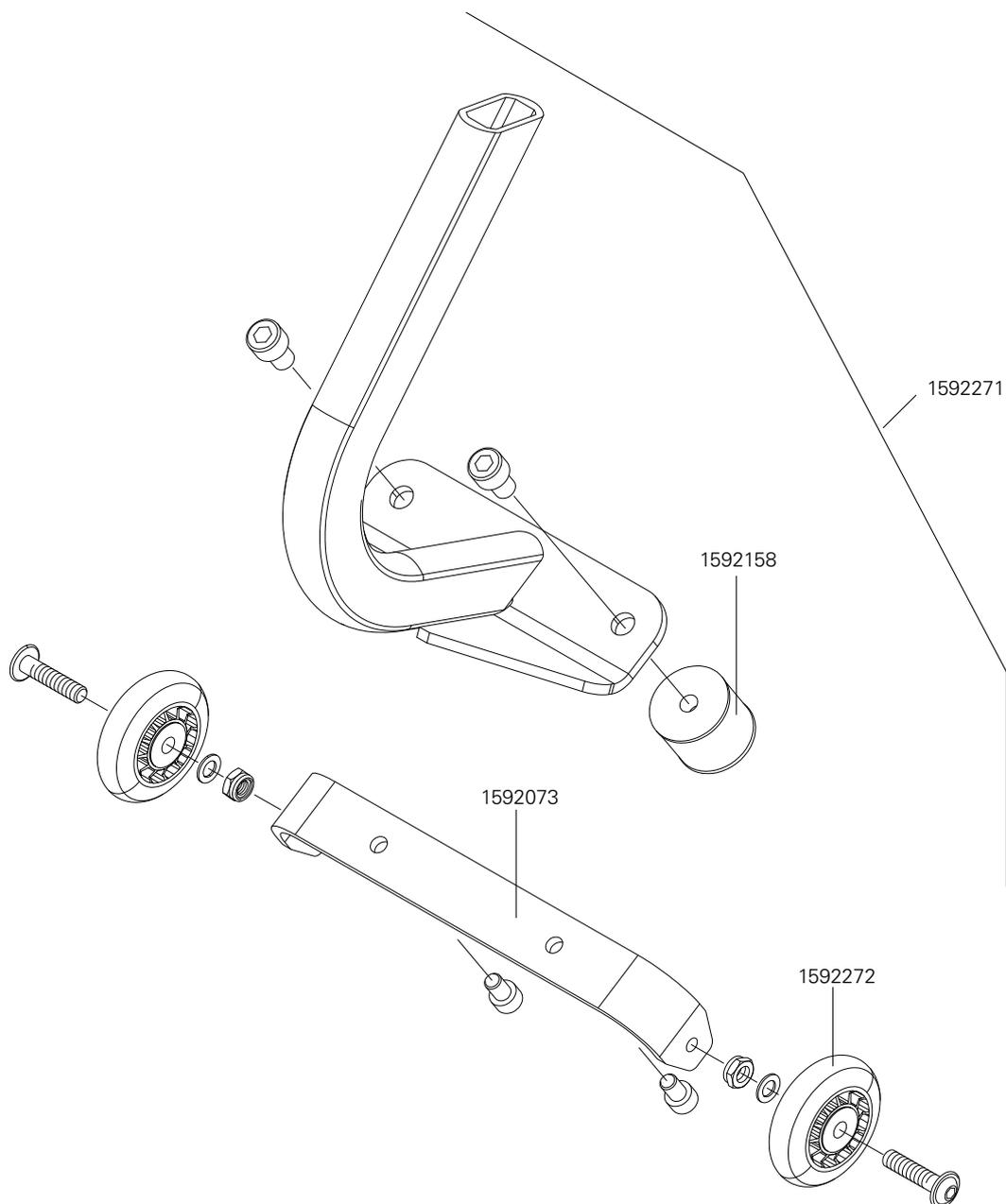

Bestellnummer	Bezeichnung	Anzahl	Netto in EUR
1592073	Bügel für Ständer P15	Stück	38,00
1592158	Flexibler Verbinder P15	Stück	5,50
1592271	Ständer P15 komplett	Stück	118,00
1592272	Räder-Set für Ständer P15	Stück	27,50


# Lenkereinheit

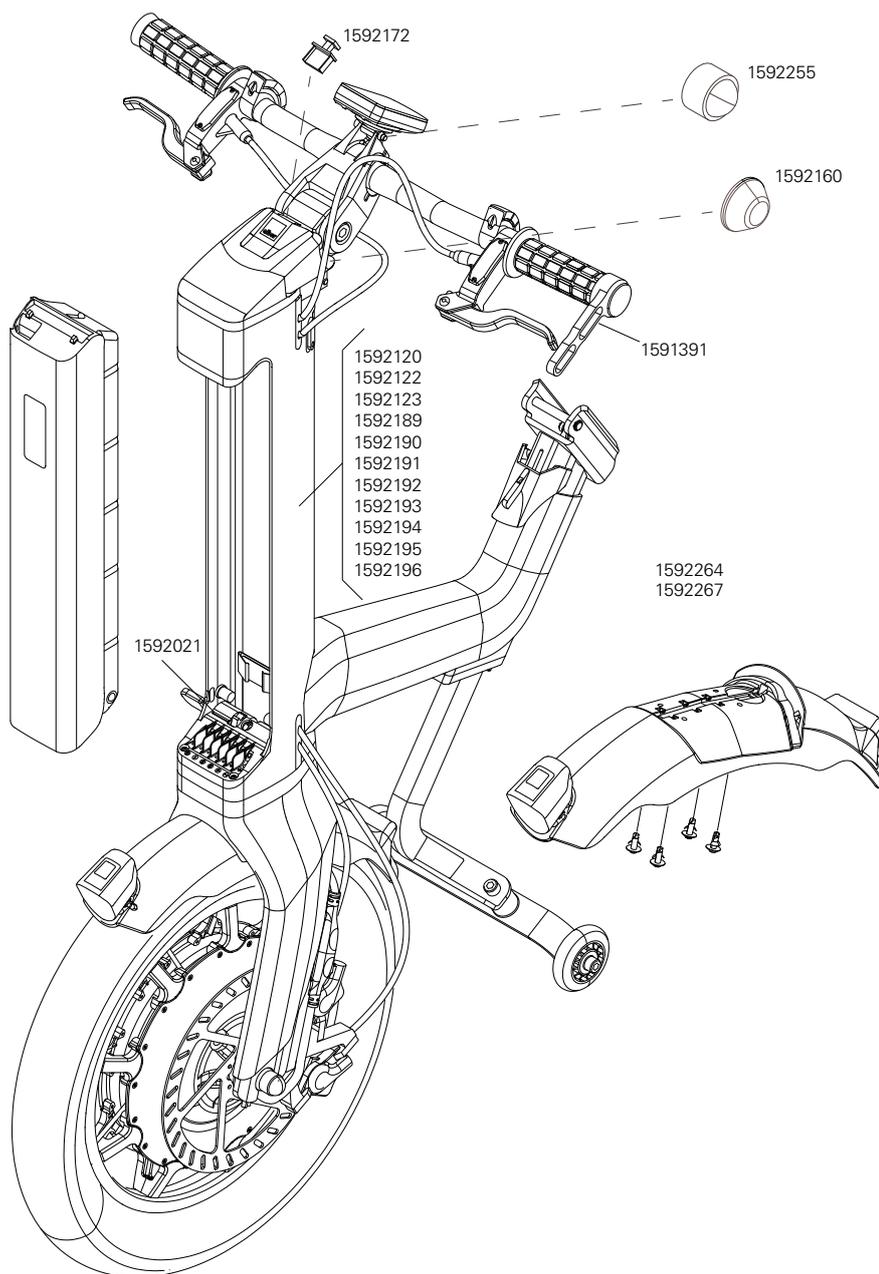

Bestellnummer	Bezeichnung	Anzahl	Netto in EUR
1591391	Stopfen für Griff	Stück	1,95
1592021	Montageset Akku UR-V7 Z20 / P15	Stück	55,70
1592120	Aufkleber set P15 weiß seidenmatt	Stück	89,00
1592122	Aufkleber set P15 dunkelgelb glänzend	Stück	89,00
1592123	Aufkleber set P15 feuerrot glänzend	Stück	89,00
1592160	Anschlagpuffer P15	Stück	5,45
1592172	Abdeckung USB-Buchse P15 mit Schnur	Stück	2,45
1592189	Aufkleber set P15 limettengrün glänzend	Stück	89,00
1592190	Aufkleber set P15 hellblau glänzend	Stück	89,00
1592191	Aufkleber set P15 kupferorange metallic matt	Stück	98,00
1592192	Aufkleber set P15 lila metallic matt	Stück	98,00
1592193	Aufkleber set P15 kirschrot metallic matt	Stück	98,00
1592194	Aufkleber set P15 smaragdgrün metallic matt	Stück	98,00
1592195	Aufkleber set P15 dunkelblau metallic matt	Stück	98,00
1592196	Aufkleber set P15 anthrazit metallic matt	Stück	98,00
1592255	Abdeckung für Mutter	Stück	1,20
1592264	Schutzblech P15 incl. Vorder- und Rücklicht (Standard)	Stück	138,00
1592267	Schutzblech P15 incl. Vorder- und Rücklicht (Supernova)	Stück	248,00
1592332	Spiralschlauch für Fixierung Kabel	Stück	1,25



## Andockmechanismus

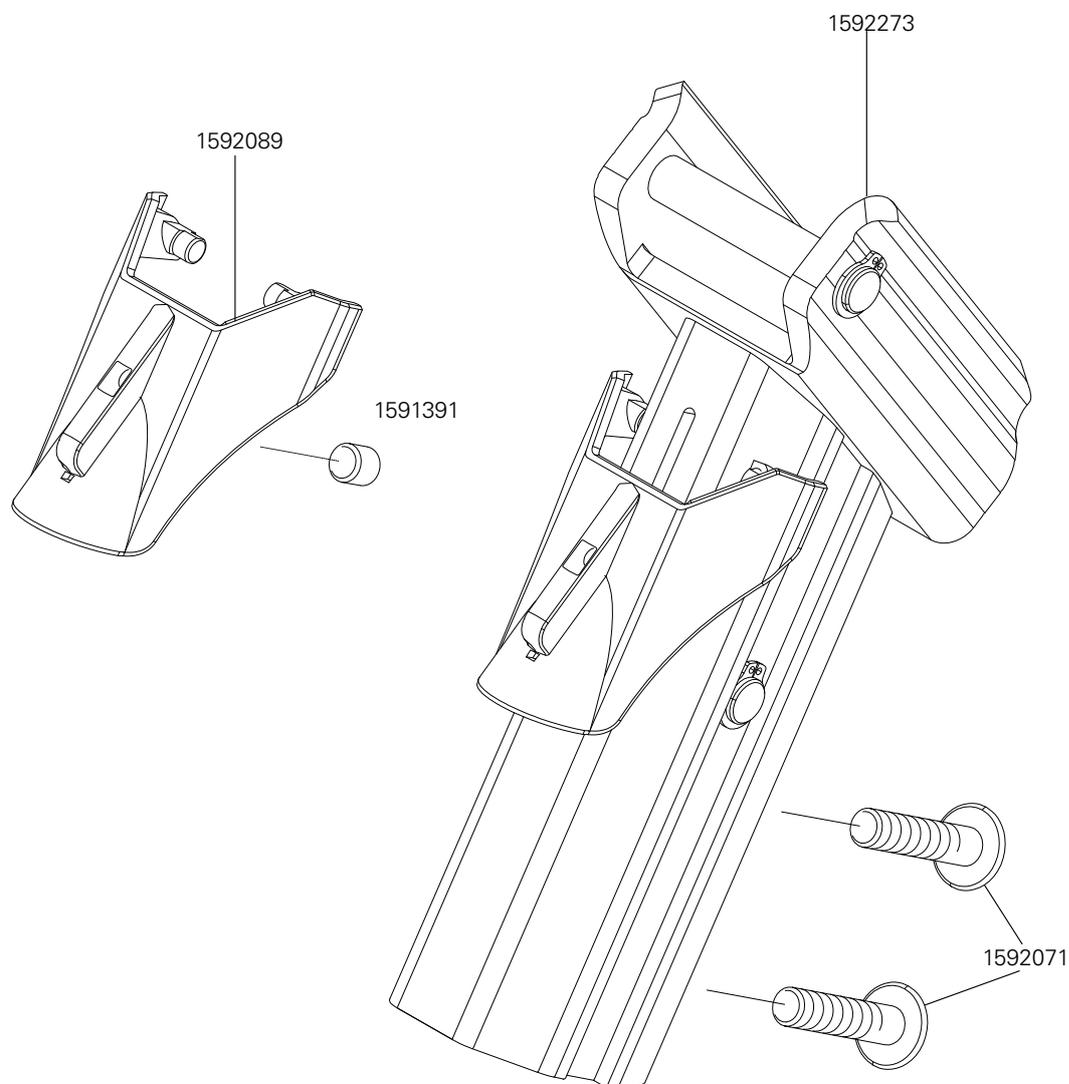

Bestellnummer	Bezeichnung	Anzahl	Netto in EUR
1591391	Stopfen für Griff	Stück	1,95
1592071	Schraube DIN 7380 M8x35 schwarz	Stück	1,00
1592089	Hebel für Andockmechanismus P15	Stück	14,20
1592273	Andockmechanismus P15	Stück	221,50

# E-PILOT



- Standard
- Pflicht-Felder:** <sup>1)</sup>  
Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!
- Optionsfeld

- BESTELLUNG
- KOSTENVORANSCHLAG

**Rechnungsadresse** (Stempel oder leserlich ausfüllen) Kd.-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

**Versandadresse** (falls von Rechnungsadresse abweichend)

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

**Auftragsart**

- Selbstanbau<sup>2)</sup> (bitte Abschnitt „Angaben zum Rollstuhl“ vollständig ausfüllen!)
- Anbau bei Alber im Werk<sup>3)</sup> (ohne Aufpreis)

**Versandart**  Standard 0,00 EUR

**Kommission** \_\_\_\_\_

- e-pilot P15** – Ausführung 6 km/h 1591915 \*
- e-pilot P15** – Ausführung 10 km/h 1591916 \*

- Mobility Plus Package e-pilot P15 1592221 327,73 EUR  
(Erweiterungen: Speed, Cruise, easyNavi)

\* Bitte eigener Preisliste entnehmen

**Wichtiges Zubehör**

- Halterung zur Montage am Rollstuhl 1592290 310,00 EUR

**Angaben zum Rollstuhl**

Rollstuhlhersteller (z. B. Küschall) \_\_\_\_\_

Modell (z. B. Compact) \_\_\_\_\_

Baujahr \_\_\_\_\_

**Bremsenvariante**

- waagrecht  
(z. B. Performance)

senkrecht  
(z. B. Kniehebel)

Sitzbreite (Sitzrohr außen gemessen) \_\_\_\_\_ cm

**Fußauflage**

- 1 Auflagebrett

2 einzelne Auflagen

Sitzhöhe vorne (Unterkante Bespannung gemessen) \_\_\_\_\_ cm

Beinstützenwinkel \_\_\_\_\_ °

**Rahmenform**

- gerade

eingezogen

V-Form

Unterschenkellänge \_\_\_\_\_ cm

**Bemerkungen** (Anbau, Lieferung etc.)

**E-PILOT****2**  Standard **Pflicht-Felder:** <sup>1)</sup>

Ohne Angaben ist keine Bearbeitung möglich!

 Optionsfeld**Farboptionen Designelemente** Weiß seidenmatt Standard 0,00 EUR**Hochglanz-Signalfarbe:** Dark Yellow (Dunkelgelb) 1592122 89,00 EUR Fire Red (Feuerrot) 1592123 89,00 EUR Lime Green (Limettengrün) 1592189 89,00 EUR Light Blue (Hellblau) 1592190 89,00 EUR**Metallic-Farbe matt:** Blaze Orange (Kupferorange) 1592191 98,00 EUR Purple (Lila) 1592192 98,00 EUR Cherry Red (Kirschrot) 1592193 98,00 EUR Emerald Green (Smaragdgrün) 1592194 98,00 EUR Dark Blue (Dunkelblau) 1592195 98,00 EUR Anthracite (Anthrazit) 1592196 98,00 EUR**Zubehör Laderaum/Verstauen** KLICKfix® Grundträger vorne 1592281 140,00 EUR Shopping-Tasche mit KLICKfix® Adapter, schwarz 1592278 68,00 EUR Shopping-Tasche mit KLICKfix® Adapter, gepunktet 1592277 68,00 EUR Vario-Träger mit KLICKfix® Adapter, schwarz 1592280 58,00 EUR KLICKfix® Grundträger hinten 1592282 110,00 EUR Compact Tasche mit KLICKfix® Adapter, schwarz 1592276 38,50 EUR Flaschenhalter mit KLICKfix® Adapter, schwarz 1592284 27,50 EUR**Zubehör Allgemein** Vorderlicht Supernova 1592173 110,00 EUR Rückspiegel links 1592286 28,50 EUR Handballenauflage Gasgriff 1592287 24,50 EUR**Zubehör Akku-Pack** Wechsel-Akku 13,8 Ah 1592097 760,00 EUR Ladegerät 4 Ah 1592333 240,00 EUR**Zubehör Rollstuhl** Verstärkte Rollstuhlräder, 24" x 1 3/8" mit Steckachse 1/2" 1592288 (Paar) 280,00 EUR Rücklicht zur Montage am Schiebegriff 1592285 (Stück) 35,00 EUR Sicherheitspaket 1592289 (Stück) 235,00 EUR  
(Heckmarkierungstafel, Rückleuchten, Kennzeichenträger. Für Einzelabnahme Produktkombination notwendig)

Datum ..... / ..... / ..... Unterschrift Besteller .....

Stand 01.03.2018. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, inklusive Verpackung, ab Werk. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alber GmbH, Änderungen vorbehalten.

1) Um Ihre Bestellung reibungslos und ohne Zeitverlust zu bearbeiten, benötigen wir ALLE Informationen in den blau hinterlegten Feldern.

2) Anbausätze können nur an geschulte Fachhändler (Anbauschulung) verschickt werden.

3) Bitte Rollstuhl mit Kopie dieser Bestellung baldmöglichst und frachtfrei an Alber senden.



**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG  
Ebnatstrasse 125  
8200 Schaffhausen

052 630 31 60  
[www.strack.ch](http://www.strack.ch)  
[info@strack.ch](mailto:info@strack.ch)

